

Badewanneneinstiegshilfe BONARE

Informationen

Größe: 61 x 23 x 14 cm
 Maximale Tragkraft: 100 kg
 Gebrauchsfähig für alle Badewannenränder von 6 bis 12,5 cm
 Komfortable Konzeption

Lieferumfang


- A: Haltegriff Einstiegshilfe (1x)
- B: Halterung (2x)
- C: Rutschfestes Halterungsrrohr (1x)
- D: Schraube (2x)
- E: Schraubenabdeckung (2x)
- F: Feineinstellungshilfe lang (4x)
- G: Feineinstellungshilfen kurz (4x)
- H: Abdeckung Feineinstellung (4x)
- I: Rutschfeste Bande (2x)
- J: Anti-Rutsch-Element für C (2x)
- K: Schrauben für C (2x)



A 1x	B 2x	C 1x	D 2x
E 2x	F 4x	G 4x	H 6x
I 2x	J 2x	K 2x	

Gebrauchshinweise

Die Badewanneneinstiegshilfe BONARE wurde konzipiert, um ein leichtes Ein- und Aussteigen aus der Badewanne zu ermöglichen.

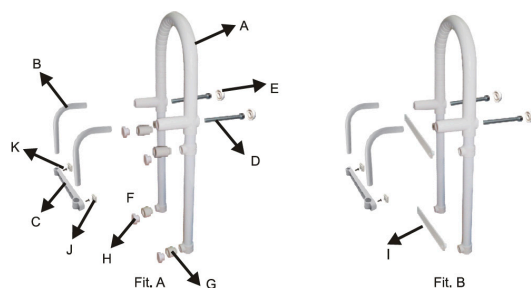

Aufbauanleitung

- Die Badewanne muss zum Einbau der Badewanneneinstiegshilfe trocken sein.
- Befestigen Sie den Kunststoffhalter für die Aufhängung (C) an den Aufhängern (B). B und C mit einer Schraube (K) befestigen, dann mit dem Anti-Rutsch-Element für C (J) abdecken.
- Befestigen Sie die Halterung (B) mit Hilfe der Schrauben (D) an der Einstiegshilfe (A).
- Positionieren Sie die Einstiegshilfe auf dem Badewannenrand. Falls nötig, regeln Sie die Abstände mit Hilfe der Feineinstellungshilfen (F) und (G). Es ist nicht zwingend notwendig, diese Feineinstellungshilfen zu benutzen.
- Für die Rutschsicherheit wählen Sie entweder die Verstellabdeckungen (H) oder die Anti-Rutsch-Bänder (I). Drücken Sie die Verstellabdeckungen auf die Feineinstellungshilfen. Die Anti-Rutsch-Bänder müssen ebenfalls auf die Feineinstellungshilfen gedrückt werden. Dann befestigen Sie die doppelseitigen Klebestreifen an der Wanne.
- Vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben (D) versichern Sie sich, dass eine der beiden rutschfesten Teile (H) oder (I) aufgesetzt sind, um ein Verkratzen der Badewanne zu vermeiden. Drücken Sie nach dem Festziehen der Schrauben (D) die Schraubenabdeckungen (E) auf die Schrauben (D).
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung die korrekte Befestigung der Einstiegshilfe.

Sicherheits- und Pflegehinweise

Benutzen Sie die Badewanneneinstiegshilfe nur, wenn diese entsprechend der Aufbauanleitung installiert wurde.
 Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts ausschließlich schonende Putzmittel und Putztücher.

Achtung!

Bitte prüfen Sie vor der Benutzung unbedingt, ob die Griffe fest und sicher befestigt sind. Nur so verhindern Sie Verletzungen und Stürze.

