


# BESTE ERGEBNISSE DURCH RICHTIGE ANWENDUNG

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG ZUR KORSETTANWENDUNG

## GEDULD:

- Korsett enthält 9 nanotechnologische Kunststoffstäbchen, um Ihre Haltung zu unterstützen und zu verbessern.
- Diese Stäbchen verhindern ein Verbiegen und sorgen dafür, dass das Korsett Sie fest hält.
- Deshalb vermittelt das Korsett nicht ein sehr elastisches Gefühl wie andere Korsetts.
- Um ein Ergebnis zu erzielen, ist die **regelmäßige Anwendung sehr wichtig**, deshalb sollten Sie geduldig sein.
- Mit der Zeit werden Sie sich daran gewöhnen, das Korsett zu tragen.

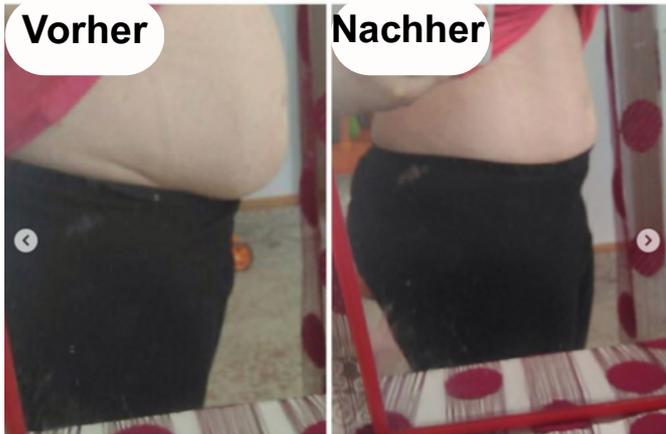

Die von unseren Kundinnen und Kunden mit uns geteilten **positiven Ergebnisse und Fotos**



## WIE FUNKTIONIERT ES?

Das Korsett unterstützt die Gewichtsabnahme, indem es im Laufe des Tages **die Kalorienaufnahme reduziert**, und formt gleichzeitig Taille, Bauch und Rücken durch seinen festen Halt.

## ANWENDUNGSHINWEIS

**WICHTIG:** TRAGEN SIE IHR KORSETT ÜBER EINER BAUMWOLLBLUSE ODER EINEM BAUMWOLLUNTERHEMD.

- Wenn Sie keine gesundheitlichen Probleme haben (z. B. allergische Erkrankungen wie Latexallergie), empfehlen wir, es täglich **bis zu 6–8 Stunden zu tragen**.



**% DIE IDEALE LÖSUNG FÜR EINEN STRAFFEN UND GEFORMTEN KÖRPER %**

- Es gibt 3-stufige Haken. Bei regelmäßiger Anwendung sorgt es innerhalb von **2 Monaten** für eine Verringerung von **5–10 cm**.
- Verkleinern Sie Ihr Korsett mit diesen Haken, während Ihre Taille dünner wird.



**NACH ERHALT DES KORSETTS:**

WENN SIE DAS KORSETT UM IHRE TAILLE LEGEN UND VORNE UNGEFÄHR EINE HANDBREIT PLATZ BLEIBT, IST IHRE **GRÖSSENWAHL RICHTIG**.

## ANLEGEN DES KORSETTS:

- 1-Schließen Sie Ihr Korsett **von unten nach oben**.
- 2-Es kann hilfreich sein, wenn Ihnen **jemand hilft**.
- 3-Sie können es auch **im Liegen anziehen**.





## NACH DER GEBURT:

Nach einer **normalen Geburt** können Sie es **sofort** verwenden, nach einem Kaiserschnitt, nachdem die Nähte verheilt sind.



## BEIM SCHLAFEN IN DER NACHT:

Tragen Sie Ihr Korsett **nicht** nachts beim Schlafen. Um abzunehmen, sollten Sie Ihr Korsett tagsüber tragen, wenn der Stoffwechsel arbeitet.



## REINIGUNGSHINWEIS:

- Da dieses Korsett 9 dauerhafte Kunststoffstäbchen enthält, ist es für **Handwäsche** geeignet.
- Außerdem können Sie es mit einem feuchten **Tuch abwischen** oder durch Lüften reinigen.



## MATERIALZUSAMMENSETZUNG:

%96 Baumwolle, %4 Elasthan, %100 **Natürlicher** Latex

Mit der beiliegenden **Tabelle** können Sie regelmäßig Ihre Fortschritte in den Bereichen Taille, Bauch, Hüfte, Beine und Gewicht **notieren** und so Ihre Entwicklung verfolgen.

Wir freuen uns auf Ihre positiven Ergebnisse.