

Gehgestell

Gebrauchsanweisung

Modelle: AT02004; AT02005; AT02006; AT02007



Gehgestelle sind leichte und anwenderfreundliche Produkte, die als Gehhilfen für Personen mit eingeschränkter Mobilität bestimmt sind. Sie bieten dem Nutzer eine Abstützung, die das Sturzrisiko reduziert und ermöglichen das Laufen mit beidseitiger Abstützung. Das max. Körpergewicht des Benutzers darf 150 kg nicht überschreiten.

MODELLE:

Je nach Bedarf und Präferenz stehen den Nutzern 4 Ausführungen der Gehgestelle zur Wahl:

AT02004 – Ausführung mit 4 Stellfüßen, versetzbar. Diese Ausführung gewährt die höchste Stabilität. Zum Verstellen muss das Gehgestell komplett angehoben werden. Es wird hauptsächlich zur Bewegung auf kurzen Strecken empfohlen.

AT02005 – Ausführung mit 2 Rollen. Das Gehgestell kann nach vorn geschoben werden, ohne es komplett anheben zu müssen.

AT02006 – Ausführung mit 4 Rollen. Hintere Lenkrollen sind mit Feststellern ausgestattet. Dieses Gehgestell ermöglicht dem Nutzer schnelle Vorwärtsbewegung und gegebenenfalls kann das Gehgestell mit den Feststellern arretiert werden. Das Modell wird für Personen empfohlen, die keine Balanceprobleme haben.


AT02007 – Ausführung mit 4 lenkbaren Rollen. Dieses Gehgestell ermöglicht dem Nutzer eine schnelle Bewegung in allen Richtungen und gegebenenfalls kann das Gehgestell mit den Feststellern arretiert werden. Das Modell wird für Personen mit großer Mobilität empfohlen, die keine Probleme mit dem Gleichgewicht haben.

SICHERHEITSHINWEISE

- 1) Modelle AT02006 und AT02007 dürfen nicht von Personen mit Gleichgewichtsstörungen verwendet werden. Es kann zum Umkippen des Nutzers mit dem Gehgestell kommen.
- 2) Nicht über den Umriss des Gehgestells hinauslehnen. Es besteht Sturzgefahr.
- 3) Mit dem Gehgestell nicht schaukeln. Es besteht Sturzgefahr.
- 4) Wenn das Gehgestell mit 4 Rollen (AT02006, AT02007) momentan nicht gebraucht wird, muss immer seine Feststellbremse betätigt werden.
- 5) Das Produkt darf nicht von Personen mit einem Körpergewicht von über 150 kg verwendet werden.
- 6) Kontakt mit offenem Feuer vermeiden. Das Produkt ist entzündbar.
- 7) Nach der Montage muss sichergestellt werden, dass der Stahlbolzen des Fixierclips von Stellfüßen oder Rollen durch die Bohrungen in den beiden Seitenwänden steckt. Anderenfalls kann das Produkt instabil sein und die Bohrung kann verformt werden.

VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Zum Auseinanderklappen halten Sie das Gehgestell am vorderen Rahmenteil an den beiden Schnurbefestigungsstellen und ziehen Sie die beiden Teile bis zum Anschlag auseinander. Um das Gehgestell zu falten, müssen Sie es an der Kugel nach hinten ziehen.

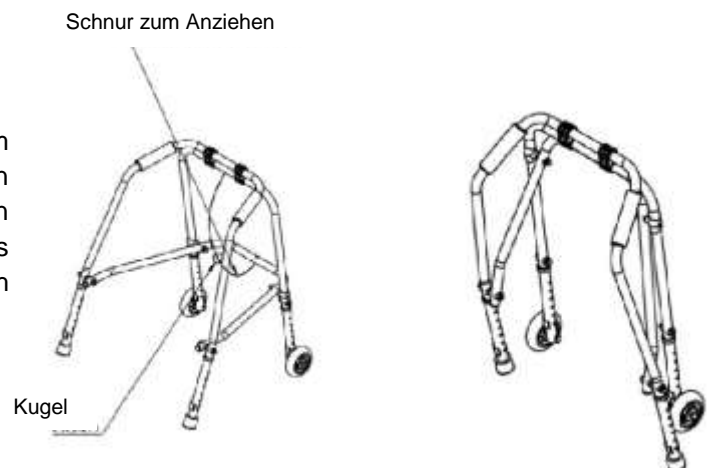



Vor dem ersten Gebrauch muss die Höhe des Produkts eingestellt werden. Dazu ist der Einsteckclip herauszunehmen, die gleiche Höhe für alle vier Beine einzustellen und anschließend der Clip in entsprechende Bohrung einzustecken. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DER STAHLBOLZEN DURCH DIE BOHRUNG IN DEN BEIDEN SEITENWÄNDEN STECKT. Anderenfalls kann das Produkt instabil sein und die Bohrung verformt werden

BEWEGUNG MIT DEM GEHGESTELL

AT02004 – das Gehgestell wird durch Anheben und nach vorn Abstellen des kompletten Gehgestells versetzt.
AT02005 – das Gehgestell wird durch Anheben seines Hinterteils, Vorschub nach vorn und Abstellen des Hinterteils versetzt.

AT02006 – das Gehgestell wird nach vorwärts durch Vorschieben bewegt. WENN DAS GEHGESTELL MOMENTAN NICHT BENUTZT WIRD, MUSS IMMER SEINE FESTSTELLBREMSE BETÄTIGT WERDEN.

AT02007 – das Gehgestell wird in gewünschte Richtung durch Vorschieben bewegt. WENN DAS GEHGESTELL MOMENTAN NICHT BENUTZT WIRD, MUSS IMMER SEINE FESTSTELLBREMSE BETÄTIGT WERDEN.

WARTUNG

Das Produkt muss regelmäßig mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden. Das Produkt kann mit Desinfektionsmittel behandelt werden.

Falls das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, muss es an einem trockenen Platz aufbewahrt werden. Das Produkt darf nicht dauerhaft einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr gebraucht werden soll, kann es als Hausmüll behandelt werden. Es wird empfohlen, die Bauteile je nach Stoffart bei der Entsorgung zu trennen.

Antar Medizin GmbH
Döbelner Str. 1, 12627 Berlin
Tel.: 030 / 22011732
Fax: 030 / 22012821
www.antarmedizin.com

GARANTIESCHEIN

Modell:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

- 1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 1, 12627 Berlin, Tel.: 030 / 22011732, Fax: 030 / 22012821
www.antarmedizin.com, gewährt hiermit auf das Produkt eine
12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkasse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
- 2) Während der Garantiefrist verpflichtet sich ANTAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
- 3) ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
- 4) Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma ANTAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
- 5) Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
- 6) Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
- 7) DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEM KAUFNACHWEIS (KASSENBon ODER RECHNUNG). BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES "AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND", BEIZUFÜGEN."
- 8) Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.