

Montageanleitung

1. Inhalt aus dem Karton nehmen.
2. Setzen Sie das mit einer „2“ gekennzeichnete Beinteil in die mit „2“ gekennzeichnete Nut an der Unterseite des Sitzes ein. Setzen Sie das mit einer „1“ gekennzeichnete Beinteil auf das Rohr mit der „2“ und in die mit „1“ gekennzeichnete Nut des Sitzes ein. Führen Sie die kürzere Flügelschraube durch das mittlere Loch, ziehen Sie sie jedoch nicht fest.



3. Montieren Sie die Rückenlehne, indem Sie die L-förmigen Rückenlehnenstützen nehmen und sie mit den kürzeren Flügelschrauben an der Rückenlehne befestigen, wie unten gezeigt.



4. Befestigen Sie die Rückenlehne am Sitz, indem Sie die Löcher der L-förmigen Rahmenstützen mit den Löchern im Beinteil ausrichten. Befestigen Sie die mit „2“ gekennzeichneten Rahmenbeine mit den längeren Flügelschrauben. Achten Sie dabei auf die Rückseite des Sitzes.



5. Befestigen Sie die mit „1“ markierten Rahmenbeine mit den verbleibenden zwei längeren Flügelschrauben.



6. Ziehen Sie die mittlere, kürzere Schraube und die beiden Schrauben im Rahmen „2“ vollständig fest und prüfen Sie, ob alle Schrauben vollständig festgezogen sind.
7. Setzen Sie die Beine in den Beinrahmen ein, indem Sie die Druckstifte eindrücken, die Beine über die Aufnahme schieben und die gewünschte Höhe einstellen. Stellen Sie sicher, dass alle Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.



8. Passen Sie vor Gebrauch die Höhe jedes Beins Ihren Bedürfnissen an und achten Sie darauf, dass alle Beine die gleiche Höhe haben. Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, arretieren Sie die Beine, indem Sie die Knöpfe in die entsprechenden Löcher einführen (siehe Abbildung).

9. Um sicherzugehen, dass die Beine in ihrer Position arretiert sind, drücken Sie sie nach unten oder ziehen Sie sie heraus.



zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Druckknöpfe zur Höhenverstellung vollständig durch das gleiche Loch jeder Beinverlängerung ragen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Beinverlängerungen sicher in ihrer Position arretiert sind und eine gleichmäßige Höhe erreicht wird.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Flügelschrauben richtig festgezogen sind.
3. Alle vier Beinverlängerungen mit Gummispitzen **MÜSSEN** jederzeit gleichzeitig den Boden berühren.
4. Achten Sie bei der Verwendung in einer Wanne darauf, dass die Gummispitzen die Seiten der Wannenwand nicht berühren.
5. Stellen Sie sich **NICHT** auf den Stuhl.

HINWEIS: Um die Schönheit der ursprünglichen Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie sie mit milder Seife und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab. Wischen Sie den Badesitz nach jedem Gebrauch trocken.

Gewichtskapazität: 300 lbs (136kg)