

Bedienungsanleitung

Duschrollstuhlhocker (Duschhocker)

REF: 302050

Achtung! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.

Verwendungszweck

Der Hocker ist ein medizinisches Gerät zum Sitzen beim Duschen und soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Duschen erleichtern und unterstützen. Der Hocker ist für den Gebrauch zu Hause sowie in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen vorgesehen. Der Hocker ist ausschließlich für die oben beschriebenen Zwecke in Innenräumen bestimmt. Jede andere Verwendung ist untersagt.

Indikationen und Kontraindikationen für die Verwendung des Produkts

Der Hocker ist für ältere Menschen, Rollstuhlfahrer, Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit im Lenden-, Knie oder Hüftbereich sowie für alle Personen geeignet, die bei der täglichen Körperhygiene Schwierigkeiten haben, im Stehen zu bleiben. Der Benutzer muss sowohl im Sitzen als auch im Stehen selbstständig das Gleichgewicht halten und über ausreichende Fähigkeiten zur Stabilisierung einer stabilen Sitzposition verfügen. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Der Hocker sollte nicht verwendet werden, wenn der Benutzer Gleichgewichtsprobleme oder Wahrnehmungsstörungen hat.

Produktbeschreibung

Der Hocker besteht aus einem Aluminiumrahmen, vier Beinen mit Gummikappen und einer Sitzfläche aus robustem Kunststoff, die ein Verrutschen verhindert. Die Aluminiumbeine sind korrosionsbeständig. Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verrutschen und Kratzer auf der Duschwanne. Die Beine sind verstellbar, sodass die Sitzhöhe an verschiedene Benutzer angepasst werden kann.

Vorbereitung

Der neue Hocker ist für Transport und Lagerung zerlegt und muss daher zunächst zusammengebaut werden. Befolgen Sie dazu die Montageanleitung auf der zweiten Seite dieser Bedienungsanleitung. HINWEIS! Befolgen Sie alle Montageanweisungen genau.

Um die Hockerhöhe an die Körpergröße des Benutzers anzupassen, drücken Sie den Knopf am Hockerbein und bewegen Sie den unteren Teil des Beins nach oben oder unten, bis der Knopf in der gewünschten Verstellöffnung einrastet. Wiederholen Sie den Vorgang anschließend für die restlichen Beine. Beachten Sie, dass alle vier Beine des Hockers auf die gleiche Höhe eingestellt werden müssen. Stellen Sie nach der Einstellung sicher, dass der Feststellknopf richtig in der Verstellöffnung sitzt und das Bein in der gewählten Position fest sitzt. Achten Sie darauf, dass der Hocker beim Einsetzen in die Dusche eben und stabil auf allen vier Beinen steht und sich nicht seitlich verschiebt oder kippt.

Verwendung

Ein Duschhocker ermöglicht eine sichere und bequeme Position in der Dusche und erleichtert die Hygiene sowie das Ein- und Aussteigen. Setzen Sie sich immer auf einen stabilen, vierbeinigen Duschhocker auf einer ebenen, glatten Oberfläche. Setzen Sie sich so auf den Hocker, dass Ihr Schwerpunkt ungefähr in der Mitte der Sitzfläche liegt. Kippen Sie den Hocker beim Sitzen NICHT so, dass Ihre Beine vom Boden abheben! Setzen Sie sich niemals auf die Sitzkante!

Transport und Lagerung

Transport: Das Produkt lässt sich leicht zerlegen und mit jedem Transportmittel transportieren. Während des Transports sollte das Produkt zusammengeklappt und gesichert sein, um unerwartete Bewegungen zu vermeiden.

Aufbewahrung: Lagern Sie das Produkt trocken und bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt und schützen Sie es vor intensiver Sonneneinstrahlung.

Wichtige Sicherheitshinweise

Vorsicht! Klapp- und Verstellmechanismen können zu Hauteinklemmungen führen. Das Produkt muss vor Gebrauch vollständig montiert sein. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle verstellbaren Teile sicher befestigt sind. Seien Sie vorsichtig auf nassen oder rutschigen Oberflächen. Verwenden Sie den Hocker nur für den vorgesehenen Zweck. Stellen Sie sich nicht auf den Hocker. Verwenden Sie nur ein Produkt in einwandfreiem Zustand. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Produkts. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Benutzen Sie den Hocker nur auf ebenen, glatten Flächen. Prüfen Sie vor Gebrauch stets die Stabilität des Hockers.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Verwenden Sie ausschließlich Wasser und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Scheuermittel. Bei Mängeln oder Schäden stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicecenter. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie vermuten, dass es beschädigt ist oder Teile fehlen. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem autorisierten Servicecenter reparieren oder austauschen.

Produktlebensdauer und Entsorgung:

Lebensdauer: Die Lebensdauer des Produkts ist nicht eindeutig definiert und hängt ausschließlich von seinem technischen Zustand ab. Sie hängt von der Art der Nutzung und Pflege des Produkts ab. Bei Befolgung dieser Anweisungen geht der Hersteller jedoch von einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren aus.

Entsorgung: Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu besprechen.

Übergabe an einen neuen Benutzer

Der Stuhl ist für den wiederholten Gebrauch konzipiert und kann an einen neuen Benutzer übergeben werden. Vor der Übergabe sollte der Stuhl mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt und desinfiziert werden. Zustand, Stabilität und strukturelle Integrität des Stuhls sowie Verschleiß einzelner Komponenten sollten überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Besonders wichtig ist der Zustand der Gummifüße.

Technische Daten

Maximale Abmessungen (B x L x H): 50,4 x 51,5 x 55

cm Sitzmaße (B x L): 50,4 x 31 cm

Produktgewicht: 2,07 kg

Garantiebedingungen

Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

- Während der Garantiezeit werden alle Teile, die aufgrund von Herstellungsfehlern oder der Verwendung ungeeigneter Materialien beschädigt werden, kostenlos repariert oder ersetzt.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch natürliche Abnutzung, mechanische Beschädigung oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Unbefugte Änderungen oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie.
- Die Seriennummer befindet sich auf dem Aufkleber am Produkt.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Funktionsunfähigkeit des Produkts während der Reparatur der Mängel entstehen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missverständnisse in dieser Anleitung entstehen.

Sitzhöhe (einstellbar): 37,7 cm ÷ 55 cm

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT: 115 KG







WENN SIE FRAGEN ZU DIESEM PRODUKT HABEN ODER MEDIZINISCHE VORFÄLLE MELDEN, WENDEN SIE SICH BITTE DIREKT AN DEN HERSTELLER UNTER DEN KONTAKTINFORMATIONEN IN DER ÜBERZEILE DIESES HANDBUCHS ODER AN IHREN GERÄTELIEFERANTEN.

Produktkennzeichnung

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt der Klasse I und erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, nachfolgend MDR genannt. Das Etikett befindet sich an einem der unteren Rahmenrohre.

Auf der Produktkennzeichnung verwendete Symbole

	Symbol für medizinische Geräte		Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung
	Kennzeichnung der Konformität des Produkts mit der MDR- Verordnung		Für den Innen- und Außenbereich

Montageanleitung für den Rollstuhl-Duschhocker

1. Schrauben Sie die Beine des Hockers mittig zusammen, wie auf den Fotos unten gezeigt, und verwenden Sie dazu die Schraube und Mutter aus dem mitgelieferten Set (verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Maulschlüssel Nr. 10).



ACHTUNG!!! SCHRAUBE UND MUTTER BIS ZUM ANSCHLAG DREHEN!

Die Beine des Hockers dürfen sich nicht frei relativ zueinander bewegen! Dies kann zu Instabilität des Produkts, Beschädigungsgefahr des Hockers und/oder Verletzungen führen!



2. Befestigen Sie anschließend die Sitzfläche mit den restlichen 4 Schrauben samt beiliegenden Unterlegscheiben an den Hockerbeinen, wie auf dem Foto unten zu sehen.

VORSICHT!!! DIE SCHRAUBEN VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN!