



WINCH MASSAGEROLLER MIT THERMOTHERAPIE- FUNKTIONEN

Der Winch Massageroller mit **Wärme-/Kältetherapie** ist das ideale Massagegerät für zu Hause, im Büro, unterwegs oder beim Sport und kann Ihnen dabei helfen, sich durch eine gezielte Massage **entspannter und fitter** zu fühlen.

Die **ergonomische Form** ermöglicht eine **einfache und effiziente Anwendung** am ganzen Körper!

Anwendung: Für eine effektive Wärme / Kältetherapie **wärmen**, bzw. **kühlen** Sie die Edelstahlkugel, indem Sie diese z.B. für ca. 2 Std. in den Kühlschrank / Gefrierfach oder ca. 10 Min. in heißes Wasser legen. Die Kugel nimmt die Temperatur an und speichert diese.

Genießen Sie anschließend eine angenehme Massage, indem Sie den Massageball über Ihren Körper rollen.

Sie können den Massageroller auch je nach Belieben in Kombination mit Massagegelen oder Ölen verwenden. Die Edelstahlkugel lässt sich einfach mit den herkömmlichen Mitteln reinigen.

Wirkung der Wärme-/Kältetherapie:

Wärmetherapie: Förderung der Durchblutung → Linderung von Verspannungen und Muskelschmerzen

Kältetherapie: Abschwellung, Schmerzlinderung und Entzündungshemmung

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die Edelstahlkugel nicht zu heiß oder kalt ist, um die Haut nicht zu verbrennen! Die Edelstahlkugel sollte eine körperangenehme Temperatur haben! Legen Sie den Massageroller mit der erwärmten / kalten Edelstahlkugel nicht an einen Ort, an dem Kinder das Produkt erreichen können.

Entsorgungshinweis:

Der Massageroller kann im Restmüll entsorgt werden.

A00567
Made in China



Imported and distributed by
Winch GmbH
Pelkovenstraße 148
80992 München