

**D** Gebrauchsanleitung  
**wellicools Kuschel-Kühlpad zum Liebhaben**

wellicools\*\*\*

**Einsatzbereiche:** Zur unterstützenden Behandlung bei Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen; zur Minderung von Schwellungen und Entzündungen; bei Insektenstichen, Zahn- und Kopfschmerzen, bei Kindern ab 3 Jahren.

**Gegenanzeigen:** Kälteanwendungen können kontraproduktiv sein bei Arteriellen Durchblutungsstörungen, Kreislaufbeschwerden, beeinträchtigtem Hautgefühl (Kälte-/Hitzeunempfindlichkeit). Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt oder Apotheker.

**Anwendung:** Kühlen Sie das beiliegende Gel-Kältekissen für ca. 2 Stunden im Kühl- oder 1 Stunde im Gefrierschrank (ca.  $-15^{\circ}\text{C}$  bis max.  $-18^{\circ}\text{C}$ ). Trocknen Sie die Kompresse ggf. ab. Bei Kühlung im Gefrierschrank nur mit der Plüschseite anwenden. Vor Anwendung Temperatur am Unterarm testen. Kühlpad auf den schmerzenden Bereich legen und nicht länger als 10 Minuten anwenden. Unterkühlungsgefahr. Kühlpad nie auf offene Wunde legen. Kinder sollen das Produkt nicht unbeaufsichtigt anwenden. Gefahr von Erfrierungen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in das Kühlpad beißen oder darauf kauen. Beschädigtes Kühlpad entsorgen.

**Haltbarkeit:** Hohe Verarbeitungsqualität und reißfeste Materialien machen wellicools-Produkte sehr langlebig – sachgemäße Behandlung vorausgesetzt. Bitte lagern Sie Ihr wellicools Kühlpad stets trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Das Gel-Kältekissen ist bei sachgemäßer Behandlung 3 Jahre haltbar. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir Ihnen das wellicools Kühlpad kühl und trocken (max.  $25^{\circ}\text{C}$ ), geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren.

**ACHTUNG:** wellicools Kühlpads sind ausschließlich zur Kälteanwendung geeignet. Erwärmung in der Mikrowelle, Backofen, etc. führt zu Schäden am Kühlpad.


**Reinigung:** Die Plüschhülle können Sie mit der Hand oder bei maximal  $30^{\circ}\text{C}$  im Schonwaschgang der Waschmaschine waschen. Das Kühlpad können Sie mit einem feuchten Tuch und etwas Seife reinigen. Bitte keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden.

**Entsorgung:** Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Die wellicools Kühlpads können im Hausmüll entsorgt werden.

**Angaben zur Füllung:** Die Kühlpads sind mit Wasser, Glycerin und Polyacrylat gefüllt. Diese Inhaltsstoffe sind ungiftig und werden in vielen Produkten zur Körperpflege eingesetzt, sind aber nicht zum Verzehr geeignet. Sollten sie dennoch verschluckt werden, besteht keine Gefahr. Sollte Gel auf die Haut oder ins Auge gelangen, Stelle einfach mit viel Wasser abwaschen/ausspülen. Reizungen an Haut und Auge sind nicht bekannt.

**LOT** Chargennummer: siehe Aufdruck

 Verwendbar bis: siehe Aufdruck Produkt

 Maruida GmbH & Co KG, Hammstr. 1, D-67227 Frankenthal



Made in China