

## Protex «Stymulève» 6 stimulierende Latexkondome mit Noppen

**6 stimulierende Kondome aus Latex, mit Noppen. Befeuchtet mit Silikonöl, anatomisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 52mm.**

**Stimulierende Latexkondome, die mit Noppen versehen sind, um die Erregung zu steigern.**


Diese Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex gefertigt und bieten eine zuverlässige Qualität. Mit einer nominalen Breite von 52 mm und einer Wandstärke von 65 Mikron sind sie ideal für eine natürliche Empfindung und sicheren Schutz.

Die Kondome sind anatomisch geformt und naturfarben. Sie sind mit Silikonöl befeuchtet, was ein geschmeidiges Liebesspiel ermöglicht. Die kleinen Latexnoppen auf der Oberfläche sorgen für zusätzliche Stimulation und intensivere Empfindungen.

Anwendung: Überprüfen Sie vor der Anwendung das Verfallsdatum und bewahren Sie die Kondome an einem kühlen, trockenen Ort auf. Jedes Kondom ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Personen mit einer Latexallergie sollten diese Kondome nicht verwenden.

Protex ist eine Marke, die für ihre herausragende Qualität und technologische Innovation bekannt ist. Seit über 80 Jahren bietet Protex Kondome, die sich durch hohe Hautverträglichkeit und exzellente Verarbeitung auszeichnen. Die Marke steht für Sicherheit und Komfort in allen Situationen.

Diese Packung mit 6 Kondomen ist ideal für den privaten Gebrauch und bietet zuverlässigen Schutz und stimulierende Empfindungen. Protex Stymulève wurde entwickelt, um das Liebesspiel zu intensivieren und eine angenehme, sichere Erfahrung zu gewährleisten.

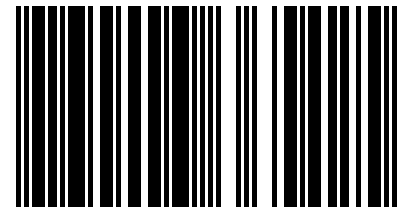

GTIN (EAN-13): 3760043365425



### Produkteigenschaften:

- Marke: Protex
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 28 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,065 mm
- Farbe: natur
- Form: anatomisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen
- Herkunftsland: Japan (JP)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.  
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.  
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.  
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.  
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.  
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Sagami Rubber Industries Co. Ltd** (JP-MF-000040149)

2-1 Motocho, Atsugi, Kanagawa 243-0002, Japan, [sagami-gomu.co.jp](http://sagami-gomu.co.jp), [satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp](mailto:satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, [www.sagami-europe.com](http://www.sagami-europe.com),  
[admin@sagami-europe.com](mailto:admin@sagami-europe.com)



Importeur: **RADIATEX S.A.** (FR-IM-000032102)

Rue Desnouettes 71/73, 75015 Paris, Frankreich, [protex.fr/](http://protex.fr/), [info@protex.fr](mailto:info@protex.fr)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)