


FAMILY
inada chair ROBOSTIC

HCP-D6D

Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Kauf des inada chair ROBOSTIC.
Wir hoffen, dass Ihnen der inada chair ROBOSTIC über viele Jahre hinweg ein
wertvoller Partner bei Ihrem täglichen Gesundheitsprogramm sein wird.

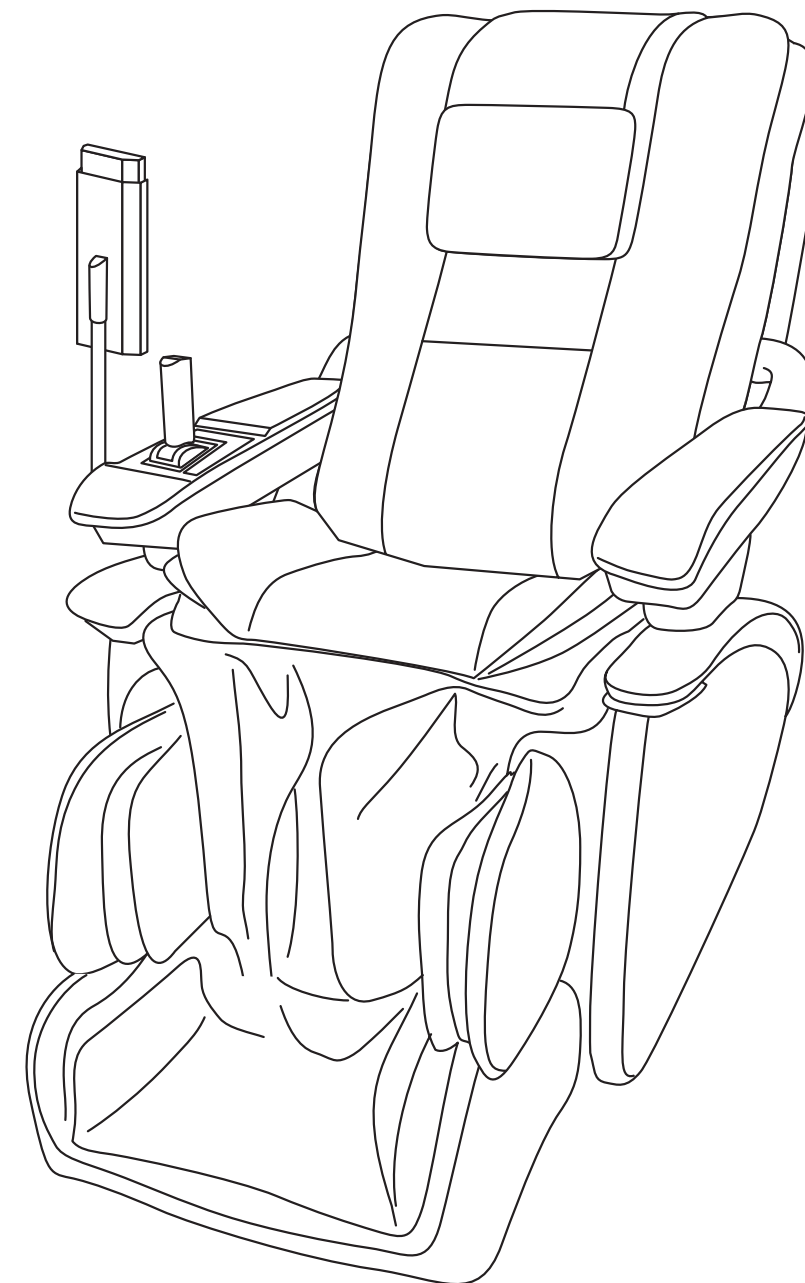

INHALT

■ SICHERHEITSHINWEISE —	1
■ HAUPTFUNKTIONEN —	4
■ KOMPONENTEN UND IHRE BESCHREIBUNG —	5
■ VOR DER VERWENDUNG —	9
■ POSITIONSEINSTELLUNG —	12
■ NACH DER VERWENDUNG —	16
■ MASSAGE-PROGRAMME UND AUSWAHL —	17
■ MANUELLER AUSWAHLMODUS —	19
■ GESUNDHEITSPFLEGE-PROGRAMME —	25
■ FEHLERSUCHE —	27
■ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN —	30
■ PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG —	31
■ SERVICE UND GARANTIE —	32
■ REGELMÄßIGE WARTUNG —	33
■ TECHNISCHE DATEN —	34

Alpha Techno GmbH

Ernst-Bauer-Str.1
97941 Tauberbischofsheim
Germany
TEL: 09341/9285-0
FAX: 09341/9285-28
Email: info@alpha-techno.com

Distributor:



Hergestellt durch FAMILY CO., LTD. Japan

Bedienungsanleitung



Die Garantiekarte wird separat
zur Verfügung gestellt.

- Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Gerätes sorgfältig durch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit auf, damit Sie bei Fragen jederzeit darin nachschlagen können.









SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese SICHERHEITSHINWEISE vor der ersten Inbetriebnahme Ihres ROBOSTIC sorgfältig durchgelesen haben. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Sessels, damit eine mögliche Beschädigung von Eigentum oder eine Verletzung von das Gerät verwendenden Personen oder Umstehender vermieden werden kann. Die unten aufgeführten Symbole werden in der gesamten Bedienungsanleitung verwendet, um wichtige Sicherheitsanweisungen hervorzuheben. Bitte befolgen Sie sämtliche Sicherheitshinweise. Beschreibungen der einzelnen Sesselkomponenten finden Sie auf den Seiten 5-8.

Angezeigte Warnungen





 Warnung Diese Maßnahme kann zum Tode oder zu ernsthaften Verletzungen führen.	 Achtung Diese Maßnahme kann zu Personenschäden oder zu einer Beschädigung von Eigentum führen.
--	---

Unterschiedliche Arten von Symbolen und ihre Beschreibung







 Warnung oder Vorsicht	 Verboten	 Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.	 Nicht anfassen	 Verwenden Sie den Stuhl nicht in oder in der Nähe von Wasser, wie z.B. im Bad.
	 Erforderliche Maßnahme	 Elektrische Erdung	 Stecken Sie den Stuhl aus	

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie bei Fragen immer darin nachschlagen können.




Sicherheitshinweise: Installation

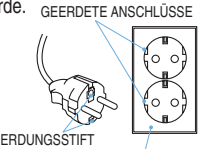 Achtung	 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie den Sessel nicht in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise in einem Badezimmer oder in einer Sauna. →Dies könnte zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen.
 Erforderliche Maßnahme	 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Installieren Sie den Sessel nur auf einem flachen, ebenen Boden. →Wenn der Sessel auf einem unebenen Boden aufgestellt wird, könnte er versehentlich umkippen. • Verwenden Sie den Stuhl nicht im Freien.






Sicherheitshinweise: Vor der Verwendung

 Warnung	<ul style="list-style-type: none"> • Raumanforderungen Dieses Gerät muss geerdet werden. Falls es zu einer Fehlfunktion oder zu einem Ausfall kommt, gewährleistet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das über einen Geräte-Erdungsleiter und einen Erdungsstecker verfügt. Der Stecker muss in einen geeigneten Anschluss eingesteckt werden, der ordnungsgemäß installiert und entsprechend den lokalen Bestimmungen und Anforderungen geerdet wurde. • Ein nicht ordnungsgemäßer Anschluss des Geräte-Erdungsleiters kann das Risiko eines elektrischen Schlags zur Folge haben. Lassen Sie die Erdung des Gerätes im Zweifelsfall von einem qualifizierten Elektriker oder einem Kundendienst-Vertreter überprüfen. Falls der Stecker am Gerät nicht in die Steckdose passt, modifizieren Sie ihn bitte nicht, sondern lassen Sie sich durch einen qualifizierten Elektriker einen ordnungsgemäßen Anschluss installieren. Dieses Gerät ist für die Verwendung innerhalb eines nominalen 220-V-Schaltkreises vorgesehen und verfügt über einen Erdungsstecker, der dem in der rechten Abbildung dargestellten entspricht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen Anschluss angeschlossen wird, der dieselben Konfigurationen wie der Stecker aufweist. Mit diesem Gerät sollte keinerlei Adapter verwendet werden.
 Elektrische Erdung	 <p>GEERDETE ANSCHLÜSSE ERDUNGSTIFT GEERDETER ANSCHLUSSKASTEN</p>
 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Die folgenden Personen dürfen diesen Massage-Sessel nicht verwenden: <ul style="list-style-type: none"> ○ Personen, denen vom Arzt von einer Massage-Therapie abgeraten wurde. Beispielsweise bei Thrombose, ernsthaftem Aneurysma, akuten Krampfadern oder Dermatitis und/oder Hautinfektionen einschließlich einer Entzündung der Hypodermis. ○ Personen mit Verdacht auf akute Genickverstauchung (Schleudertrauma).
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Personen, auf die einer der folgenden Punkte zutrifft, müssen vor der Verwendung des Sessels ärztlichen Rat einholen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ernsthafte Herzprobleme ○ Geistige Behinderung aufgrund einer ernsthaften Durchblutungsstörung wegen Diabetes oder einer anderen Erkrankung ○ Osteoporose, Rückgrat-Fraktur, akute Schmerzen und/oder darauf hinweisende Symptome ○ Personen, die Wunden an den Körperstellen haben, die durch die Verwendung des Sessels behandelt werden sollen ○ Hohes Fieber (38° oder höher) beispielsweise bei ernsthafter akuter Entzündungserkrankung oder -ermüdung, Kältegefühl, instabiler Blutdruck oder Asthenie ○ Personen im frühen Stadium einer Schwangerschaft oder direkt nach der Niederkunft ○ Personen mit elektronischen medizinischen Geräten, die leicht durch elektromagnetische Strahlungen beeinflusst werden könnten, wie beispielsweise ein Herzschrittmacher ○ Anormales oder deformiertes Rückgrat ○ Personen, die den Sessel zur Behandlung von Körperstellen verwenden möchten, die durch einen Arzt behandelt wurden oder werden ○ Personen mit bösartigen Tumoren ○ Personen, die auf Bettruhe angewiesen sind ○ Personen mit akuten gastrischen Beschwerden oder Beschwerden wie beispielsweise Gastritis, Darmentzündung oder Hepatitis ○ Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder ein unbestimmtes körperliches Unwohlsein verspüren ○ Bei deformierten oder ausgereinigten Gelenken aufgrund von Rheumatismus, Gicht oder anderen Erkrankungen ○ Bei Symptomen wie beispielsweise Übelkeit, Schwindelgefühl oder Tinnitus ○ Entzündungen aufgrund einer Verstauchung oder eines Muskelfaserrisses
 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie den Sessel mit keiner anderen Stromquelle außer mit 220-240 V. →Dies könnte zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. • Verwenden Sie das Gerät mit keinem Transformator. →Dies könnte zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen. • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Wandsteckdose beschädigt ist, oder wenn die Wandsteckdose lose ist. →Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss oder einem Brand führen. • Untersuchen Sie den Sessel vor jedem Betrieb auf Löcher oder Risse im Sesselbezug (heben Sie auch das Rückenpolster an, um die Rückenlehne zu untersuchen). Überprüfen Sie darüber hinaus auch die übrigen Teile auf Risse. Stoppen Sie die Verwendung des Sessels sofort, wenn Sie auch nur die geringste Beschädigung finden. Trennen Sie den Sessel bitte von der Stromversorgung ab und konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie diesen Sessel erworben haben. →Eine Verwendung des Sessels mit Löchern oder Rissen im Sesselbezug kann zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen.

Sicherheitshinweise: Vor der Verwendung



 Achtung	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie vor dem Einstecken des Netzkabels in die Wandsteckdose sicher, dass der Haupt-POWER-Schalter ausgeschaltet ist. →Dies könnte zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen. • Stellen Sie sicher, dass die Stecker am Netzkabel vollständig in den Anschluss und in die Wandsteckdose eingesteckt sind. →Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss oder einem Brand führen. • Schalten Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Sessels sämtliche Netzschalter in der in dieser Bedienungsanleitung angeführten Reihenfolge ein um sicherzustellen, dass der Sessel ordnungsgemäß funktioniert. • Stellen Sie die sich neigende Rückenlehne vor der Verwendung zuerst in die vollständig aufrechte Position. Neigen Sie die Rückenlehne nach dem Platznehmen in die für Sie angenehmste Position, und vergessen Sie nicht, mit einer leichteren Massage zu beginnen. →Das Beginnen mit einer stärkeren Massage kann zu Verletzungen führen. Insbesondere ältere Personen und Personen mit schwachen Knochen sollten bei der Auswahl der Massage-Intensität äußerst vorsichtig sein. • Setzen Sie sich beim Platznehmen auf dem Sessel langsam hin und stellen Sie sicher, dass sich sämtliche Rückenrollen in ihrer ordnungsgemäßen Position rechts und links vom Rücken befinden, damit das Rückgrat bequem zwischen den Rollen liegt und Sie Ihren Körper nicht mehr drehen oder bewegen müssen. • Setzen, stellen oder stützen Sie sich nicht auf die Fußstütze, bevor Sie nicht auf dem Sessel sitzen oder wieder aufstehen. →Falls der Sessel umkippt, könnte dies zu Personenschäden oder zu einer Beschädigung des Sessels führen. • Wenn Sie den Sessel über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung erneut durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie den Sessel ausschließlich auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Art und Weise. Verwenden Sie den Sessel nicht zusammen mit anderen therapeutischen Geräten oder mit Heizdecken. →Dies könnte zu Verletzungen führen oder negative Auswirkung auf Ihre Gesundheit haben. • Bewegen Sie den Sessel nicht, während jemand darauf sitzt. →Falls der Sessel umkippt, könnte dies zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen.
 Verboten	

Sicherheitshinweise: Während der Verwendung



 Warnung	<ul style="list-style-type: none"> • Wickeln Sie das Netzkabel oder das Fernbedienungskabel nicht um den Sessel und stellen Sie den Sessel auf keines der beiden Kabel. Kratzen und reißen Sie nicht am Netzkabel oder am Fernbedienungskabel, behandeln, verdrehen, dehnen und verbiegen Sie es nicht übermäßig. →Das Kabel könnte ausfransen oder reißen, was zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen könnte. • Verschütten Sie kein Wasser über dem Sessel oder der Fernbedienung. →Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Kurzschluss oder einem Brand führen. • Kinder, Personen, die sich nicht verständigen können und Personen, die unter körperlichen Beschwerden leiden, sollten den Sessel nicht verwenden dürfen. Wir empfehlen Ihnen, Kindern oder Haustieren nicht zu gestatten, in der Nähe des Sessels (insbesondere hinter der sich neigenden Rückenlehne oder unter dem Sitz oder der Fußstütze) zu spielen, auf den Sessel zu klettern oder darauf zu sitzen. →Dies könnte zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen. • Verwenden Sie den Sessel auf keinen Fall, wenn der Bezug beschädigt ist. Trennen Sie das Netzkabel in einem solchen Fall von der Wandsteckdose ab. →Dies könnte zu Verletzungen, einem Unfall oder einem elektrischen Schlag führen. Konsultieren Sie hinsichtlich einer Reparatur den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben. • Stecken Sie auf keinen Fall Ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände zwischen die Bestandteile der Fußstütze, die Fußstütze und den Sessel oder zwischen die Armlehnen und den Sessel. Lassen Sie die Fußstütze auf keinen Fall plötzlich los, während Sie sie mit der Hand anheben. • Setzen Sie sich nicht bei angehobener Fußstütze auf den Sessel und stehen Sie nicht bei angehobener Fußstütze auf.
 Verboten	
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie den Sessel nicht, während Ihr Körper feucht ist oder wenn Ihre Hände nass sind. →Dies könnte zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen. • Stellen Sie sicher, dass sich niemand (insbesondere keine Kinder), kein Haustier und kein Gegenstand in der Nähe dieses Sessels befindet, bevor Sie die Rückenlehne nach hinten neigen oder die Fußstütze absenken. Achten Sie darauf, dass Sie beim Neigen der Rückenlehne keinen Körperteil oder einen Gegenstand hinter dem Sessel einklemmen. • Achten Sie darauf dass Sie bei Aktivierung der Fußstützen-Verschiebungsfunktion keine Hände, Füße oder einen Gegenstand zwischen den Bestandteilen der Fußstütze einklemmen. →Dies könnte zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen.
 Achtung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie den Sessel nur, wenn Sie bekleidet sind. • Verwenden Sie den Sessel ausschließlich zu Massage-Zwecken; verwenden Sie ihn zu keinem nicht dafür vorgesehenen Zweck. →Dies könnte zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen. • Verwenden Sie den Sessel nicht, um sich Kopf, Brust, Bauch und/oder Gelenke (Knie, Ellbogen) massieren zu lassen. Stecken Sie weder Ihre Hände, noch Ihre Füße oder Arme zwischen die Rollen. →Dies könnte zu Übelkeit oder einem Unfall führen. Legen Sie ein weiches Handtuch in Ihren Nacken, um eine intensive Stimulation dieses Bereiches zu verhindern. • Stecken Sie weder Hände noch Füße zwischen die Rollschienen oder in den Raum zwischen Rückenlehne und Sitz oder zwischen sich bewegende Teile. Setzen Sie sich nicht auf den Sessel, wenn Sie harte Gegenstände wie beispielsweise Haarklammern am Körper tragen. →Dies könnte zu Personenschäden führen. • Legen Sie bitte ausschließlich Ihre Beine und Füße auf die Fußstütze. →Dies könnte zu Personenschäden führen. • Betreiben Sie den Massage-Sessel nicht und lassen Sie ihn nicht während des Betriebs unbeaufsichtigt, wenn niemand darauf sitzt. →Dies könnte zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen.
 Verboten	

SICHERHEITSHINWEISE




Sicherheitshinweise: Während der Verwendung

⚠ Achtung	
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> ● Drücken Sie in einem Notfall oder bei einer plötzlichen Fehlfunktion die STOP-Taste auf der Fernbedienung, damit der Sessel seinen Betrieb sofort stoppt. ● Falls Sie während der Verwendung des Sessels einen deutlichen Schmerz oder ein ungewöhnliches körperliches Unwohlsein verspüren, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf und unterbrechen Sie die Verwendung des Sessels. ● Falls Sie das Gefühl haben, dass die Massage-Maßnahmen zu intensiv sind, reduzieren Sie die Stimulation bitte entsprechend der Bedienungsanleitung. → Anderenfalls kann die Verwendung mit großer Stimulation unter solchen Umständen zu Verletzungen führen. ● Stellen Sie sicher, dass das Rückenpolster während der Massage an Ort und Stelle verbleibt. Verwenden Sie den Sessel niemals ohne Rückenpolster. → Dies könnte zu Personenschäden führen. ● Schlafen Sie während der Massage nicht auf dem Sessel ein. → Dies könnte zu Personenschäden führen. ● Beschränken Sie die einzelnen Massage-Sitzungen auf jeweils 15 Minuten. Eine auf einen bestimmten Bereich reduzierte Massage eines bestimmten Körperbereiches sollte auf 5 Minuten beschränkt bleiben. → Eine fortwährende Verwendung über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einer Überstimulation führen, was wiederum das Gegenteil des gewünschten Effektes oder gar Verletzungen verursachen kann. Verwenden Sie als Richtlinie einen Zeitraum von 30 Minuten täglich und lassen Sie einen gewissen Zeitabstand zwischen den einzelnen Massage-Sitzungen. ● Falls Ihre Beine oder Füße während der Massage aus der Fußstütze herausrutschen, versuchen Sie bitte nicht, sie mit Gewalt wieder hineinzuschieben.
 Abtrennen	<ul style="list-style-type: none"> ● Falls es zu einem Stromausfall kommt oder falls ein Stromausfall wahrscheinlich ist, stoppen Sie bitte den Betrieb des Sessels sofort und schalten Sie den POWER-Schalter aus. Trennen Sie den Sessel in einem solchen Fall von der Wandsteckdose ab. → Falls sich der Sessel bei der Wiederaufnahme der Stromversorgung noch immer im Betriebsmodus befindet, kann dies zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen. ● Falls sich ein Gewitter ankündigt, stoppen Sie bitte den Betrieb des Sessels sofort und schalten Sie den POWER-Schalter aus. Trennen Sie den Sessel in einem solchen Fall von der Wandsteckdose ab. ● Falls sich der Sessel nicht starten lässt oder falls es zu irgendeiner Fehlfunktion gekommen sein sollte, ist es das Beste, den Betrieb des Sessels sofort zu stoppen und den POWER-Schalter auszuschalten. Trennen Sie den Sessel in einem solchen Fall von der Wandsteckdose ab. Trennen Sie den Sessel bitte von der Stromversorgung ab und konsultieren Sie hinsichtlich einer Reparatur oder Wartung den Händler, bei dem Sie diesen Sessel erworben haben. → Falls der Sessel unter solchen Umständen an die Stromversorgung angeschlossen bleibt, kann dies aufgrund eines Kurzschlusses zu einem elektrischen Schlag oder einen Brand führen.

Nach der Verwendung oder wenn der Sessel nicht verwendet wird

⚠ Achtung	
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> ● Stellen Sie sicher, dass Sie den POWER-Schalter nach jeder Verwendung ausschalten und den Sessel von der Wandsteckdose abtrennen. → Falls Kinder oder Haustiere versuchen, mit dem Sessel zu spielen, kann dies anderenfalls zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen. ● Stellen Sie nach der Verwendung des Sessels sicher, dass Sie die sich neigende Rückenlehne in die aufrechte Position zurückstellen und die Fußstütze vollständig absenken. ● Wischen Sie den Sessel nach jeder Verwendung ab und bewahren Sie ihn an einem Ort ohne hohe Luftfeuchtigkeit auf. ● Legen Sie keinerlei Gegenstände auf den Sessel, die sich neigende Rückenlehne, die Armlehnen, die Fußstütze, die Neben-Fernbedienung und/oder den Joystick.
 Abtrennen	<ul style="list-style-type: none"> ● Ziehen Sie zum Abtrennen des Sessels von der Wandsteckdose nicht am Netzkabel; stellen Sie sicher, dass Sie beim Abtrennen immer den Stecker umfassen. → Anderenfalls könnte dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Kurzschluss führen, der wiederum einen Brand verursachen könnte. ● Stellen Sie bei der Reinigung oder Pflege des Sessels sicher, dass Sie zuerst den Sessel von der Wandsteckdose abtrennen. Berühren Sie das Netzkabel auf keinen Fall mit feuchten Händen. ● Wenn Sie den Sessel über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihn von der Wandsteckdose abtrennen. → Staub und Luftfeuchtigkeit können zu einer Beeinträchtigung der elektrischen Isolation führen, was einen möglichen elektrischen Schlag, einen Kurzschluss oder einen Brand zur Folge haben kann.

Weitere Sicherheitshinweise

⚠ Warnung	
 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> ● Stellen Sie sich nicht auf den Sessel. Setzen Sie sich auf keinen anderen Bereich des Sessels außer auf den Sitz. → Falls der Sessel umkippt, könnte dies zu Personenschäden oder zu einer Beschädigung des Sessels führen. ● Setzen Sie sich nicht bei angehobener Fußstütze auf den Sessel und stehen Sie nicht bei angehobener Fußstütze auf. ● Stellen Sie sich nicht auf den Steuerkasten und/oder legen Sie keinerlei Gegenstände darauf ab.
 Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bauen Sie den Sessel nicht um. Der Sessel darf außer von autorisiertem Servicepersonal von keiner anderen Person repariert oder auseinandergebaut werden. → Anderenfalls könnte dies zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen. Konsultieren Sie hinsichtlich einer Reparatur den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.
⚠ Achtung	
 Erforderliche Maßnahme	<ul style="list-style-type: none"> ● Wenn Sie den Sessel an Dritte ausleihen, verkaufen oder übertragen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Sessel weitergeben.

[SICHERHEITSHINWEISE]

HAUPTFUNKTIONEN

Hauptfunktionen

Kombination von Rollen, Luftdruck und Vibration Hybrid-Massage-Funktion

Mit diesem Sessel haben wir mit der gesamten uns zur Verfügung stehenden Technologie eine Möglichkeit zur idealen Entspannung für Sie geschaffen.

Für den Rücken, das Gesäß und die Waden steht Ihnen eine reiche Vielfalt verschiedenster Massage-Techniken und einzigartiger Programme zur Verfügung, die Ihnen beinahe das Gefühl einer menschlichen Berührung vermitteln. Die Fußeinheit zur Massage der Fußsohlen bewegt sich zusammen mit der sich neigenden Rückenlehne, damit die Fußmassage in jedem beliebigen Winkel fortgesetzt werden kann.

Mit Komplett-Feineinstellung Joystick-Funktion

Die Massage-Maßnahme, -Intensität sowie die Rollposition kann durch eine einfache Verwendung des Joysticks ausgewählt werden.

Optische Sensoren für die automatische Shiatsu-Punkt-Lokalisierungsfunktion

Diese Funktion lokalisiert automatisch die Shiatsu-Punkte, die von Person zu Person variieren. Dadurch wird eine wirkungsvolle Massage ermöglicht, die ganz auf Ihren Körpertyp und/oder den jeweiligen Massage-Zweck abgestimmt ist.

Einfach verständliche Massage-Anleitung Fernbedienungs-Anzeigefeld

Die Fernbedienung ist mit einer klar, einfach abzulesenden Anzeige ausgestattet, die Ihnen eine Überwachung Ihrer Massage ermöglicht. Die Anzeige führt Sie durch die einzelnen Schritte Ihrer Massage und zeigt Ihnen Informationen über die einzelnen Massage-Maßnahmen an.

Vorzüge

Als therapeutisches Massagegerät bietet Ihnen der ROBOSTIC die folgenden Vorzüge:

- Entspannung der Muskeln
- Linderung mittlerer Muskelverspannung und -schmerzen

Einfach auf die bequemste Position einstellbar Automatische Neigungsfunktion

Die Rückenlehne des Sessels kann auf einen beliebigen Winkel zwischen etwa 120° und 170° eingestellt werden. Die Fußstütze kann auf einen Winkel von etwa 90° angehoben werden. Beide Komponenten lassen sich einfach einstellen, damit Sie schnell die für Sie bequemste Position erreichen.

Vibrationsmassage-Funktion

Der Vibrationsmechanismus befindet sich im Sitz, in der Fußstütze (Fußeinheit) und in der Rückenlehne des Sessels. Die sanften Vibrationen gewährleisten eine entspannende Massage.

Ultimative Technologie Verschiedene Programmfunktionen

10 Gesundheitspflege-Programme (automatisch) sowie manuelle Auswahlmodi, in denen Sie die Programme Ihrer Wahl miteinander kombinieren können, dienen einzig Ihrer persönlichen Entspannung.

Standard-Fernbedienungshalterung

Standardmäßig ist eine Fernbedienungshalterung verfügbar, die der Unterbringung der Fernbedienung dient.





Fußmassage-Einheit zur alleinigen Massage Ihrer Fußsohlen Fußstützen-Verschiebungssensoren

Die Fußstütze wird aktiviert, sobald Sie sich für ein Neigen der Rückenlehne entscheiden. Nach dem Neigungsbetrieb wird die Länge der Fußstütze automatisch eingestellt, um Ihnen eine auf Ihren Körper abgestimmte Waden- und Fußmassage zu lie-

[HAUPTFUNKTIONEN]

KOMPONENTEN UND IHRE BESCHREIBUNG

Sessel

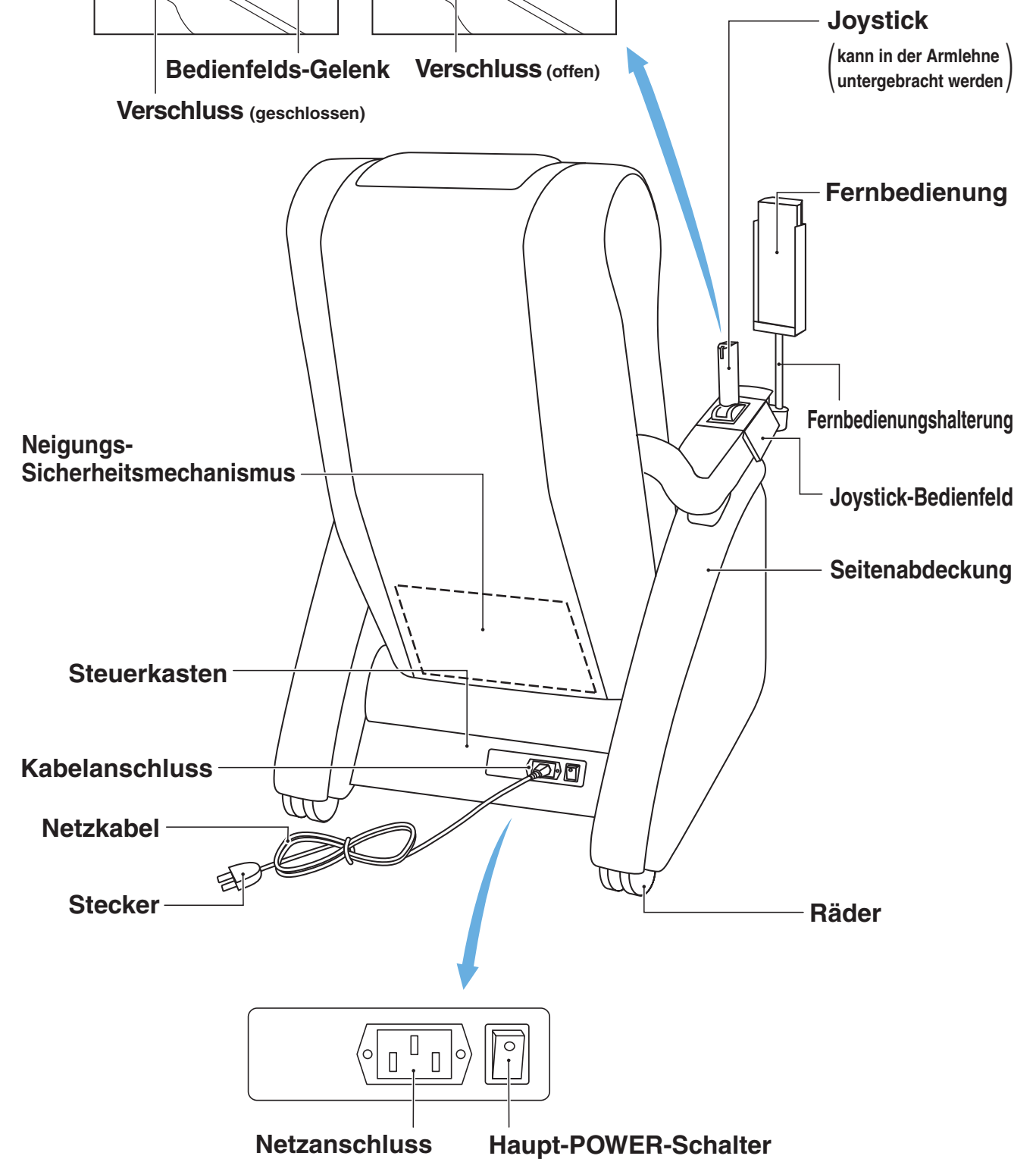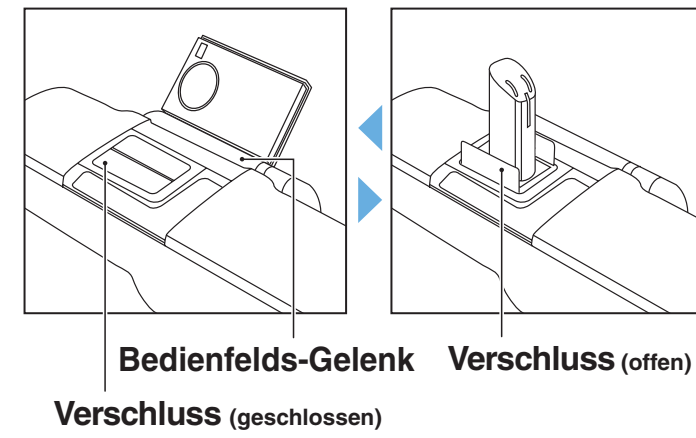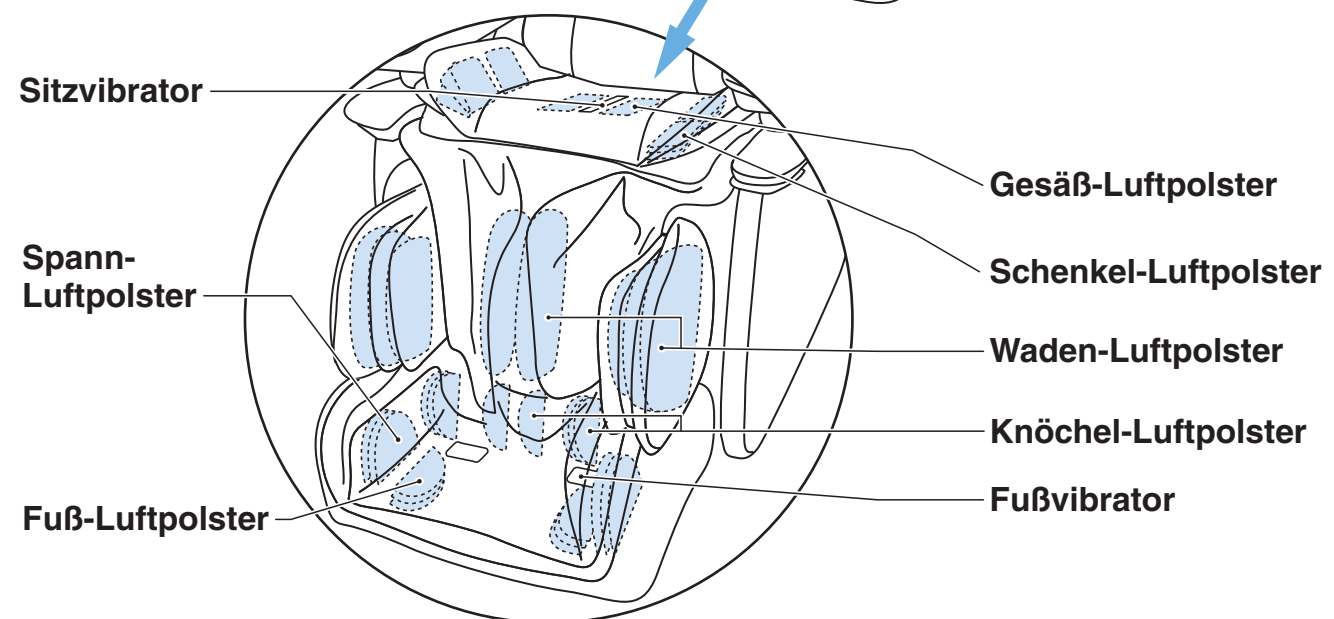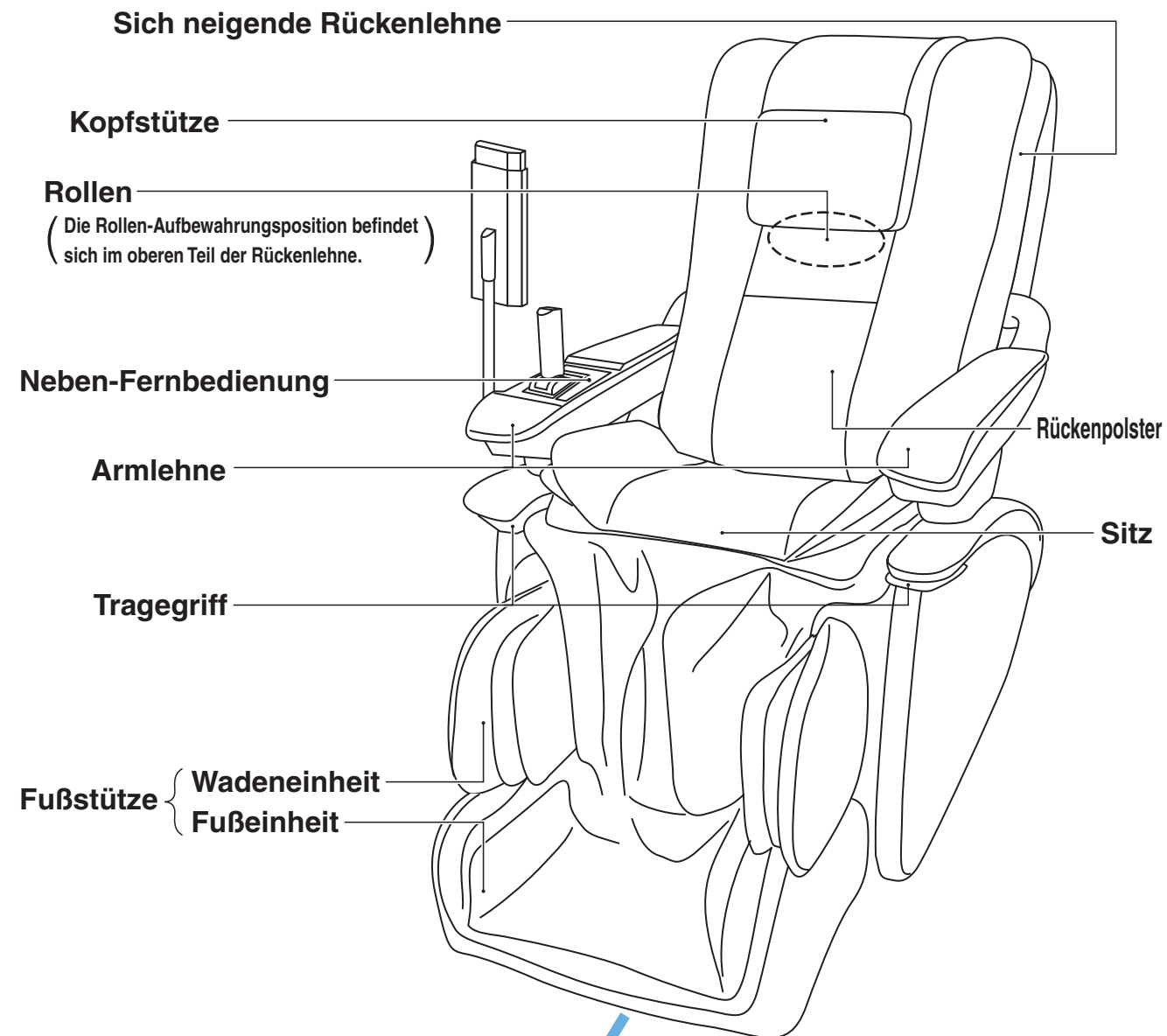


[KOMPONENTEN UND IHRE BESCHREIBUNG]

[KOMPONENTEN UND IHRE BESCHREIBUNG]

KOMPONENTEN UND IHRE BESCHREIBUNG

Fernbedienung

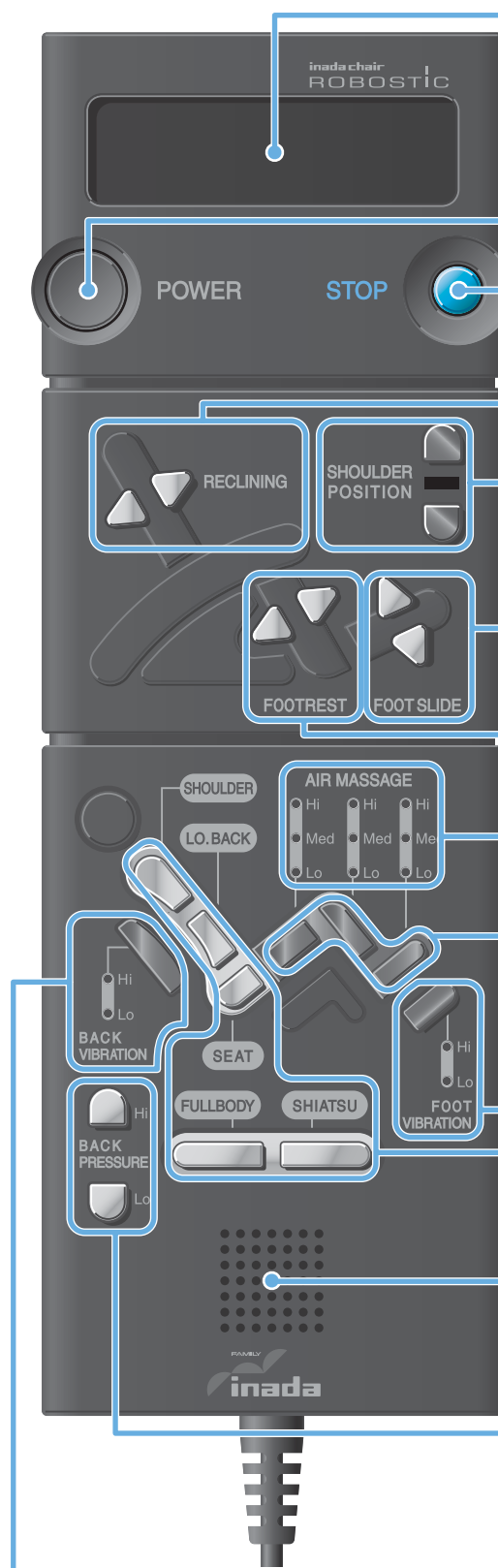

- Fernbedienungsanzeige**
Hierdurch werden Informationen wie beispielsweise eine Beschreibung der jeweiligen Massage-Maßnahme sowie die Intensität der einzelnen Massage-Arten angezeigt (siehe rechts).
- POWER-Taste**
Hiermit wird die Fernbedienung ein- und ausgeschaltet. Durch das Drücken der POWER-Taste bei aktiviertem Sessel werden die Rollen in ihre Aufbewahrungsposition zurückgefahren, bevor sich der Sessel ausschaltet.
- STOP-Taste**
Verwenden Sie diese Taste, um den Sessel in einem Notfall oder beim Auftreten irgendeiner Fehlfunktion während des Betriebs sofort auszuschalten. Die Rollen werden in einem solchen Fall nicht in ihre Aufbewahrungsposition zurückgefahren.
- Neigungstasten**
Verwenden Sie die Tasten [▲] und [▼], um den Neigungswinkel der Rückenlehne einzustellen (siehe Seite 12).
- Schulterpositions-Einstelltasten/-lampen**
Hierdurch wird die Schulterposition eingestellt, während die Schulterpositionslampe aufleuchtet (siehe Seite 21 oder 25).
- Fußstützen-Längentasten**
Verwenden Sie die Tasten [▶] und [◀], um den Länge der Fußstützen-Verschiebungsfunktion einzustellen (siehe Seite 13).
- Fußstützen-Tasten**
Verwenden Sie die Tasten [▲] und [▼], um den Fußstützen-Winkel einzustellen (siehe Seite 13).
- Luftdruck-Massage-Lampe**
Hierdurch wird der Status der einzelnen Luftdruck-Massage-Maßnahmen angezeigt.
- Luftdruck-Massage-Tasten**
Hierdurch wird die Luftdruck-Massage-Intensität für die Gesundheitspflege-Programme und den manuellen Auswahlmodus eingestellt.
- Fußvibrations-Lampe**
Hierdurch wird der Status der Fuß-Vibration-Maßnahme angezeigt (siehe rechts).
- Fußvibrations-Taste**
Hierdurch wird die Fußvibration und deren Intensität für die Gesundheitspflege-Programme und den manuellen Auswahlmodus eingestellt.
- Gesundheitspflege-Programmtasten**
Hierdurch wird das Programm durch die jeweilige Maßnahmenbezeichnung ausgewählt (siehe Seite 17).
- Lautsprecher**
- Rückendruck-Tasten**
Hierdurch wird die Tiefe der Massage durch Ein- und Ausfahren der Rollen gesteuert. Diese Funktion ist nur in einem der Gesundheitspflege-Programme verfügbar (siehe Seite 26).
- Rückenvibrations-Lampe**
Hierdurch wird der Status der Rückenvibrations-Maßnahme angezeigt.
- Rückenvibrations-Taste**
Hierdurch wird die Rückenvibration und deren Intensität für die Gesundheitspflege-Programme und den manuellen Auswahlmodus eingestellt.

Fernbedienungs-Anzeigefeld/-lampe

Fernbedienungsanzeige

Hierdurch werden Informationen über die Massage-Maßnahme, die verbleibende Zeit, die Geschwindigkeit sowie die Einstellung der Intensität mit Hilfe von Texten und Symbolen angezeigt. Die Zeichen und Abbildungen auf der Anzeige bewegen sich von rechts nach links.
Beispiel: Während der Aktivierung der Lokalisierungssensoren für die Shiatsu-Punkte wird auf der Anzeige der folgende Text eingeblendet: "Locating Shiatsu Points..."



Luftdruck-Massage-Lampe

Hierdurch wird der Status der Luftdruck-Massage für das Gesäß, die Waden und die Füße in 4 Einstellungen folgendermaßen angezeigt: Ausgeschaltet, Niedrig, Mittel und Hoch.

Ausgeschaltet	Niedrig	Mitte	Hoch
<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi
<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med
<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo


Vibrationslampe

Hierdurch wird der Status der Rücken-/Fußvibration in 3 Einstellungen folgendermaßen angezeigt: Ausgeschaltet, Niedrig und Hoch.


Ausgeschaltet	Niedrig	Hoch
<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi
<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo

Schulterpositions-Einstelllampe

Diese Lampe leuchtet, wenn die Schulterpositions-Einstelltasten verwendet werden können.

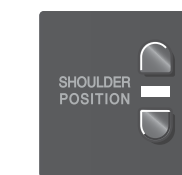

Neben-Fernbedienung/Joystick (manueller Auswahlmodus)/rechte Armlehne

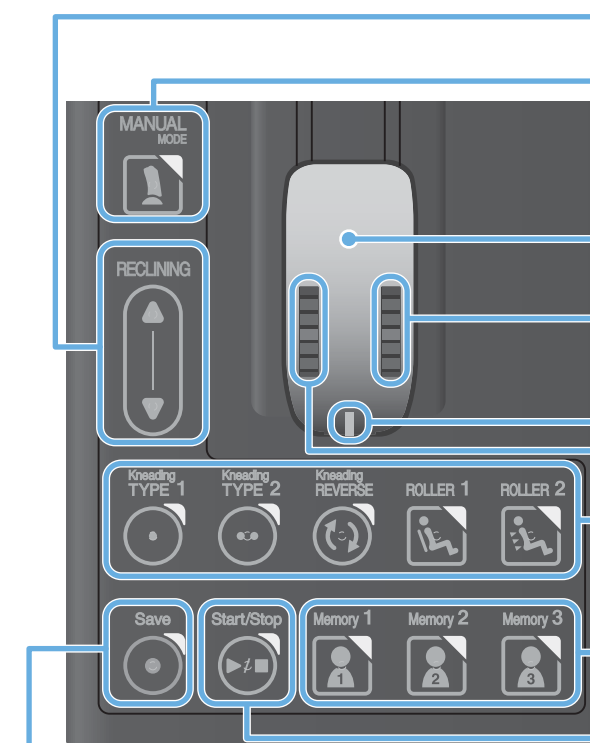

Speichertaste
Hierdurch wird die Massage-Maßnahme mit dem Joystick und/oder im manuellen Auswahlmodus gespeichert (siehe Seite 22).

Neigungstaste
(siehe Seite 12)

Manuelle Auswahlmodus-Taste
Hierdurch wird der manuelle Auswahlmodus Ihrer Wahl gestartet. Die Rollen kehren in ihre Aufbewahrungsposition zurück und stoppen, wenn die Taste während des Betriebs gedrückt wird (siehe Seite 20).

Joystick
Hierdurch wird die Rollenposition durch Vor- und Zurück- oder Auf- und Abfahren eingestellt (siehe Seite 19).

Klopf Auswahl (siehe Seite 20)

Joystick-Auswahl (siehe Seite 20)

Knetauswahl (siehe Seite 20)

Manuelle Auswahlmodus-Tasten
Hierdurch wird zwischen der Knetart 1, der Knetart 2, der Knetumkehr, der Rolle 1 und der Rolle 2 ausgewählt (siehe Seite 20).

Speichertasten
Hierdurch wird der gespeicherte Betrieb aufgerufen (siehe die Seiten 22 und 23).

Start-/Stopp-Taste
Hierdurch wird der gespeicherte Betrieb gestartet/gestoppt (siehe die Seiten 22 und 23).

⚠ Warnung

- Verschütten Sie kein Wasser und/oder andere Flüssigkeiten über der Fernbedienung, der Neben-Fernbedienung und/oder dem Joystick.
- Handhaben Sie die Fernbedienung nicht mit feuchten Händen.
- Setzen Sie sich nicht auf die Fernbedienung, die Neben-Fernbedienung und/oder den Joystick. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht darauf. Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Fernbedienungskabel.
- Verwenden Sie keinerlei spitze Gegenstände, um auf die Tasten oder die Anzeige der Fernbedienung zu drücken.
→ Dies könnte zu einer Beschädigung der Fernbedienung führen.

VOR DER VERWENDUNG


- **Dieses Gerät wird mit vollständig geneigter Rückenlehne ausgeliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie die sich neigende Rückenlehne vor der Verwendung zuerst in die vollständig aufrechte Position stellen.**
→ Beim Einschalten des POWER-Schalters ohne angebrachte Fußstütze wird die Meldung "Restart the main POWER switch." auf der Fernbedienung angezeigt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Fernbedienungsschalter nicht funktioniert.
- **Setzen Sie den Sessel keinen hohen Temperaturschwankungen und insbesondere keiner Hitze aus. Falls der Raum, in dem der Sessel verwendet werden soll, kalt ist, schalten Sie die Heizung bitte langsam höher. Falls der Sessel von einem kalten Raum in einen beheizten transportiert wird, warten Sie bitte eine Stunde, bevor Sie den Sessel verwenden.**
→ Anderenfalls kann es zu einem Kondensieren innerhalb der sich bewegenden Komponenten des Sessels kommen, was eine Beeinträchtigung der Leistung zur Folge haben könnte.

Installation

Lassen Sie bei der Installation mindestens 50 cm Freiraum hinter und 40 cm Freiraum vor dem Sessel, damit die Rückenlehne des Sessel ohne Behinderung geneigt werden kann.


⚠ Achtung

- Verwenden Sie den Sessel nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise in einem Badezimmer oder in einer Sauna.
- Installieren Sie den Sessel nur auf einem flachen, ebenen Boden.
- Verwenden Sie den Sessel nicht an Orten mit unreiner Luft oder Staub. Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C liegt.
- Installieren Sie den Sessel an keinem Ort, an dem er in direkten Kontakt mit Hitze kommen könnte, wie beispielsweise in der direkten Sonne oder neben einer Heizung.
- Installieren Sie den Sessel zur Vermeidung einer Beschädigung der Bodenoberfläche und zur Reduzierung der Geräusentwicklung auf einem Fußboden mit Teppichbelag, oder legen Sie ein Stück Teppich unter den Sessel (verwenden Sie keine Heizdecke).
- Dieser Sessel ist sehr schwer, achten Sie also bitte darauf, wenn Sie den Sessel abstellen, dass die Oberfläche des Bodens nicht beschädigt wird.
- Installieren Sie den Sessel mindestens 1 m von Fernsehgeräten, Radios und/oder anderen Audio- und Videogeräten entfernt. Die durch solche Geräte erzeugten Interferenzen könnten Probleme verursachen.
- Wenn eine Person auf dem Sessel Platz nimmt, die 100 kg oder mehr wiegt, wird der Boden mit etwa 4,3 kg auf 1 cm² belastet.

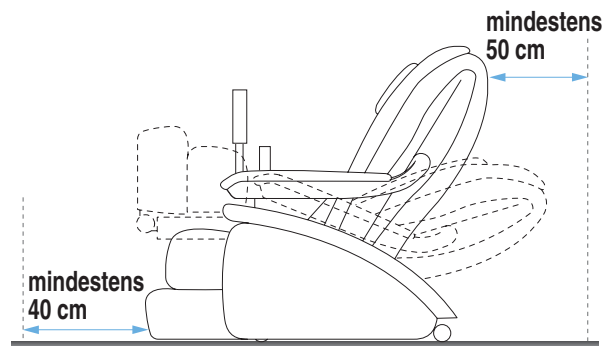

Installation der Fernbedienungshalterung

Bringen Sie A unter Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an B außen an der rechten Armlehne an. Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Schrauben fest anziehen. Führen Sie das Fernbedienungskabel durch die Kabelführung der Fernbedienungshalterung, um die Fernbedienung an der Halterung anzubringen.

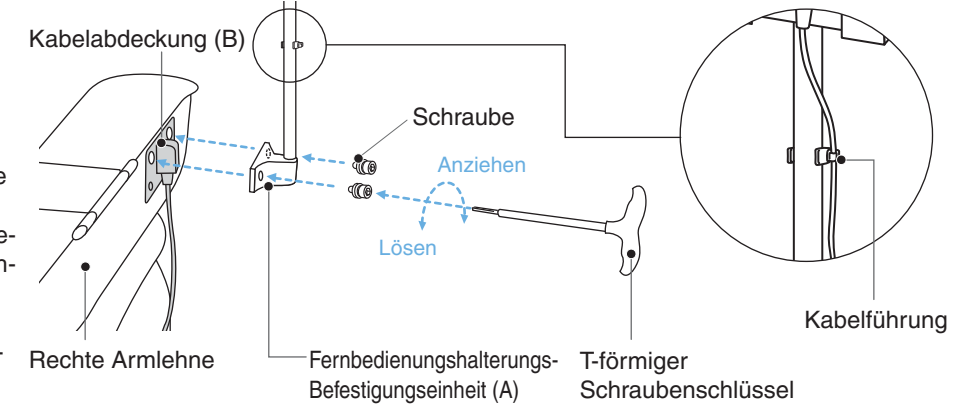


[VOR DER VERWENDUNG]


[VOR DER VERWENDUNG]

Hauptstrom-Anschluss

(1) Stecken Sie das Netzkabel zuerst vollständig in den Anschluss auf der Rückseite des Sessels ein. Stecken Sie anschließend das andere Ende in die Wandsteckdose ein.

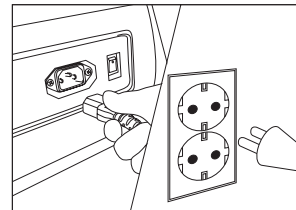

(2) Schalten Sie den Haupt-POWER-Schalter auf der Rückseite des Sessels ein. Nun wird eine Textmeldung auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

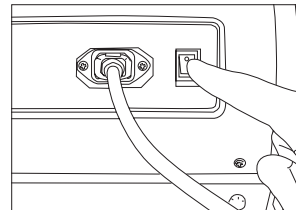

*Falls die Rollen während der Massage-Maßnahme stoppen, führt das Einschalten des Haupt-POWER-Schalters zu einer Rückstellung der Rollen in ihre Startposition (oberer Bereich der Rückenlehne). Anschließend schaltet sich der Sessel automatisch aus.

⚠ Warnung

- **Verwenden Sie das Gerät mit keinem Transformator.**
→ Dies könnte zu Verletzungen oder einem elektrischen Schlag führen.


⚠ Achtung

- Stellen Sie vor dem Einstecken des Netzkabels in die Wandsteckdose sicher, dass der Haupt-POWER-Schalter ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker am Netzkabel vollständig in den Anschluss und in die Wandsteckdose eingesteckt sind.
- Schalten Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Sessels sämtliche Netzschalter in der in dieser Bedienungsanleitung angeführten Reihenfolge ein um sicherzustellen, dass der Sessel ordnungsgemäß funktioniert.

VOR DER VERWENDUNG

Überprüfung des Sesselbezugs

Überprüfen Sie den Sessel auf Risse, indem Sie den Reißverschluss am oberen Bereich der sich neigenden Rückenlehne öffnen und das Rückenpolster wie in der Abbildung dargestellt absenken.

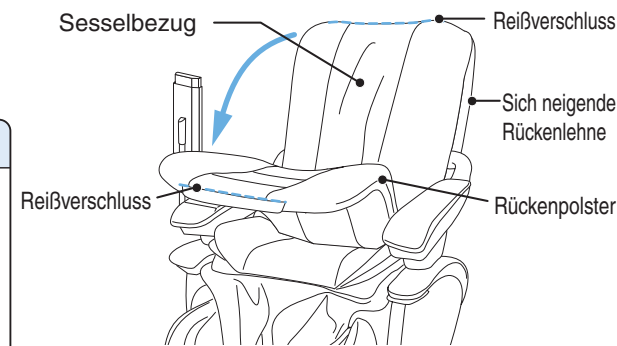


⚠️ Warnung

- Überprüfen Sie den Sessel auf Risse, indem Sie das Rückenpolster vor der Verwendung absenken. Überprüfen Sie bitte auch die übrigen Komponenten. Stoppen Sie die Verwendung des Sessels sofort, wenn Sie auch nur die geringste Beschädigung finden. Trennen Sie den Sessel bitte von der Stromversorgung ab und konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie diesen Sessel erworben haben.

Wissenswertes über den Transport des Sessels

Der Sessel ist mit Rollen ausgestattet, um einen Transport zu erleichtern. Heben Sie bitte zuerst die sich neigende Rückenlehne auf und schalten Sie den Haupt-POWER-Schalter aus. Trennen Sie anschließend das Netzkabel von der Wandsteckdose ab und heben Sie den Sessel zusammen mit einer anderen Person wie in den Abbildungen (2) und (3) dargestellt an, indem Sie ihn an den Tragegriffen wie in Abbildung (1) dargestellt festhalten. Rollen Sie den Sessel mit angehobenem Vorderteil in die gewünschte Richtung.


(1) Tragegriff

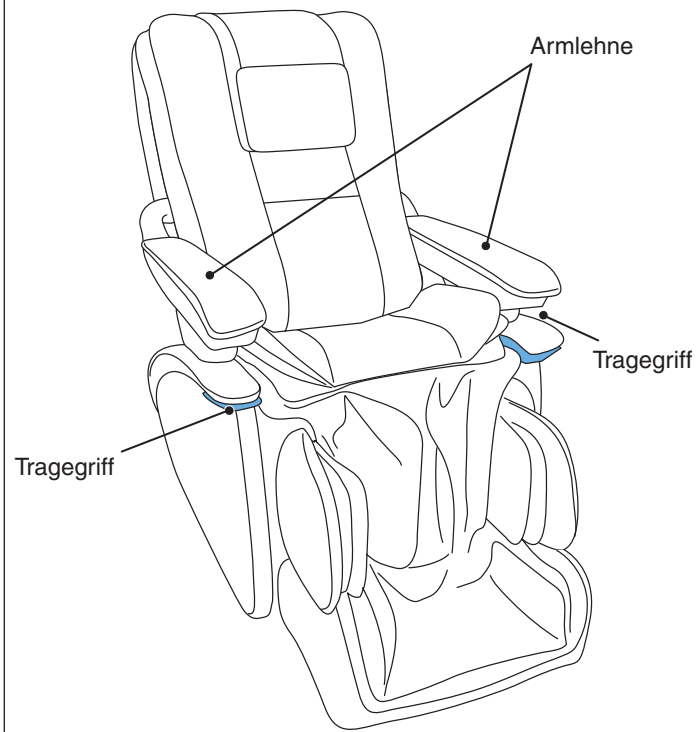


⚠️ Achtung

- Halten Sie den Sessel beim Transport am Tragegriff und nicht an den Armlehnen fest.
- Bewegen Sie den Sessel nicht, während jemand darauf sitzt.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Rollen des Sessels niemand die Füße einklemmt.

(2)

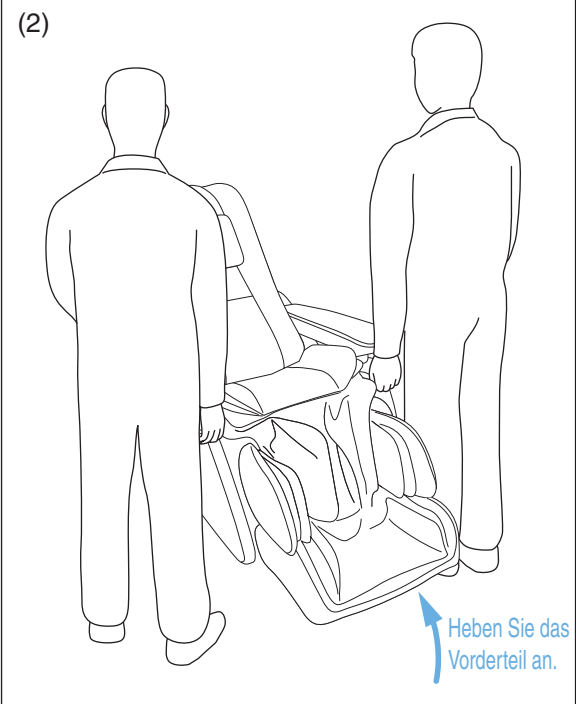

(3)

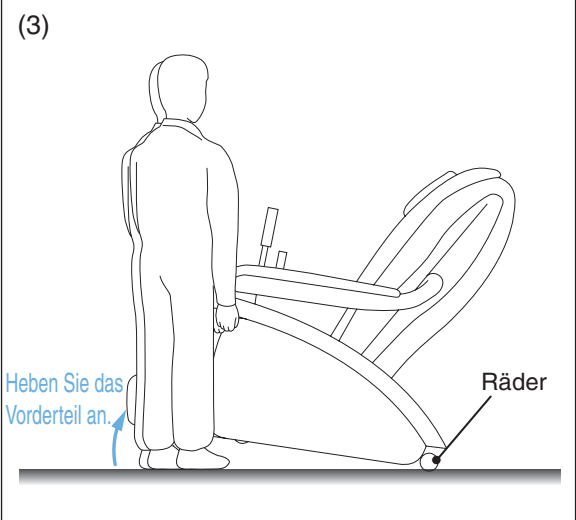

POSITIONSEINSTELLUNG

Wissenswertes über das richtige Sitzen




Stellen Sie bitte sicher, dass sich die Fußstütze ganz unten befindet. Wenn der Sessel ausgeschaltet ist, sind die Rollen rechts und links in den oberen Bereich der Rückenlehne zurückgezogen (Aufbewahrungsposition). Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen bitte zuerst die Position der Rollen. Wenn sich die Rollen in einer anderen als der Aufbewahrungsposition befinden, schalten Sie bitte den POWER-Schalter aus, bevor Sie sich auf den Sessel setzen, damit die Rollen in ihre Aufbewahrungsposition zurückkehren. Wenn Sie die Überprüfung abgeschlossen haben, setzen Sie sich bitte langsam auf die Mitte des Sessels, wie in der unten aufgeführten Anleitung beschrieben.

2 Drücken Sie Ihren Kopf gegen die Kopfstütze.

Hinsichtlich einer Anleitung zur Einstellung der Kopfstütze lesen Sie bitte Seite 14.

1 Drücken Sie Ihre Hüfte gegen die sich neigende Rückenlehne.

3 Drücken Sie Ihre Knöchel gegen das Knöchel-Luftkissen.

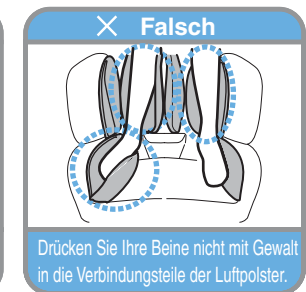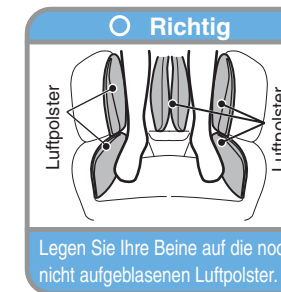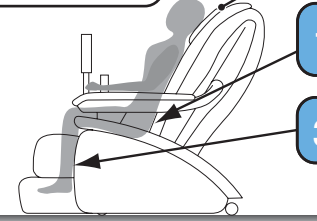


⚠️ Achtung

- Stellen Sie die sich neigende Rückenlehne vor der Verwendung zuerst in die vollständig aufrechte Position. Neigen Sie die Rückenlehne nach dem Platznehmen in die für Sie angenehmste Position, und vergessen Sie nicht, mit einer leichteren Massage zu beginnen.
- Setzen Sie sich nicht bei angehobener Fußstütze auf den Sessel. Ein plötzliches schweres Gewicht auf der Fußstütze könnte den Mechanismus beschädigen.

Wissenswertes über die Verwendung der sich neigenden Rückenlehne

■ Anheben der sich neigenden Rückenlehne:

Halten Sie die Neigungstaste [▽] auf der Fernbedienung oder die Aufwärts-Neigungstaste auf der Neben-Fernbedienung gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.

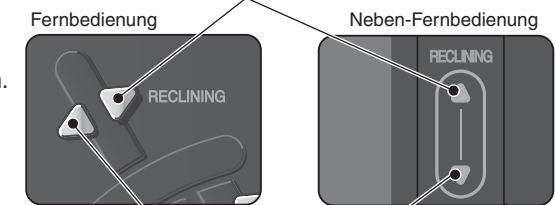

Verwendung der Sicherheitsfunktion

Wenn ein Gegenstand in dieser Öffnung eingeklemmt wird: (*1)

Die sich neigende Rückenlehne wird automatisch abgesenkt.



■ Absenken der sich neigenden Rückenlehne:

Halten Sie die Neigungstaste [▲] auf der Fernbedienung oder die Abwärts-Neigungstaste auf der Neben-Fernbedienung gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.


Verwendung der Sicherheitsfunktion

Wenn ein Gegenstand in dieser Öffnung eingeklemmt wird: (*1)

Die sich neigende Rückenlehne wird automatisch angehoben.



Beabsichtigtes Spiel für sanfte Bewegungen der Armlehnen-Einheit

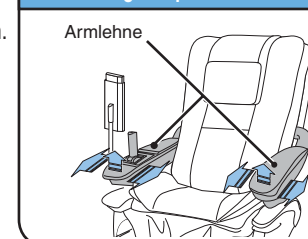

Die horizontalen und vertikalen Bewegungen sind für den Betrieb der Neigungsschutzfunktion vorgesehen.

- Sie können die Neigungstaste auf der Neben-Fernbedienung verwenden, wenn sich das Joystick-Bedienfeld öffnet.
- Bei Verwendung der Neigungsfunktion wird auch die Fußstütze aktiviert. Wenn die Neigungsbewegung des Sessels gestoppt wird, stoppt auch die Bewegung der Fußstütze. Anschließend verlängert oder verkürzt sich die Fußstützen-Verschiebungsfunktion automatisch, um die Fußstütze der Länge Ihrer Beine anzupassen.
- Die automatische Fußstützen-Verschiebungsfunktion steht zur Verfügung, wenn Sie die Neigungstaste loslassen.
- Nach dem Stoppen der Fußstützen-Verschiebung können Sie die Fußstützen-Position unter Verwendung der Fußstützen-Verschiebungstasten weiter einstellen.
- Wenn der POWER-Schalter des Sessels eingeschaltet ist, können Sie die Neigungsposition einstellen.


⚠️ Warnung

- Stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Personen und insbesondere keine Kinder oder Haustiere im Weg befinden, wenn die sich neigende Rückenlehne des Sessels abgesenkt wird. Achten Sie darauf, dass Sie keine Personen und/oder Gegenstände hinter der Rückenlehne einklemmen.
- Stecken Sie während des Absenkens der Rückenlehne keinerlei Körperteile oder Gegenstände zwischen die Armlehnen und den Sessel.
- Bei aktivierter Öffnungsschutzfunktion (*1) sind die Neigungstasten (nach oben, nach unten) auf der Fernbedienung und Neben-Fernbedienung deaktiviert.
- Bei aktivierter Öffnungsschutzfunktion (*2) sind die Neigungstasten (nach unten) auf der Fernbedienung und Neben-Fernbedienung deaktiviert.

POSITIONSEINSTELLUNG



Wissenswertes über die Verwendung der Fußstütze

■ Anheben der Fußstütze:


Halten Sie die Fußstützen-Taste [] auf der Fernbedienung gedrückt.
Lassen Sie die Taste los, wenn die Fußstütze die gewünschte Position erreicht hat.

Position, die bei angehobener Fußstütze Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Achten Sie darauf, dass die Fußstütze nicht mit der Armlehne eingeklemmt wird.

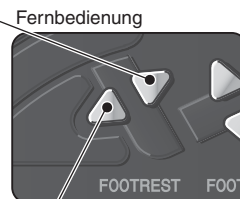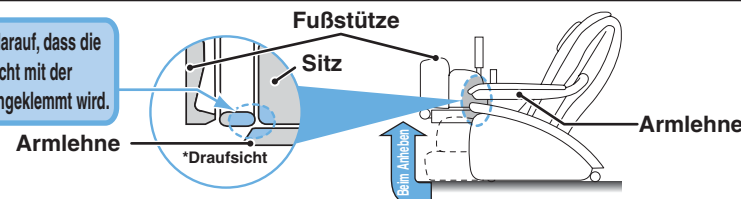

■ Absenken der Fußstütze:

Halten Sie die Fußstützen-Taste [] auf der Fernbedienung gedrückt.
Lassen Sie die Taste los, wenn die Fußstütze die gewünschte Position erreicht hat.

- Wenn die Fußstütze stoppt, verlängert oder verkürzt sich die Fußstützen-Verschiebungsfunktion automatisch, um die Fußstütze der Länge Ihrer Beine anzupassen.
- Nach dem Stoppen der Fußstützen-Verschiebung können Sie die Fußstützen-Position unter Verwendung der Fußstützen-Verschiebungstasten weiter einstellen.
- Wenn der POWER-Schalter des Sessels auf [ON] eingeschaltet ist, können Sie den Fußstützen-Winkel einstellen.
* Falls Sie den Eindruck haben, dass Ihre Knöchel nicht die Begrenzung der Fußeinheit erreichen, stellen Sie bitte die Neigungsposition oder die Fußstützen-Position so lange ein, bis die Fußstütze fest um Ihre Beine und Füße herum sitzt.

⚠ Warnung

- Stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Personen und insbesondere keine Kinder oder Haustiere im Weg befinden, wenn die Fußstütze abgesenkt wird. Achten Sie darauf, dass Sie keine Personen und/oder Gegenstände unterhalb der Fußstütze einklemmen.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Anheben der Fußstütze nicht die Hände einklemmen.
- Lassen Sie die Fußstütze auf keinen Fall plötzlich los, während Sie sie mit der Hand anheben. Stecken Sie während des Anhebens der Fußstütze auf keinen Fall Ihre Finger, Beine oder irgendwelche Gegenstände zwischen die Fußstütze und die Armlehne.

⚠ Achtung

- Legen Sie bitte ausschließlich Ihre Beine und Füße auf die Fußstütze.


Automatische Fußstützen-Verschiebungseinstellfunktion

Fußstützen-Verschiebungssensoren

Die Fußstützen-Verschiebungseinstellfunktion bedient sich im Knöchelbereich der Fußeinheit montierter Sensoren um zu erfassen, ob die Fußstütze verlängert oder verkürzt werden muss. Nehmen Sie mit Ihren Knöcheln gegen die Begrenzung der Fußeinheit gedrückt Platz, damit die Sensoren ordnungsgemäß arbeiten können.

* Falls Sie den Eindruck haben, dass Ihre Knöchel nicht die Begrenzung der Fußeinheit erreichen, stellen Sie bitte die Neigungsposition oder die Fußstützen-Position so lange ein, bis die Fußstütze fest um Ihre Beine und Füße herum sitzt.



■ Verkürzen der Fußstützen-Verschiebung:

Drücken Sie nach der automatischen Einstellung der Fußverschiebung die Fußstützen-Verschiebungstaste [] auf der Fernbedienung.

Position, die beim Verkürzen der Fußstütze Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Achten Sie darauf, dass die Fußstütze nicht mit der Armlehne eingeklemmt wird.

Achten Sie darauf, dass nichts in der Öffnung eingeklemmt wird.

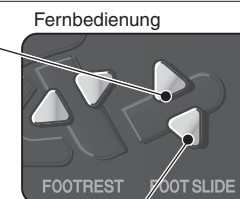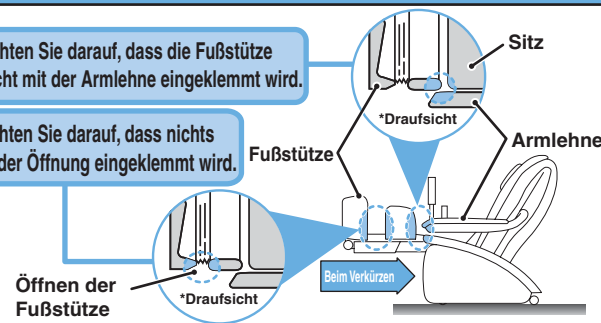

■ Verlängern der Fußstützen-Verschiebung:


Drücken Sie nach der automatischen Einstellung der Fußverschiebung die Fußstützen-Verschiebungstaste [] auf der Fernbedienung.

⚠ Warnung

- Stecken Sie während des Betriebs der Fußstützen-Verschiebungsfunktion auf keinen Fall Ihre Finger, Beine oder irgendwelche Gegenstände zwischen die Fußstütze und die Armlehne.

Kopfstütze

Für die Verwendung des Sessels sind zwei Kopfstützen-Polster (klein und groß) im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie diese Polster bitte, um Ihren Kopf während der Massage in einer bequemen und natürlichen Position zu lagern.

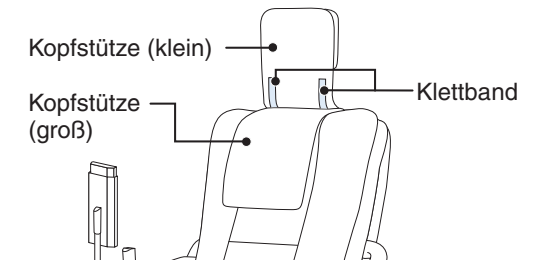


- Das kleine Kopfstützen-Polster ist mit Klettband am Sessel angebracht, damit Sie die Position einstellen können. Stellen Sie das kleine Kopfstützen-Polster nach oben und nach unten ein, um es vor dem Start der Massage an Ihre Kopfhöhe anzupassen.

Pufferpolster

Hinter dem Rückenpolster befindet sich ein Pufferpolster, das einen Teil der Rollenstimulation absorbiert.


Falls Sie das Gefühl haben, dass die Massage zu sanft ist, entfernen Sie dieses Pufferpolster bitte. Tauschen Sie das Pufferpolster durch das im Zubehör enthaltene dickere Pufferpolster aus, wenn das Gegenteil der Fall ist.

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Oberseite der Sessellehne und des unteren Rückenpolsters.

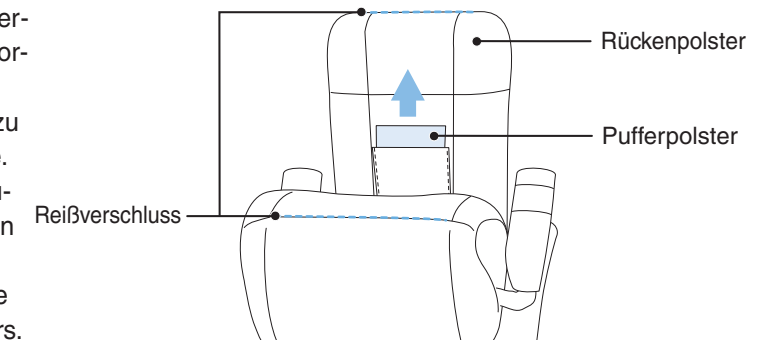

Shiatsu-Fußmatte

Im Lieferumfang des ROBOSTIC ist eine Shiatsu-Fußmatte enthalten. Diese Shiatsu-Fußmatte kann, falls gewünscht in die Fußeinheit gelegt werden.

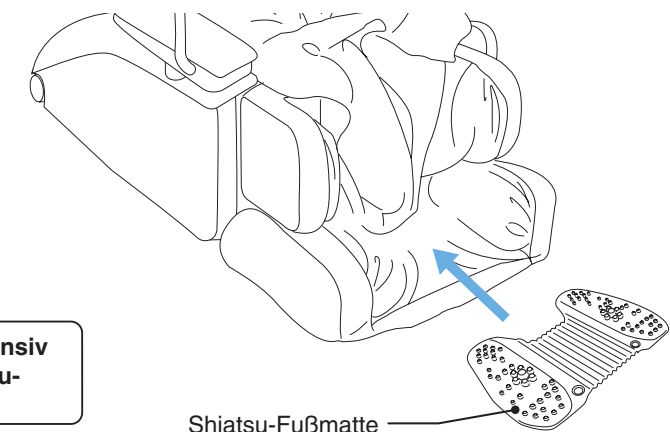

⚠ Achtung


- Falls die Stimulation zu intensiv ist, entfernen Sie die Shiatsu-Fußmatte bitte.

POSITIONSEINSTELLUNG

Wissenswertes über die Freigabe und Aufbewahrung des Joysticks

Wenn Sie ihn nicht verwenden, können Sie den Joystick an einem geeigneten Ort aufbewahren.


Wissenswertes über die Freigabe

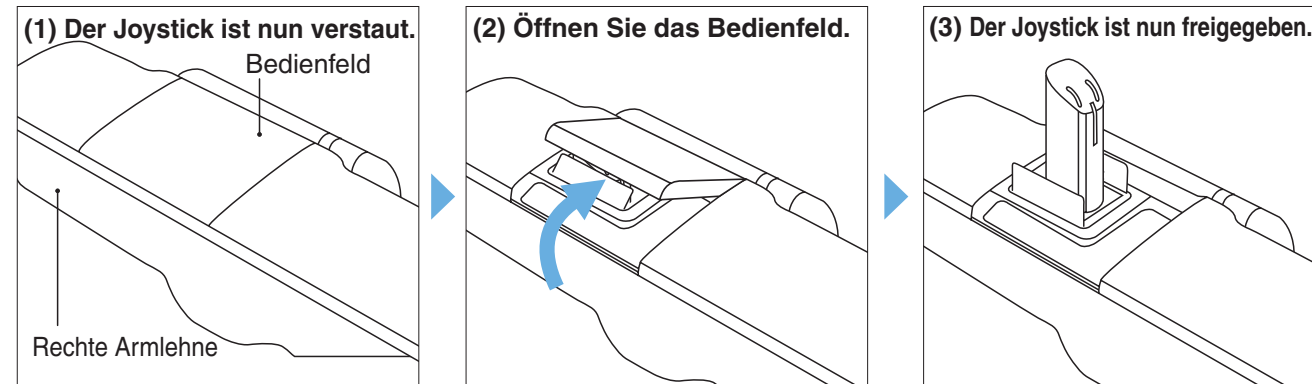

Heben Sie das Bedienfeld etwa 1 cm an, wie in Abbildung (2) dargestellt, um ihn freizugeben. Dadurch wird der Joystick automatisch hochgefahren und das Bedienfeld öffnet sich entsprechend (nach etwa 2 Sekunden).

* Bei ausgeschalteter Fernbedienung funktioniert der Joystick nicht. Halten Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um sie in Betrieb zu nehmen.


Wissenswertes über die Aufbewahrung

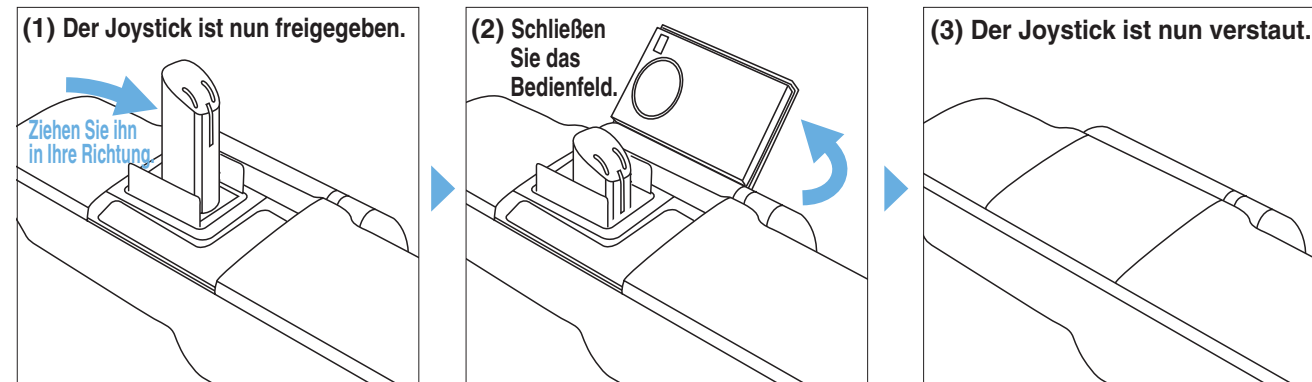

Ziehen Sie den Joystick zur Aufbewahrung in Ihre Richtung, bevor Sie das Bedienfeld schließen. Drücken Sie den Joystick nicht mit Gewalt zurück.

* Sie können den Joystick auch dann verstauen, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Wissenswertes über die Bedienung der Joystick-Sicherungsrichtung

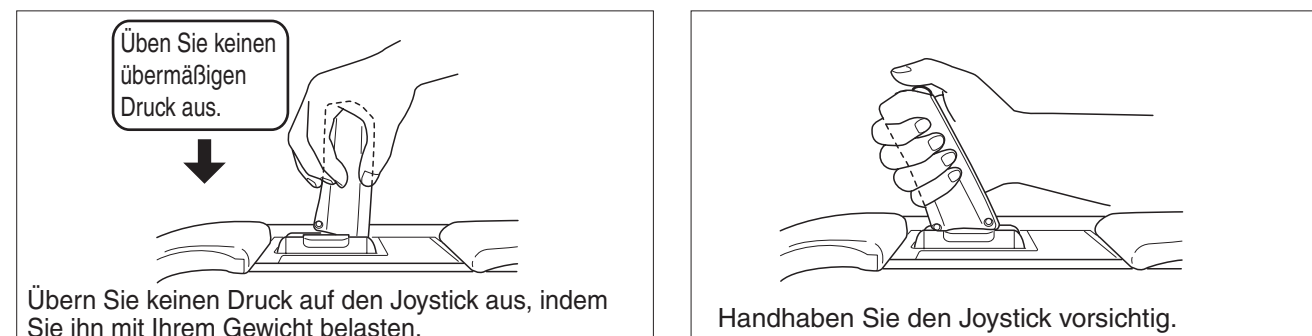

* Falls ein Druck von mehr als 5 kg auf die Oberseite oder beim Handhaben des Joysticks ausgeübt wird, fällt der Joystick herunter. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern bildet einen Bestandteil der Sicherheitsfunktion.

Achtung

- Legen Sie keinerlei Gegenstände auf das Joystick-Bedienfeld. Ziehen Sie den Joystick nicht mit Gewalt nach oben und biegen Sie ihn nicht zur Seite. → Dies könnte zu Personenschäden oder einer Beschädigung führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger einklemmen, wenn Sie den Joystick freigeben oder verstauen.
- Je nach Position des Joysticks beim Verstauen schließt sich das Bedienfeld nicht. Überprüfen Sie das Aufbewahrungsverfahren.


[POSITIONSEINSTELLUNG]

NACH DER VERWENDUNG

Wenn Sie aufstehen

- Stehen Sie nicht auf, indem Sie am Joystick ziehen oder den Joystick oder die Fernbedienungshalterung belasten.

* Senken Sie die Fußstütze immer wie in der Abbildung dargestellt ab. Anderenfalls könnten Sie sich Verletzungen zuziehen oder den Sessel beschädigen. Hinsichtlich des Betriebs der Neigungsfunktion lesen Sie bitte Seite 12.

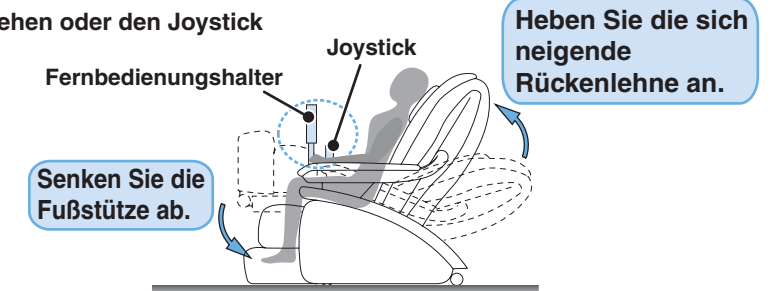

Achtung


- Verstauen Sie den Joystick nach der Verwendung. → Anderenfalls könnten Sie sich Verletzungen zuziehen oder den Sessel beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den POWER-Schalter nach jeder Verwendung ausschalten und den Sessel von der Wandsteckdose abtrennen. → Falls Kinder oder Haustiere mit dem Sessel spielen, kann dies zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie nach der Verwendung des Sessels sicher, dass Sie die sich neigende Rückenlehne in die aufrechte Position zurückstellen und die Fußstütze vollständig absenken.
- Wischen Sie den Sessel nach jeder Verwendung ab und bewahren Sie ihn an einem Ort ohne hohe Luftfeuchtigkeit auf.
- Ziehen Sie zum Abtrennen des Sessels von der Wandsteckdose nicht am Netzkabel; stellen Sie sicher, dass Sie beim Abtrennen immer den Stecker umfassen.
- Wenn Sie den Sessel über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihn von der Wandsteckdose abtrennen.

[NACH DER VERWENDUNG]

MASSAGE-PROGRAMME UND AUSWAHL

Massage- Arten

Gesundheitspflege- Programme

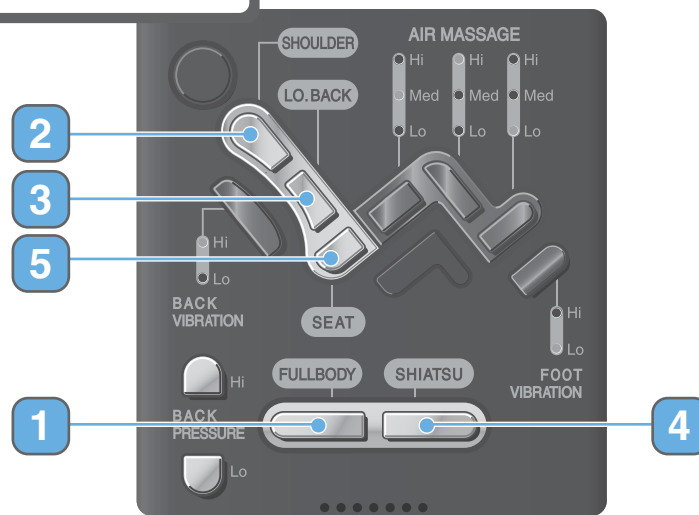

Hierdurch kommen Sie in den Genuss der automatischen Massage entsprechend der von Ihnen gewünschten Behandlung. Sie können Ihre Auswahl aus einer der Programmtasten auf der Fernbedienung treffen.

Manueller Auswahlmodus

Massage-Maßnahmen wie Geschwindigkeit, Intensität und Position können über die Fernbedienung, die Neben-Fernbedienung und den Joystick eingestellt werden.

Das **3D**-Programm liefert Ihnen eine 3D-Bewegung durch ein Vor- und Zurückgleiten der Rollen.

Normal-Programm zur Gewährleistung einer flachen Bewegung

- * Sie können zwischen dem **3D**- und Normalprogramm umschalten, indem Sie während des jeweiligen Programmbetriebs dieselbe Programmtaste Ihrer Wahl drücken.
- * Während des Normalprogramm-Betriebs wird nur die Programmbezeichnung auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

1 FullBody 3D ↔ FullBody (Normal)

Diese Maßnahme empfehlen wir Personen, die wenig Energie haben oder schnell ermüden (etwa 15 Minuten).

2 Shoulder 3D ↔ Shoulder (Normal)

Auf den Nacken und die Schultern fokussierte Massage (etwa 13 Minuten)

3 Lower Back Tension 3D ↔ Lower Back Tension (Normal)

Auf den unteren Rückenbereich fokussierte Massage (etwa 12 Minuten)

4 Shiatsu 3D ↔ Shiatsu (Normal)

Durch eine langsame Rollen-Maßnahme wird der gesamte Körper massiert (etwa 13 Minuten).

5 Seat 3D ↔ Seat (Normal)

Eine Kombination zwischen Vibrations- und Luftdruck-Massage für das Gesäß (etwa 12 Minuten)

- Die Dauer der einzelnen Programme hängt von der Größe und der Art des Körpers sowie vom Neigungswinkel und anderen durch den Benutzer zu bestimmenden Faktoren ab.


MANUELLER AUSWAHLMODUS

Sie können Ihre Lieblings-Massage-Maßnahmen unter Verwendung der Fernbedienung, des Joysticks oder der Neben-Fernbedienung auswählen und kombinieren.

* Bei Massage-Maßnahmen im manuellen Auswahlmodus leuchten die grünen Lampen. Der Joystick leuchtet und blinkt blau.

Fernbedienung

Sie können die Luftdruck-Massage (Gesäß, Waden, Füße) und die Vibration (Rücken, Füße) über die Fernbedienung auswählen.

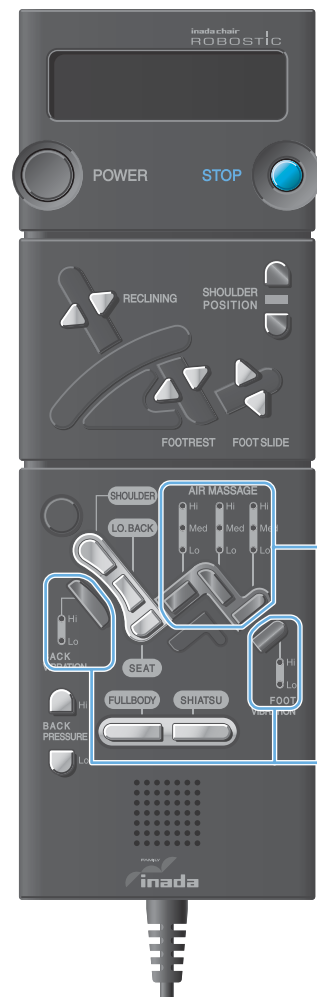

■ Intensitätseinstellung der Luftdruck-Massage
Dieses Programm startet mit [Mittel].
Entsprechend der unten aufgeführten Abbildung können Sie durch Drücken einer der Luftdruck-Massage-Tasten ① Gesäß, ② Waden oder ③ Füße folgendermaßen umschalten:

Mittel → Hoch → Aus → Niedrig

Display der Luftdruck-Massage-Lampen

Aus	Niedrig	Mittel	Hoch
Hi Lo	Hi Lo	Hi Lo	Hi Lo

Die oben aufgeführten Abbildungen stellen die Einstellung der Gesäß-Maßnahme auf [Mittel], der Waden auf [Hoch] und der Füße auf [Niedrig] dar.

■ Vibrations-Intensitätseinstellung
Dieses Programm startet mit [Niedrig].
Entsprechend der unten aufgeführten Abbildung können Sie durch Drücken der Rücken-Vibrationstaste ① oder der Fuß-Vibrationstaste ② folgendermaßen umschalten:

Niedrig → Hoch → Aus

Display der Intensitätseinstellungslampe

Aus	Niedrig	Hoch
Hi Lo	Hi Lo	Hi Lo


Die oben aufgeführte Abbildung stellt die Einstellung der Rücken-Maßnahme auf [Hoch] und der Füße auf [Niedrig] dar.

Joystick und Neben-Fernbedienung

Sie können die Geschwindigkeit des Knetens und Klopfens, die Massage-Intensität sowie die vertikale Rollenposition unter Verwendung des Joysticks einstellen. Die Neben-Fernbedienung ist für die Auswahl der Knetumkehr, der Knetart 1 und 2, der Rollen 1 und 2 sowie der Speicherfunktion vorgesehen.

■ Einstellung der Massage-Intensität und der vertikalen Rollenposition

Betrieb	Maßnahme
Nach oben Ziehen Sie den Joystick nach oben.	Die Rollen bewegen sich nach oben.
Nach unten Drücken Sie den Joystick hinunter.	Die Rollen bewegen sich nach unten.
Vorwärts Drücken Sie den Joystick nach vorne.	Die Rollen werden nach vorne gedrückt, um die Massage-Intensität zu erhöhen.
Rückwärts Ziehen Sie den Joystick nach hinten.	Die Rollen werden eingezogen, um die Massage-Intensität zu verringern.

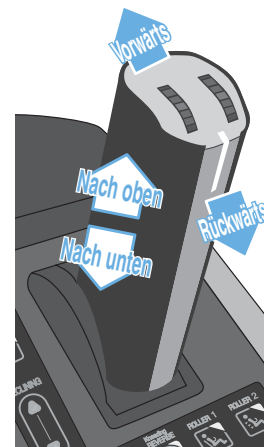

■ Manuelle Auswahlmodus-Taste


Wenn Sie diese Taste drücken, blinkt der obere rechte Bereich der Taste, um den manuellen Auswahl-Programmbetrieb unter Verwendung des Joysticks und der Neben-Fernbedienung zu ermöglichen. Wenn Sie die Taste erneut drücken, erlischt die Lampe und der Betrieb stoppt, nachdem die Rollen in die Aufbewahrungsposition zurückgekehrt sind.

(In der rechten Abbildung ist die Durchführung des manuellen Auswahlprogramms dargestellt.)



■ Joystick-Lampe

Diese Lampe blinkt, wenn die Schulter-Positionseinstellung verfügbar ist oder der Joystick in Ihre Richtung gezogen werden muss. Beim Stoppen des Blinkens oder wenn die Lampe fortwährend leuchtet ist der Joystick betriebsbereit.

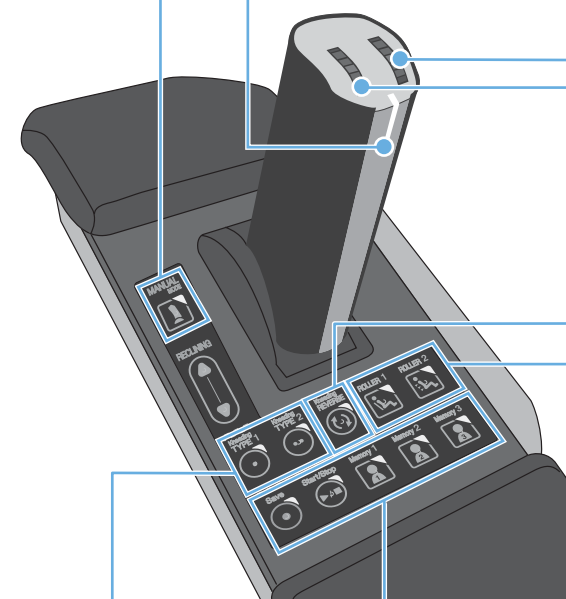

Hinsichtlich einer Erklärung der Speicherfunktion lesen Sie bitte die Seiten 22 und 23.

■ Klopf Auswahl

Hierdurch wird die Klopfmaßnahme gestartet/gestoppt und die Geschwindigkeit eingestellt.

Betrieb	Maßnahme
Umschaltung auf [Schnell]	Hierdurch wird die Klopfmaßnahme gestartet und beschleunigt.
Umschaltung auf [Langsam]	Hierdurch wird die Klopfmaßnahme verlangsamt. Bei einem weiteren Drehen wird die Maßnahme gestoppt.

■ Knetauswahl


Hierdurch wird die Knetmaßnahme gestartet und beschleunigt.

Betrieb	Maßnahme
Umschaltung auf [Schnell]	Hierdurch wird die Knetmaßnahme gestartet und beschleunigt.
Umschaltung auf [Langsam]	Hierdurch wird die Knetmaßnahme verlangsamt. Bei einem weiteren Drehen wird die Maßnahme gestoppt.

■ Knetumkehr

Drücken Sie diese Taste, um die Knetumkehr beim Leuchten des oberen rechten Bereichs der Taste zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut, um zur normalen Richtung zurückzukehren.

(In der linken Abbildung ist die Durchführung der Knetumkehr-Maßnahme dargestellt.)

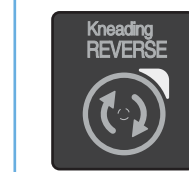

■ KNETARTEN

Maßnahme	Beschreibung
Knetart 1	Hier werden Mehrfach-Massage-Maßnahmen wie die menschliche Berührung während des Umschaltens der Knetgeschwindigkeit eingestellt.
Knetart 2	Hierdurch werden Mehrfach-Massage-Maßnahmen durch eine Kombination zwischen Kneten und Shiatsu eingestellt.

(In der linken Abbildung ist die Durchführung der Knetart-Maßnahme 1 dargestellt.)

Drücken Sie diese Taste, um die Maßnahme beim Leuchten des oberen rechten Bereichs der Taste zu starten. Sie können die Geschwindigkeit unter Verwendung des Reglers einstellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Maßnahme zu stoppen. Drücken Sie diese Taste, um die Maßnahme beim Leuchten des oberen rechten Bereichs der Taste zu starten. Sie können die Geschwindigkeit unter Verwendung des Reglers einstellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Maßnahme zu stoppen.

■ Rollen

Maßnahme	Beschreibung
Rollen 1	Hierdurch wird der Rücken durch Rollen-Auf- und Abbewegungen gestreckt. * Bewegen Sie den Joystick nach oben oder nach unten, um die Richtung umzuschalten.
Rollen 2	Hierdurch wird der Rücken durch Rollen-Auf- und Abbewegungen teilweise gestreckt. * Bewegen Sie den Joystick nach oben oder nach unten, um die Mitte des Rollen-Maßnahmebereichs einzustellen. Durch diesen Betrieb wird zudem die Richtung der Maßnahme umgeschaltet.






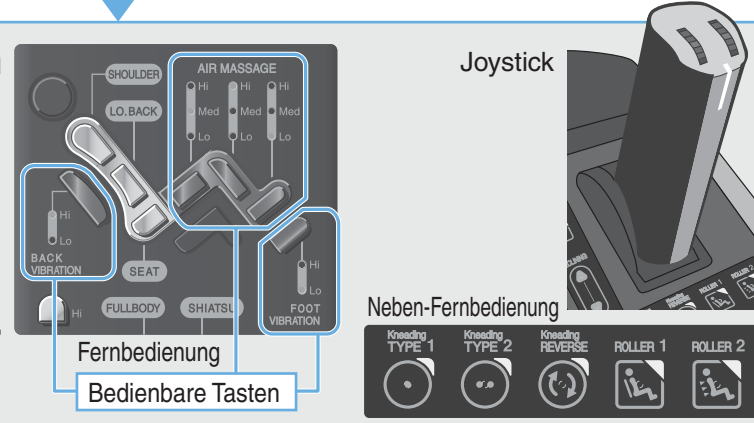
(In der oben aufgeführten Abbildung ist die Durchführung der Rollenmaßnahme 2 dargestellt.)

⚠ Achtung

- Drücken Sie zuerst die manuelle Auswahlmodus-Taste, um den Joystick oder die Neben-Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.
- Der Joystick kann von links nach rechts oder von rechts nach links bewegt werden. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Joystick aus. → Dies könnte zu einer Beschädigung führen.

MANUELLER AUSWAHLMODUS

Wissenswertes über den Betrieb des manuellen Auswahlmodus

- 1 Drücken Sie die POWER-Taste.** Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Auswahl getroffen wird, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet. 
- 2 Drücken Sie die manuelle Auswahlmodus-Taste auf der Neben-Fernbedienung.** Hierdurch wird die automatische Shiatsu-Punkt-Lokalisierungsfunktion gestartet. * Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Auswahl getroffen wird, wird der manuelle Auswahlmodus beendet. 
- 3 Während die Schulterpositions-Lampe auf der Fernbedienung leuchtet, können Sie die Schulterposition einstellen.** Sie können die Rollen mit der Schulterpositions-Taste oder dem Joystick nach oben und nach unten bewegen. Falls keine Einstellung erforderlich ist, belassen Sie bitte beides im gegenwärtigen Zustand. 
- 4 Falls die Joystick-Lampe noch immer blinkt, ziehen Sie den Joystick bitte in Ihre Richtung, bis die Lampe fortwährend leuchtet.**
- 5 Zum Starten der gewünschten Massage-Maßnahme können Sie die Fernbedienung, den Joystick und/oder die Neben-Fernbedienung verwenden. Sie können die jeweilige Massage-Maßnahme auch unter Verwendung der Speicherfunktion speichern (siehe Seite 22) und starten (siehe Seite 23).** 
- 6 Die Massage-Maßnahme wird nach 15 Minuten abgeschlossen.** Nun kehren die Rollen in ihre Aufbewahrungsposition (oberer Teil der Rückenlehne) zurück.
- 7 Der Betrieb wird gestoppt.**

Umschaltung der Programme **Umschaltung vom manuellen Auswahlmodus in ein Gesundheitspflege-Programm**

Wenn Sie während des manuellen Auswahlmodus eine Gesundheitspflege-Taste drücken, kehren die Rollen in ihre Aufbewahrungsposition zurück, damit mit der automatischen Shiatsu-Punkt-Lokalisierung und dem Gesundheitspflege-Programm begonnen werden kann.

Stoppen während einer Massage-Maßnahme Drücken Sie die POWER- oder manuelle Auswahlmodus-Taste, um den Betrieb während einer Massage-Maßnahme zu stoppen. Nach der Rückkehr in ihre Aufbewahrungsposition werden die Rollen gestoppt. Verwenden Sie in einem Notfall oder beim Auftreten einer Fehlfunktion die STOP-Taste, um den Betrieb des Sessels sofort zu stoppen. Drücken Sie, nachdem Sie sich von der Sicherheit überzeugt haben, die POWER-Taste. Die Rollen kehren in ihre Aufbewahrungsposition zurück und werden gestoppt.





Achtung

- Falls Sie das Gefühl haben, dass die Massage zu intensiv ist, können Sie die Intensität unter Verwendung des auf den Seiten 19 und 20 beschriebenen Betriebs verringern. Falls diese Abhilfemaßnahme nicht funktioniert, stoppen Sie bitte die Verwendung des Sessels und konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben. →Die fortwährende Verwendung bei hoher Stimulationsstufe könnte zu Verletzungen führen.
- Falls Ihre Beine oder Füße während der Massage aus der Fußstütze herausrutschen, versuchen Sie bitte nicht, sie mit Gewalt wieder hineinzuschieben.

Speicherfunktion

- Sie können Maßnahmen wie beispielsweise das Kneten, die Knetumkehr, die Knetarten 1 und 2 sowie das Klopfen durch den manuellen Auswahlmodus, und die Rollenpositionen sowie den Rollenbetrieb 1 und 2 speichern. Mit der Speicherfunktion können bis zu 3 Personen ihre Maßnahmen speichern (bis zu 5 Minuten pro Person).

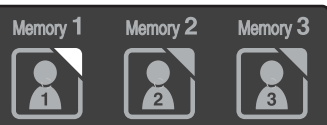Wissenswertes über das Speichern




- 1 Drücken Sie die Speichertaste.** Nun leuchtet die ausgewählte Speicherlampe auf. (In der rechten Abbildung ist die Auswahl des Speichers 1 dargestellt.) 
- 2 Drücken Sie die Speichertaste.** Hierdurch wird die Massage-Maßnahme gespeichert. Wenn Sie bereits gespeicherte Daten wieder löschen möchten, drücken Sie die Speichertaste bitte erneut. Die Taste leuchtet während des Speicherns wie rechts dargestellt. 
- 3 Führen Sie unter Verwendung des Joysticks und der Neben-Fernbedienung die zu speichernde Massage-Maßnahme durch.** 
- 4 Drücken Sie 5 Minuten später die Start-/Stopp-Taste, um das Speichern abzuschließen.** 

Achtung

- Wenn die zu speichernde Maßnahme nach dem Beginn des Speichervorgangs für mehr als 90 Sekunden gestoppt wird, wird der Speichervorgang abgebrochen.
- Wenn der manuelle Auswahlmodus während des Speichervorgangs gestoppt wird, wird auch das Speichern abgebrochen.
- Die Massage-Maßnahme wird auch dann fortgesetzt, wenn die Aufnahme in den Speicher bereits abgeschlossen ist.
- Während des Speichervorgangs wird der unter dem oben aufgeführten Schritt 3 beschriebene Massage-Betrieb zum ersten Mal ignoriert. Auch wenn eine andere Taste außer der Neigungs-, Fußstützen-, Fußverschiebungs-, Luftdruck- oder Vibrationstaste auf der Fernbedienung oder die Neigungstaste auf der Neben-Fernbedienung gedrückt wird, wird der Massage-Betrieb ignoriert. Wenn allerdings eine der oben aufgeführten Taste erneut gedrückt wird, wird der Speichervorgang gestoppt. Wenn die POWER-, STOP-, Start-/Stopp- oder manuelle Auswahlmodus-Taste einmal gedrückt wird, wird die Massage-Maßnahme gestoppt. In diesem Fall wird das Drücken der Schulterpositionstaste oder der Rückendruck-Taste auf der Fernbedienung ignoriert.

MANUELLER AUSWAHLMODUS

Wissenswertes über das Aufrufen (Starten) eines gespeicherten Programms

- 1 Drücken Sie die Speichertaste.**
(In der rechten Abbildung ist die Auswahl des Speichers 1 dargestellt.)

- 2 Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste.**
Hierdurch wird die zuvor gespeicherte Massage-Maßnahme gestartet. Falls keine Daten gespeichert wurden, führen Sie das Speichern bitte unter Verwendung des auf Seite 22 beschriebenen Verfahrens durch. Diese Taste leuchtet während des Programms wie rechts dargestellt.

- 3 Die gespeicherte Massage-Maßnahme wird wiederholt. Diese Maßnahme wird 15 Minuten nach dem Start des manuellen Auswahlmodus oder durch Drücken der Start-/Stopp-Taste gestoppt.**

- 4 Der Betrieb wird gestoppt.**

Achtung

- Wenn Sie eine andere Taste außer der Neigungs-, Fußstützen-, Fußverschiebungs-, Luftdruck- oder Vibrationstaste auf der Fernbedienung oder der Neigungstaste auf der Neben-Fernbedienung einmal drücken oder den Joystick während des Programms einmal verwenden, wird die Meldung "The button is invalid." angezeigt. Falls Sie erneut eine dieser Tasten drücken oder den Joystick verwenden, wird die Massage-Maßnahme gestoppt. Wenn die POWER-, STOP-, Start-/Stopp- oder manuelle Auswahlmodus-Taste einmal gedrückt wird, wird die Massage-Maßnahme gestoppt. In diesem Fall wird das Drücken der Schulterpositionstaste oder der Rückendruck-Taste auf der Fernbedienung ignoriert.

Anleitung für die Kombination und Einstellung der manuellen Auswahlmodus-Massage-Maßnahmen

Sie können Ihre Auswahl aus den Menüs 1 bis 5 treffen und Massage-Maßnahmen Ihrer Wahl miteinander kombinieren.

- Ein Kreis in der Einstellspalte weist darauf hin, dass die jeweilige Einstellung im Zuge dieser Massage-Maßnahme durchgeführt werden kann.

Maßnahme	Fernbedienung	Neben-Fernbedienung	Joystick	Beschreibung	Geschwindigkeit	Nach oben / unten	Intensität
1 Kneten <small>(Wählen Sie 1 unter 4 Möglichkeiten aus.)</small>							
Kneten (Vorwärts)				Einfache Knetmaßnahme	○ (7 Stufen)	○	○
Kneten (Rückwärts)				Umschaltung zwischen Vorwärts und Rückwärts	○ (7 Stufen)	○	○
Knetart 1				Komplexes Gefühl wie das einer menschlichen Berührung	○ (3 Stufen)	○	○
Knetart 2				Kneten kombiniert mit Shiatsu	○ (3 Stufen)	○	○
+							
2 Klopfen							
Klopfen				Einfache Klopfmaßnahme	○ (7 Stufen)	○	○
+							
3 Rollen <small>(Wählen Sie eine von 2 Möglichkeiten aus.)</small>							
Rollen 1				Strecken des Rückens	–	○ Umschaltung der Richtung	○
Rollen 2				Teilweises Strecken des Rückens	–	○ Einstellung der Mitte des Maßnahmenbereichs	○
<small>Durch die Speicherfunktion aufzurufende oder zu speichernde Maßnahme</small>							
+							
4 Vibration <small>(für den gleichzeitigen Betrieb verfügbar)</small>							
Rückenvibration				Vibrationsmassage des Rückens	–	○	○
Fußvibration				Vibrationsmassage der Füße	–	–	○
+							
5 Luftmassage <small>(für den gleichzeitigen Betrieb verfügbar)</small>							
Sitz				Luftdruck-Massage des Gesäßes	–	–	○
Waden				Luftdruck-Massage der Waden	–	–	○
Fuß				Luftdruck-Massage der Füße	–	–	○

* Markierungen im oben aufgeführten Verzeichnis:
Die rechts dargestellten Markierungen gelten für durch den Joystick einzustellende Punkte.

Durch den Regler einstellbar

Durch eine Auf- und Abbewegung des Joysticks einstellbar


Durch eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Joysticks einstellbar

GESUNDHEITSPFLEGE-PROGRAMME

Gesundheitspflege-Programmmassagen

- Zur Linderung oder Verbesserung Ihrer Gesundheit stehen Ihnen 10 Programme zur Verfügung.
- Treffen Sie Ihre Auswahl aus dem neu vorprogrammierten Massage-Menü, indem Sie einfach auf eine der Gesundheitspflege-Taste drücken.
- * Die Betriebslampen der Gesundheitspflege-Programme leuchten orange.

Wissenswertes über den Betrieb des Gesundheitspflege-Programms

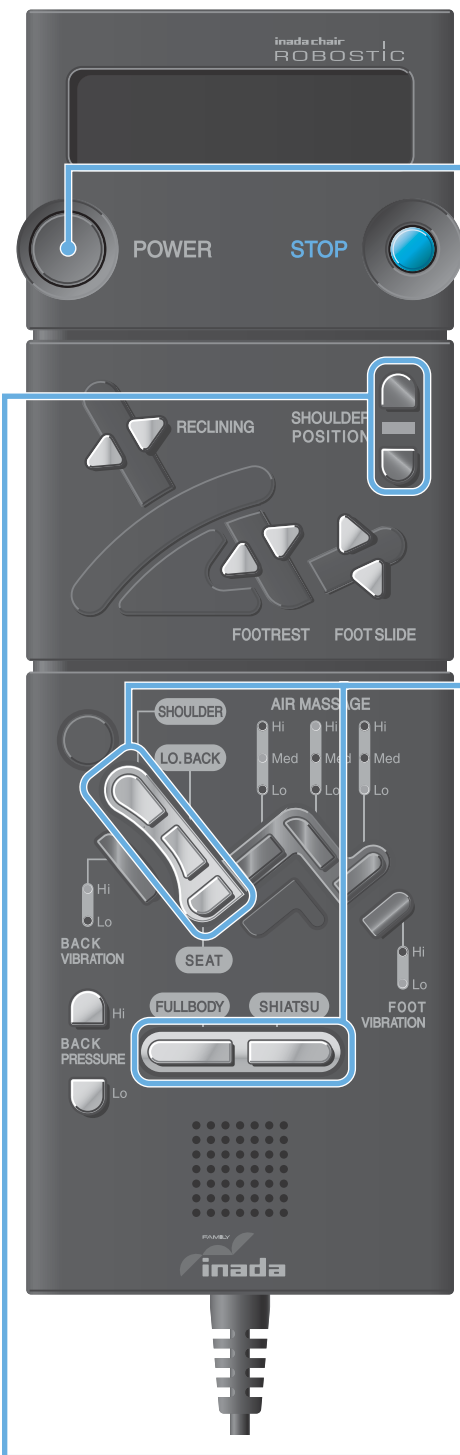

- Drücken Sie die POWER-Taste.**
 Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten eine Auswahl getroffen wird, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet.
 Nun werden Sie zur Auswahl eines Programms aufgefordert.
- Drücken Sie die Taste für das Gesundheitspflege-Programm Ihrer Wahl.**
 Nun wird die Programmauswahl bestätigt.
 * Nun wird die automatische Shiatsu-Punkt-Lokalisierung durchgeführt. Warten Sie bitte einen Moment.
 [Bitte!] Setzen Sie sich bitte tief in den Sessel hinein und lehnen Sie Ihren Kopf gegen die Rückenlehne, um eine genaue Lokalisierung der Shiatsu-Punkte sicherzustellen.
- Beim Leuchten der Schulter-Lampe ist die Schultereinstellung verfügbar.**
 Verwenden Sie die Schulterpositions-Einstell-tasten, um die Rollen je nach Wunsch zu bewegen. Falls Sie keine weitere Einstellung wünschen, verwenden Sie die Tasten bitte nicht.
 * Die Schulterposition kann nicht mit dem Joystick eingestellt werden.
- Nun wird die Massage gestartet.**
- Nun ist die Massage abgeschlossen.**
 Nun ist die Massage-Maßnahme abgeschlossen und die Rollen kehren in ihre Aufbewahrungsposition (oberer Teil der Rückenlehne) zurück.

Achtung

- Halten Sie die Zeitdauer der einzelnen Massage-Sitzungen auf 15 Minuten und der für eine bestimmte Körperstelle bestimmten Massage auf 5 Minuten beschränkt.
 →Eine fortwährende Verwendung über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einer Überstimulation führen, was wiederum das Gegenteil des gewünschten Effektes oder gar Verletzungen verursachen kann. Lassen Sie sich bitte nicht für länger als insgesamt 30 Minuten pro Tag massieren.

Einstellung der Massage-Maßnahmen im Gesundheitspflege-Programm

Rückenmassage-Intensitätseinstellung

Drücken Sie während des Gesundheitspflege-Programms

(1) die [Hoch]-Taste zur Intensitätserhöhung.

(2) die [Niedrig]-Taste zur Intensitätsverringern.





* (1) Die Rollen drücken während des Drückens der [Hoch]-Taste

(2) nach vorne und ziehen sich während des Drückens der [Niedrig]-Taste nach hinten zurück.

Dadurch kann die Intensität der Massage gesteuert werden.

Die Intensität der Luftdruck-Massage startet mit [Mittel].

Entsprechend der rechten Abbildung können Sie durch Drücken einer der Luftdruck-Massage-Tasten ① Gesäß, ② Waden oder ③ Füße folgendermaßen umschalten:

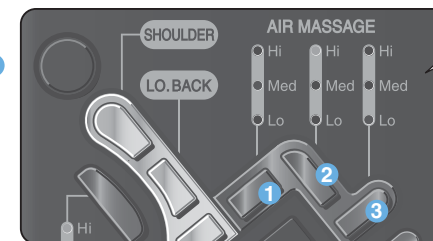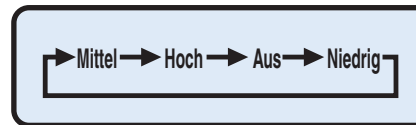


Display der Luftdruck-Massage-Lampe

Aus	Niedrig	Mittel	Hoch
<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi
<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med	<input type="radio"/> Med
<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo

Vibrations-Intensitätseinstellung

Dieses Programm startet mit [Niedrig].

Entsprechend der rechten Abbildung können Sie durch Drücken der Rücken-Vibrationstaste ① oder der Fuß-Vibrationstaste ② folgendermaßen umschalten:

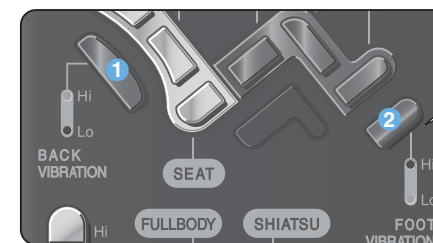

Display der Luftdruck-Massage-Lampe

Aus	Niedrig	Hoch
<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi	<input type="radio"/> Hi
<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo	<input type="radio"/> Lo

Umschaltung der Programme

Umschaltung von einem Gesundheitspflege-Programm in ein anderes

Falls während eines Gesundheitspflege-Programms eine andere Gesundheitspflege-Programmtaste gedrückt wird, kehren die Rollen zunächst in ihre Aufbewahrungsposition zurück, und anschließend wird mit der automatischen Shiatsu-Punkt-Lokalisierung begonnen.

Umschaltung von einem Gesundheitspflege-Programm in den manuellen Auswahlmodus

Wenn Sie während der Gesundheitspflege-Programme die manuelle Auswahl-taste drücken, wird die Umschaltung auf eine der folgenden Weisen durchgeführt:

- Die Rollen kehren während der automatischen Shiatsu-Punkt-Lokalisierung in ihre Aufbewahrungsposition zurück, bevor die Umschaltung in den manuellen Auswahlmodus erfolgt.
- Falls die automatische Shiatsu-Punkt-Lokalisierung bereits abgeschlossen wurde, können Sie direkt in den manuellen Auswahlmodus umschalten.

Stoppen während einer Massage-Maßnahme

Drücken Sie die POWER-Taste, um eine Massage-Maßnahme vor dem Abschluss zu stoppen. Nach der Rückkehr der Rollen in ihre Aufbewahrungsposition wird der Betrieb gestoppt. Drücken Sie in einem Notfall oder beim Auftreten von Problemen die STOP-Taste. Nun wird die Massage-Maßnahme sofort gestoppt. Nach der Überprüfung der Sicherheit können Sie erneut die POWER-Taste drücken, um die Rollen wieder in ihre Aufbewahrungsposition zurück zu bringen. Anschließend wird die Stromversorgung ausgeschaltet.

Achtung

- Falls Sie das Gefühl haben, dass die Massage zu intensiv ist, verringern Sie die Intensität bitte unter Verwendung des im Abschnitt "Einstellung der Massage-Maßnahmen während eines Gesundheitspflege-Programms" auf dieser Seite beschriebenen Verfahrens. Falls diese Abhilfemaßnahme nicht funktioniert, stoppen Sie bitte die Verwendung des Sessels und konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.
 →Die fortwährende Verwendung bei hoher Stimulationsstufe könnte zu Verletzungen führen.
- Stecken Sie weder Hände noch Füße zwischen die Rollschienen oder in den Raum zwischen Rückenlehne und Sitz oder zwischen sich bewegende Teile.
- Tragen Sie bei der Verwendung dieses Sessels keinerlei harten Gegenstände wie beispielsweise Schmuck am Körper.
- Falls Ihre Beine oder Füße während der Massage aus der Fußstütze herausrutschen, versuchen Sie bitte nicht, sie mit Gewalt wieder hineinzuschieben.

Falls das Problem auch nach dem Durchführen der in dieser Anleitung zur Fehlersuche vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen weiter besteht, stoppen Sie bitte die Verwendung des Sessels sofort, damit ein Unfall oder Verletzungen vermieden werden, und trennen Sie den Sessel von der Stromversorgung ab. Konsultieren Sie hinsichtlich einer Beratung den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

Problem **Geräuschentwicklung während des Sesselbetriebs:**

- Während des Klopfens und des kombinierten Knetens und Klopfens;
- Geräusch der Luftpumpe;
- Geräusch der Rollen, die am Sesselbezug reiben;
- Geräusch des Vibrationsmechanismus;
- Geräusch des Mechanismus der sich neigenden Rückenlehne;
- Geräusch des Luftmassage-Polsters.

Ursache und Abhilfe-maßnahme Diese Geräusche sind ein normaler Bestandteil des Sesselbetriebs und haben keinerlei Auswirkung auf seine Leistung.

Problem **Die Tasten der Fernbedienung scheinen nicht ordnungsgemäß zu funktionieren.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Überprüfen Sie den Sessel bitte auf die folgenden möglichen Probleme:

- 1) Ist das Netzkabel vollständig in die Wandsteckdose eingesteckt?
- 2) Ist das Netzkabel vollständig in den Anschluss auf der Rückseite des Sessels eingesteckt?
- 3) Ist der Haupt-POWER-Schalter auf der Rückseite des Sessels eingeschaltet?

Problem **Auf der Anzeige der Fernbedienung wird die Meldung "Restart the main POWER switch." eingeblendet.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Schalten Sie den Haupt-POWER-Schalter auf der Rückseite des Sessels aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie den Schalter anschließend wieder ein.

- 1) Falls der Sessel nun seinen normalen Betrieb aufnimmt, ist keine weitere Maßnahme erforderlich.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Fußstützen-Anschluss vollständig angeschlossen ist.
- 3) Falls dieselbe Meldung wieder angezeigt wird, stoppen Sie bitte die Verwendung des Sessels und trennen Sie ihn von der Stromversorgung ab. Konsultieren Sie hinsichtlich einer Beratung den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

Problem **Die automatische Shiatsu-Punkt-Lokalisierungsfunktion arbeitet nicht ordnungsgemäß (die Höhe der Rollen entspricht nicht der Stellung der Schultern).**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Setzen Sie sich weiter hinten auf den Sessel, damit Sie Ihren Kopf fest gegen die Rückenlehne lehnen können. Alternativ dazu können Sie die Schulterposition mit der Schulterpositions-Taste einstellen, nachdem die Shiatsu-Punkte lokalisiert wurden.

Problem **Die Fußstützen-Einstellfunktion arbeitet nicht ordnungsgemäß (die Fußstütze reicht nicht an die Fußsohlen heran).**

Ursache und Abhilfe-maßnahme berühren, damit die Sensoren (neben den Knöcheln) ordnungsgemäß funktionieren können. Falls Ihre Knöchel nicht die Rückseite der Fußeinheit berühren, verwenden Sie bitte die Fußstützen-Tasten, um den Winkel einzustellen.
Lesen Sie hinsichtlich der Einzelheiten Seite 13.

Problem **Die Massage-Maßnahme in der Programmmitte gestoppt.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Schalten Sie den Haupt-POWER-Schalter auf der Rückseite des Sessels aus. Warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie ihn anschließend wieder ein.

- 1) Falls der Sessel nun seinen normalen Betrieb aufnimmt, ist keine weitere Maßnahme erforderlich.
- 2) Falls dies das Problem nicht beseitigt, stoppen Sie bitte sofort die Verwendung des Sessels, um einen Unfall oder Verletzungen zu vermeiden. Trennen Sie den Sessel bitte von der Stromversorgung ab und konsultieren Sie unseren Kundendienst.

Problem **Die Rollen stoppen in der Mitte der Massage-Maßnahme.**


Ursache und Abhilfe-maßnahme Wenn die Massage-Geschwindigkeit rechts langsam ist und auf den Rollen zu viel Druck liegt, stellen sie ihre Bewegung kurzfristig ein. Hierbei handelt es sich allerdings um keine Fehlfunktion. Heben Sie Ihren Körper bitte nur leicht vom Sessel an.

Problem **Die Rollen haben sich nach oben bewegt und wurden anschließend gestoppt.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Der automatische Timer bewirkt, dass sich die Rollen nach oben bewegen, wenn die Massage-Zeit abgeschlossen ist, damit Ihre Bewegungen beim Aufstehen vom Sessel nicht behindert werden. Wenn Sie die Massage fortsetzen möchten, drücken Sie bitte erneut die POWER-Taste auf der Fernbedienung.

Problem **Die rechten und linken Rollen sind nicht aneinander ausgerichtet.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Die Rollen wurden für eine alternierende Klopfbewegung konzipiert, so dass sie in der Stopp-Position zueinander nicht aneinander ausgerichtet sind - dies ist ein Bestandteil des Rollendesigns und keinerlei Fehlfunktion des Sessels.

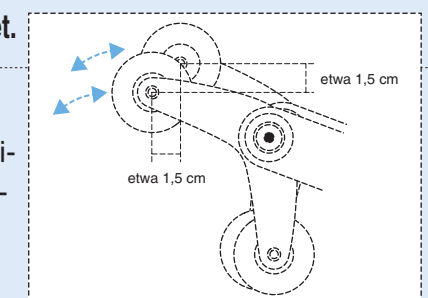

Problem **Wenn die Fußstütze angehoben oder abgesenkt werden soll oder wenn während der Bein- oder Fußmassage die Fußstützen-Verschiebungsfunktion verwendet wird, stoppt der Sessel seinen Betrieb.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Aus Sicherheitsgründen ist die Luftdruck-Massage so konzipiert, dass sie bei Aktivierung der Fußstütze oder der Fußstützen-Verschiebungsfunktion während der Massage-Maßnahme gestoppt wird.

Problem **Die Neigungsfunktion arbeitet nicht.**

Ursache und Abhilfe-maßnahme Überprüfen Sie, ob irgendein Gegenstand zwischen der sich neigenden Rückenlehne und dem Steuerkasten oder zwischen einer Armlehne und der Seitenabdeckung eingeklemmt ist.
U. U. wurde die Neigungs-Sicherheitseinheit aktiviert.

FEHLERSUCHE

Problem Die Speicherfunktion wird gestoppt.

Ursache und Abhilfe-
maßnahme

Die automatische Timer-Funktion verhindert den Speichervorgang, wenn die zu speichernde Maßnahme nicht gestartet wurde oder wenn sie für mehr als 90 Sekunden nach dem ursprünglichen Starten der Speicherfunktion gestoppt wurde; zudem wird die Speicherfunktion automatisch 5 Minuten später gestoppt.

Problem Das Bedienfeld des Joysticks lässt sich nicht schließen.

Ursache und Abhilfe-
maßnahme


Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld des Joysticks durch irgendeinen Gegenstand um den Joystick herum eingeklemmt wurde; stellen Sie darüber hinaus sicher, dass der Joystick vollständig in Ihre Richtung gezogen ist.

Problem Das Bedienfeld des Joysticks hat sich gelöst.

Ursache und Abhilfe-
maßnahme

Aus Sicherheitsgründen wurde das Bedienfeld so konzipiert, dass es sich automatisch löst. Setzen Sie das Bedienfeld des Joysticks so auf, dass der Schlitz am Bedienfeld in die Drehachse nach außen gewölbt zum Gelenk des Bedienfeldes an der rechten Armlehne einrastet. Siehe dazu die rechte Abbildung.

* Verwenden Sie den Sessel nicht bei abgenommenem Bedienfeld.

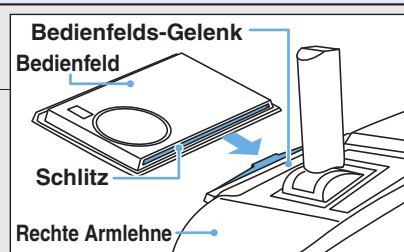

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F Wie kann ich die Massage-Maßnahme intensiver gestalten?

A Verwenden Sie die Intensitätstaste auf der Fernbedienung, um die Intensität des Gesundheitspflege-Programms einzustellen. Verwenden Sie im manuellen Auswahlmodus den Joystick. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Massage nicht intensiv genug ist, senken Sie bitte die sich neigende Rückenlehne ab und setzen Sie sich noch tiefer in den Sessel, um die sich neigende Rückenlehne mehr zu belasten. Um die Intensität zu erhöhen, können Sie auch das Pufferpolster aus dem Inneren des Rückenpolsters entfernen.

F Wie kann ich die Massage-Maßnahme weniger intensiv gestalten?

A Verwenden Sie die Intensitätstaste auf der Fernbedienung, um die Intensität des Gesundheitspflege-Programms einzustellen. Verwenden Sie im manuellen Auswahlmodus den Joystick. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Massage zu intensiv ist, tauschen Sie das Pufferpolster im Inneren des Rückenpolsters durch das im Lieferumfang enthaltene Pufferpolster (dicker) aus. Um die Intensität abzusenken, können Sie auch die sich neigende Rückenlehne anheben.

F Auf dem Sessel wurde Wasser verschüttet. Was ist zu unternehmen?

A Schalten Sie bitte sofort den Haupt-POWER-Schalter aus und trennen Sie den Sessel von der Stromversorgung ab. Konsultieren Sie hinsichtlich einer Beratung den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

F Kann der Sessel auch bei Übergewicht verwendet werden?

A Wir empfehlen eine Verwendung des Sessels durch Personen, die maximal 120 kg wiegen. Der Sessel kann dennoch problemlos genutzt werden; ist aber für diese Art von Belastung eigentlich nicht geeignet. Jeglicher Garantieanspruch erlischt im Falle einer Überlastung die zur Beschädigung des Massagesessels führt.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Aufbewahrung

- Bewahren Sie Ihren Sessel nach dem Abwischen von eventuell vorhandenen Verschmutzungen oder Staub an einem trockenen Ort auf.
- Wenn der Sessel über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, bedecken Sie ihn bitte mit einem Tuch o. Ä., um ihn vor möglichen Verschmutzungen oder Staub zu schützen.
- Haustiere kauen zuweilen an Kabeln; versuchen Sie aus diesem Grund, Haustiere auch bei der Lagerung des Sessels von diesem fern zu halten.

Achtung ● Installieren Sie den Sessel an keinem Ort, an dem er in direkten Kontakt mit Hitze kommen könnte, wie beispielsweise in der direkten Sonne oder neben einer Heizung.

Pflege und Wartung

Achtung ● Stellen Sie bei der Reinigung oder Pflege des Sessels sicher, dass Sie zuerst den Sessel von der Wandsteckdose abtrennen. Berühren Sie das Netzkabel auf keinen Fall mit feuchten Händen.

[Pflege des Rückenpolsters, der Kopfstütze und der Bezüge]

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, das Sie zuvor mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel getränkt und anschließend gründlich ausgewrungen haben, um Flecken oder Verschmutzungen zu beseitigen.

Achtung ● Die Farbe des Stoffes kann sich verändern, wenn der Sessel über einen längeren Zeitraum hinweg mit Vinylabdeckungen oder bestimmten Tapeten in Kontakt kommt.
● Bügeln Sie den Sessel oder den Bezug nicht.

[Pflege und Wartung der Fernbedienung, des Joysticks und des Steuerkastens]

Wischen Sie evtl. vorhandene Verschmutzungen von der Fernbedienung, der Neben-Fernbedienung, dem Joystick und/oder dem Steuerkasten mit einem trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie bitte niemals ein feuchtes oder nasses Tuch. → Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen.

[Pflege der übrigen Plastikteile]

Tränken Sie zuerst ein weiches Tuch in lauwarmem Wasser mit einer kleinen Menge aufgelösten Neutralreinigers. Wringen Sie das Tuch anschließend sorgfältig aus, bevor Sie die betreffenden Teile abwischen.


- Verwenden Sie keinerlei auf Alkohol basierende oder andere Haushaltsreiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen und/oder eine Beeinträchtigung der Farbe verursachen können.

Abnehmen der Kopfstütze und des Rückenpolsters

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, um die Kopfstütze oder das Rückenpolster abzunehmen.

* Befolgen Sie die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um beides wieder anzubringen.

- (1) Lösen Sie das Klettband, das die Kopfstütze auf dem Rückenpolster befestigt, und nehmen Sie die Kopfstütze ab.
- (2) Öffnen Sie den Reißverschluss, mit dem die Bezüge der Rückenlehne und der sich neigenden Rückenlehne miteinander verbunden sind.
- (3) Lösen Sie die Laschen, die das Rückenpolster befestigen und nehmen Sie das Rückenpolster ab.

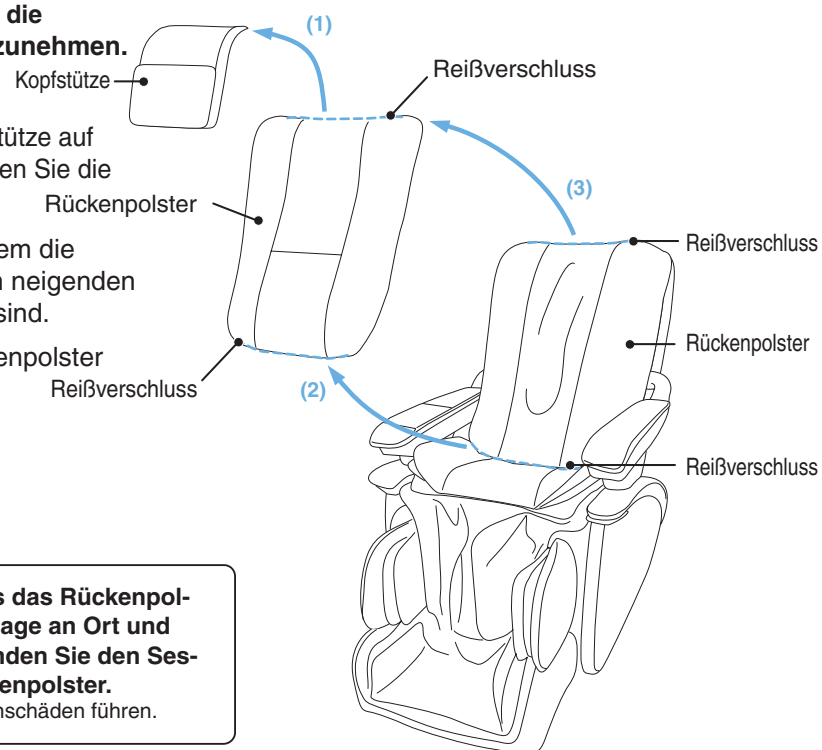

Achtung ● Stellen Sie sicher, dass das Rückenpolster während der Massage an Ort und Stelle verbleibt. Verwenden Sie den Sessel niemals ohne Rückenpolster.
→ Dies könnte zu Personenschäden führen.

SERVICE UND GARANTIE

1. Garantie

Jedem Sessel liegt beim Verkauf eine Garantiekarte bei.

Lesen Sie sich den Inhalt bitte sorgfältig durch und bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf (Sie benötigen diese Karte, um Reparaturen innerhalb des Garantiezeitraumes zu vereinfachen).

Wenn der Sessel nicht innerhalb eines heimischen Umfeldes betrieben wird (beispielsweise wenn Sie ihn zu kommerziellen Zwecken nutzen), sind selbst Reparaturen innerhalb des Garantiezeitraumes kostenpflichtig.

2. Reparaturen und Service

Verwenden Sie bitte die Anweisungen zur Fehlersuche auf den Seiten 27-29, um ein eventuell aufgetretenes Problem u. U. selbst zu beheben, bevor Sie den Kundendienst mit einer Reparatur beauftragen.

Falls das betreffende Problem nach der Überprüfung noch immer besteht, konsultieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben, hinsichtlich weiterer Maßnahmen.

Halten Sie zu diesem Zweck bitte die folgenden Informationen bereit:

- 1) Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer
- 2) Handelsbezeichnung (siehe Seite 34 in dieser Bedienungsanleitung)
- 3) Seriennummer (siehe Firmenaufkleber auf dem Steuerkasten auf der Rückseite des Sessels)
- 4) Kaufdatum
- 5) Beschreibung des aufgetretenen Problems (so detailliert wie möglich)

- Während des Garantiezeitraums:

Halten Sie Ihre Garantiekarte griffbereit. Allerdings wird selbst innerhalb des Garantiezeitraums für bestimmte Reparaturen eine Gebühr erhoben; lesen Sie sich die Karte also sorgfältig durch.

- Wenn die Garantie bereits abgelaufen ist:

Konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

Wenn die Funktion des Gerätes durch eine Reparatur beibehalten werden kann, würden wir uns glücklich schätzen, auf Ihre Anforderung hin eine kostenpflichtige Reparaturleistung zu übernehmen.

- Mindest-Bereitstellungszeitraum für Ersatzteile:

Wir halten noch über einen Zeitraum von sechs Jahren funktionale Reparatur-Ersatzteile für die einzelnen Sessel-Modelle bereit (dies schließt allerdings nicht die Stoffbezüge o. Ä. mit ein). Funktionale Reparatur-Ersatzteile sind die Teile, die für die Beibehaltung der Funktionalität des Sessels erforderlich sind.

- Bei weiteren Fragen:

Konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

REGELMÄßIGE WARTUNG

Eine regelmäßige Wartung stellt eine lange Lebensdauer Ihres Sessels sicher.

Sind irgendwelche der folgenden Symptome aufgetreten?

- Manchmal wird der Sessel nach dem Einschalten der Stromversorgung nicht gestartet.
- Das Netzkabel ist ausgefranst oder beschädigt.
- Das Netzkabel oder der Anschluss wird heiß.
- Manchmal treten brennender Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auf, während der Sessel in Betrieb ist.
- Manchmal schaltet sich der automatische Timer nicht aus.
- Es sind andere ungewöhnliche Dinge oder Probleme aufgetreten.

Falls Sie mit Ihrem Sessel eines der oben aufgeführten Probleme haben sollten, stoppen Sie die Verwendung des Sessels bitte sofort und trennen Sie ihn von der Stromversorgung ab, um einen Unfall oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Händler konsultieren, bei dem Sie den Sessel erworben haben, um eine Wartungsinspektion mit ihm zu vereinbaren.

Sichere Verwendung des Sessels


Bei dem für den Sesselbezug verwendeten Stoff handelt es sich um austauschbare Verbrauchware, die für eine dreijährige Verwendung unter regulären Bedingungen konzipiert wurde (regulär sind zwei 15-minütige Massage-Sitzungen täglich).

Konsultieren Sie vor dem Verstreichen dieser drei Jahre für eine größtmögliche Sicherheit bei der Verwendung Ihres Sessels den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder den Kundendienst, um eine (regelmäßige) Wartungsinspektion zu vereinbaren.

* Falls die Verwendung des Sessels intensiver ist als oben aufgeführt, hält der Stoff des Sesselbezugs u. U. nicht so lange.

* Wir empfehlen Ihnen, den Sessel fünf Jahre nach dem Kauf einer regelmäßigen Wartungsinspektion zu unterziehen.

Konsultieren Sie hinsichtlich einer Wartung und/oder Reparatur den Händler, bei dem Sie den Sessel erworben haben.

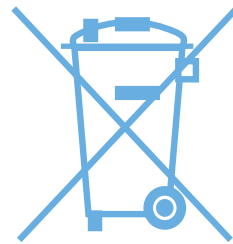

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsbezeichnung	Inada chair ROBOSTIC HCP-D6D	
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V ~	
Stromaufnahme	170 W	
Leistungsfrequenz	50-60 Hz	
Nennzeit	30 Minuten	
Oberteil	Knetgeschwindigkeit	7 Stufen von mindestens 10-mal pro Minute bis höchstens 40-mal pro Minute
	Klopfgeschwindigkeit	7 Stufen von mindestens 188-mal pro Minute bis höchstens 480-mal pro Minute
	Rollenbreite	Stufenlos (Minimum: etwa 6 cm, Maximum: etwa 18 cm)
	Vertikalgeschwindigkeit	Ein voller Zyklus (von oben nach unten und wieder nach oben) in etwa 20 Sekunden
	Rückenmaßnahmen-Bereich	Etwa 64 cm (bei der partiellen Rollenmassage etwa 15 cm)
Voreingestellte Programme	Gesundheitspflege-Programme: 10 Arten (5 Arten x 2 Muster) (mit automatischer Shiatsu-Punkt-Lokalisierungsfunktion)	
Manuelle Auswahl	6 Arten (einschließlich automatischer Shiatsu-Punkt-Lokalisierungsfunktion)	
Vibrationsfunktion	2 Arten: Die Funktionen Fußsohle und Rücken können jeweils zwischen 2 unterschiedlichen Intensitätsstufen umgeschaltet werden. (Die Sitz-Vibration ist nur im Gesäßprogramm verfügbar.)	
Luftmassage	Luftdruck etwa 32 kPa	
Automatischer Timer	etwa 15 Minuten (Die Gesundheitsprogramme variieren hinsichtlich ihrer Dauer.)	
Fußstützen-Einstellbereich	etwa 29 cm (mit automatischer Fußstützen-Einstellfunktion)	
Neigungswinkel	etwa 120°-170° vom Boden aus in stufenloser Bewegung (automatische Neigung)	
Sesselabmessungen	etwa 77 x 140 (205) x 120 (90) cm Die Zahlen in () bezeichnen die maximale Neigung bei ausgefahrener Fußstütze.	
Außenbezug	Kunstleder (mit antibakteriellem/schmutzabweisendem Finish)	
Gewicht	etwa 113 kg	
Zubehör	Fernbedienungshalterung, Netzkabel, T-Schraubenschlüssel, Shiatsu-Fußsohlenmatte, Pufferpolster (dicker)	

- Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen/Gewichtsabweichungen möglich.

Maschinenlärminformationsverordnung –3.GPSGV, 06.01.2004:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Bei Rückfragen – bitte stets unter Vorlage der Rechnung bzw. Rechnungsnummer und Kaufdatum, Kaufort: