

Tragen Sie den Biss-Killer (Bite Relief) stets bei sich, denn er erzielt seine beste Wirkung, wenn er sofort nach einem erfolgten Insektenstich benutzt wird.

Bitte bewahren Sie die Anweisungen gut auf:

1. Halten Sie das Gerät wie gezeigt um oder auf den Einstich.
2. Drücken Sie den Knopf etwa 5 Mal, um den Juckreiz zu lindern bis zu 12 Mal, um einen Stich anschwellen zu lassen, bei Kindern entsprechend weniger.
3. Die Linderung tritt nach etwa 5 Minuten ein. Wiederholen Sie die Behandlung, falls notwendig.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nur im Freien benutzen.
- Nicht in Augen-oder Mundnähe sowie an anderen empfindlichen Stellen einsetzen.
- Nicht in der Nähe offener Flammen einsetzen, oder wenn Sie sich gerade erst mit Mückenschutz eingerieben haben.
- Blutet oder eitert die Wunde, das Gerät anschließend desinfizieren.
- Nicht für Epileptiker oder Träger von Herzschritt machern geeignet.
- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.
- Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bitte diese Anweisungen aufbewahren und Gerät bei Bedarf in geeigneter Form entsorgen.