

SinuCare

Nasendusche




Gebrauchsanweisung:

- 1) Füllen Sie die Nasivent Sinucare Nasendusche bis zur Markierung (300ml) mit lauwarmen Wasser.
- 2) Geben Sie einen Beutel Nasenspülsalz in den Behälter. Verwenden Sie Nasivent Sinucare nur mit einem für Nasenspülungen geeignetem Salz.
- 3) Schrauben Sie den Aufsatz auf den Wassertank und schütteln Sie die Flasche, bis sich das gesamte Salz aufgelöst hat.

Anwendung:

- 1) Setzen Sie den Aufsatz an Ihr Nasenloch, so dass es abgedeckt ist.
- 2) Drücken Sie das Sicherheitsventil am Flaschenboden. Das Wasser fließt nun aus der Flasche in das eine Nasenloch hinein und aus dem Anderen heraus.
- 3) Durch Drücken des Ventils können Sie den Wasserfluß jederzeit unterbrechen und wieder fortsetzen. Wechseln Sie nach einiger Zeit das Nasenloch.

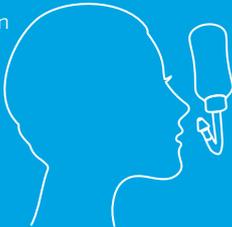

Reinigung:


Spülen Sie die Flasche mit frischem Wasser aus und lassen Sie diese anschließend trocknen.

Sicherheitshinweis:

Benutzung für Kinder nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Erwachsene

Kinder ab 12 J.

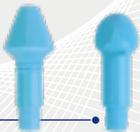

 **NASIVENT**
www.nasivent.de

SinuCare

Nose Shower




Instruction manual:

- 1) Fill the Nasivent Sinucare Nasal Douche with tepid water up to the mark (300ml).
- 2) Add one bag of nasal rinsing salt to the container. Only use Nasivent Sinucare with a salt suitable for nasal rinsing.
- 3) Screw the attachment onto the water tank and shake the bottle, until all the salt has dissolved.

Application:

- 1) Place the attachment against your nostril so that it is covered.
- 2) Press the safety valve at the bottom of the bottle. The water now flows from the bottle into one nostril and out of the other.
- 3) By pressing the valve again, you can interrupt and resume the water flow at any time. Change the nostril after some time.

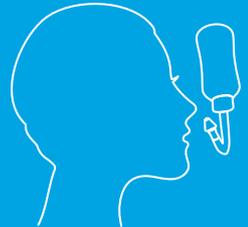

Cleaning:

Rinse the bottle with fresh water and let it dry.

Safety instructions:

Use for children only under the direct supervision of adults.

Adult

Children over 12 y.



 **NASIVENT**
www.nasivent.de