



My.Size PRO «69mm» 3 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

3 gefühlsechte Maßkondome aus hypoallergenem VYTEX-Latex.
Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 69mm. Ohne Latexgeruch.

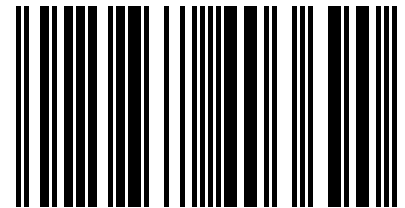

GTIN (EAN-13): 4025838403690

Die **My.Size PRO «69mm» 3 Kondome** sind speziell für Männer mit einem Penisumfang von 7-8 cm entwickelt und bieten eine optimale Passform dank der nominalen Breite von **69 mm** und einer Länge von **223 mm**. Gefertigt aus **hypoallergenem VYTEX-Latex**, das 90 % weniger Latexproteine enthält, eignen sie sich ideal für empfindliche Haut. Mit einer **extra dünnen Wandstärke** von 0,055 mm garantieren sie ein intensives Gefühl, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Diese transparenten Kondome sind silikonbefeuchtet, ohne störenden Latexgeruch, und besitzen ein integriertes **Reservoir** für zusätzlichen Schutz. Jedes Kondom wird **elektronisch getestet**, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Vegan und umweltfreundlich, bieten sie eine perfekte Kombination aus Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit. My.Size PRO Kondome sind in 9 Größen erhältlich, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

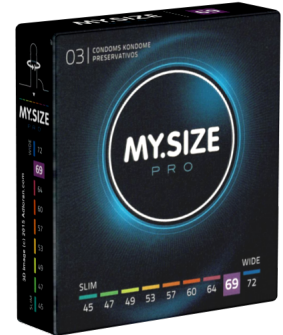

Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 22 g
- Länge: 223 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,055 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex, hypoallergen
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex

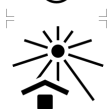

Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com