

GETRÄNKEHALTER

MONTAGE UND SICHERHEIT

Inhalt:

Abb. 1: Vormontierter Halter

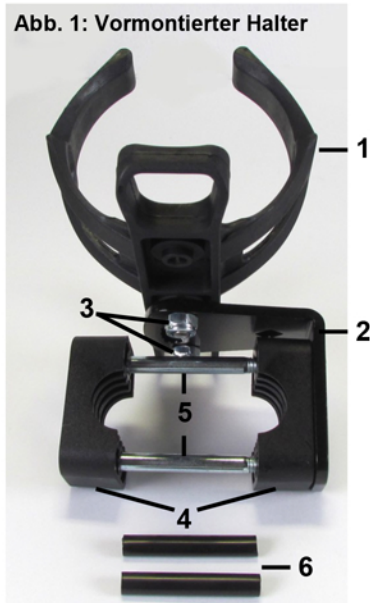


Abb.1: Vormontierter Getränkehalter

- 1 – Getränkehalter
- 2 – Befestigungswinkel
- 3 – Sicherungsmutter
- 4 – Schelle 18 mm zur Befestigung am Rahmenrohr
- 5 – Innensechskantschraube M6 x 75
- 6 – Kunststoffröhrchen zur Gewindeabdeckung

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Getränkehalters. Der GETRÄNKEHALTER BESCO ROLLA wurde speziell für die Montage am Rahmenrohr Ihres BESCO-Rollators entwickelt. Der Halter ist geeignet für Flaschen mit 0,5 Liter Inhalt oder bis zu 70 mm Durchmesser. Sie können ihn mit wenigen Handgriffen an Ihrem Rollator anbringen, da er bereits vormontiert geliefert wird (**Abb. 1**).

Montage:

Abb. 2: Montage am Rahmenrohr


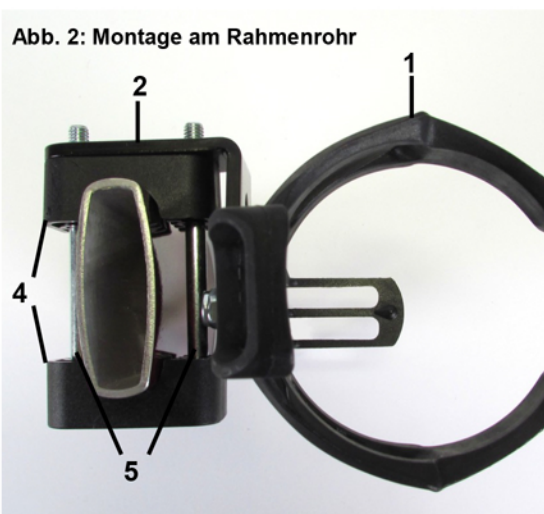


Abb. 3: Kunststoffröhrchen als Gewindeabdeckung



1. Bitte montieren Sie den Getränkehalter so, dass er nach der Montage nach außen zeigt.
2. Lösen Sie dazu die Innensechskantschrauben M6 x75 (5) mit einem geeigneten Schlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Legen Sie nun die Kunststoffschelle (4) um das Rahmenrohr Ihres BESCO-Rollators herum.
4. Verbinden Sie Schrauben (5), Befestigungswinkel (2) und Schellen (4), so dass die Schraubenspitzen gleichmäßig aus dem Befestigungswinkel herausschauen. In **Abb. 2** ist der montierte Halter am Rahmenrohr dargestellt. Zur besseren Sichtbarkeit ist das Rohr angeschnitten gezeigt.
5. Legen Sie anschließend die Kunststoffröhrchen (6) um die sichtbaren Schraubengewinde herum, indem Sie sie seitlich aufschlitzen und über die Schrauben ziehen (**Abb. 3**).
6. Ihr Getränkehalter ist nun fertig montiert.
7. Wir empfehlen, die Schrauben nach zwei Tagen nochmals festzuziehen.

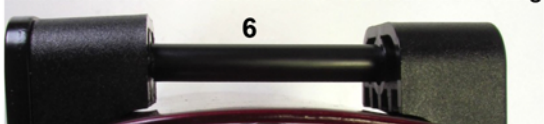

Dieser Artikel darf im defekten Zustand nicht mehr eingesetzt werden! Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann bzw. Kundendienst vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden **MPB ® GETRÄNKEHALTERS BESCO ROLLA** und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist die Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.

