

Antar Antidekubitus Sitzkissen

Gebrauchsanweisung

Wichtige Informationen und Warnungen

Vielen Dank für den Erwerb der von uns angebotenen Antidekubitus Sitzkissens. Vor Beginn der Nutzung des Produktes, machen Sie sich bitte mit der folgenden Bedienungsanweisung vertraut.

Antar Sitzkissen eignen sich auch zum Einsatz im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in der häuslichen Pflege.

Indikationen

- Das Sitzkissen ist sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch für Dekubitus­therapie einsetzbar.
- Zur Schmerzlinderung

Kontraindikationen

Das Antidekubitus Sitzkissen ist nicht bei Patienten mit völlig fehlenden Eigenbewegungen einzusetzen.

Anwendung

Das Antidekubitus Sitzkissen ist für die Anwendung auf der Sitzfläche eines Rollstuhls oder einer anderweitigen Sitzgelegenheit vorgesehen. Die Sitzgelegenheit muss eine ebene Sitzfläche haben. Die Sitzfläche darf keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die das Sitzkissen beschädigen können.

Der Anwender (Pflegepersonal) muss die entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes zu überprüfen, das Dekubitusrisiko richtig beurteilen und bestehende Dekubitusgeschwüre bewerten zu können.

Verwenden Sie das Antidekubitus Sitzkissen nicht auf weichen Unterlagen, wie z.B. Sessel oder Couch, sondern nur auf festen und ebenen Auflageflächen

Schützen Sie das Sitzkissen vor offenem Feuer und vor direkter Sonneneinstrahlung.

Schützen Sie das Sitzkissen vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen und Oberflächen.

Zulässiges Patientengewicht

Für Personen von 30 - 150 kg Körpergewicht.

Das Antidekubitus Sitzkissen gleicht sich an Lageveränderungen an. Durch die Eigenbewegungen und Gewichtsverlagerungen des sitzenden Patienten erfolgt eine wechselseitige Druckreduzierung. Dadurch wird die Durchblutung verbessert und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus verringert.

Reinigungshinweise Kissenbezug

Durch einen wasserdichten und abnehmbaren Sitzkissenbezug wird das Sitzkissen vor Verunreinigungen geschützt und erlaubt eine schnelle unkomplizierte Reinigung.

Bei Verunreinigungen kann der Bezug abgenommen und gewaschen werden. Außerdem kann er sprüh- bzw. wischdesinfiziert werden.

Wäsche

Waschen bei 95 ° C mit einem neutralen Reinigungsmittel, Weichmacher sind nicht erlaubt.

Desinfektion

Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis Phenol oder Phenolderivaten in der Lösung können verwendet (nach Angaben des Herstellers) werden.

Es ist jedoch wichtig, vor Gebrauch an einer kleinen Stelle zu testen.

Hohe Konzentrationen von aktivem Chlor kann einen negativen Einfluss auf das Kissenbezug haben, so dass die Verwendung nicht empfohlen ist. Wenn immer noch notwendig, verwenden Sie absolut sehr verdünntes Chlor und spülen Sie die Abdeckung mehrmals mit Wasser.

Die gleichen Anweisungen sind für Desinfektionsmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid und im allgemeinen alle Desinfektionsmittel nach dem Prinzip der Oxidation zutreffend.

Auf Wunsch machen wir eine Untersuchung der verschiedenen Desinfektionsmittel.

Lagerung

Lagerung in einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.

Vermeiden Sie übermäßigen druck. Schützen Sie das Sitzkissen vor offenen Feuer und vor direkter Sonneneinstrahlung.

Wartungshinweise

Das Produkt ist Wartungsfrei.

Technische Daten:

- Schaumstoff: Viscoelastischer Schaumstoff, Raumgewicht: 48 kg/m³
- Bezug: Atmungsaktiver Bezug, 65 % Polyurethan 35 % Polyester, Unterseite Antirutsch mit Tragegriff 57 % Polyurethan 43 % Polyester
- Abmessungen: 43cm x 43cm x 9cm
- Verpackung: einzeln im Karton
- Gewicht: ca. 0,65 kg

Lieferumfang:

Sitzkissen mit Atmungsaktivem Bezug