


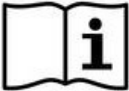
Sicherheits- und Warnhinweise für farbige Kontaktlinsen

1. **Nur für kosmetische Zwecke:** Diese Kontaktlinsen sind ausschließlich für kosmetische Zwecke bestimmt und korrigieren keine Sehfehler. Verwenden Sie die Linsen nicht als Ersatz für Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen mit Stärke.
2. **Augenärztliche Beratung vor dem ersten Gebrauch:** Sollten Sie kein Kontaktlinsenträger sein, empfehlen wir dringend, sich vor der ersten Verwendung durch einen Augenoptiker oder Augenarzt beraten zu lassen. Die erstmalige Verwendung von Kontaktlinsen sollte durch einen Fachmann überwacht werden.
3. **Gefahr durch falsche Handhabung:** Falsche Handhabung der Kontaktlinsen kann zu Schäden an Ihren Augen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Handhabung und Pflege von Kontaktlinsen bestens vertraut sind.
4. **Reinigen und Desinfizieren:** Reinigen und desinfizieren Sie die Linsen vor jedem Gebrauch mit einer geeigneten Kontaktlinsenlösung. Wir empfehlen, die Linsen vor dem ersten Gebrauch mit Ihrer eigenen Kontaktlinsenflüssigkeit zu benetzen. Verwenden Sie niemals Leitungswasser oder Speichel zur Reinigung.
5. **Hygiene beachten:** Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab, bevor Sie die Linsen berühren. Achten Sie darauf, dass Ihre Nägel sauber und kurz geschnitten sind, um Beschädigungen der Linsen zu vermeiden.
6. **Tragezeit begrenzen:** Tragen Sie die Linsen nicht länger als die empfohlene Dauer (in der Regel 8 Stunden pro Tag). Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene maximale Tragedauer, um das Risiko von Augenreizungen oder Infektionen zu minimieren.
7. **Nicht über Nacht tragen:** Tragen Sie die Linsen niemals im Schlaf, es sei denn, sie sind speziell dafür zugelassen.
8. **Keine gemeinsame Nutzung:** Geben Sie Ihre Kontaktlinsen nicht an andere Personen weiter. Die gemeinsame Nutzung erhöht das Risiko von Augeninfektionen.
9. **Regelmäßige Augenuntersuchungen:** Als Kontaktlinsenträger sollten Sie Ihre Augen regelmäßig, mindestens alle sechs Monate, von einem Kontaktlinsenspezialisten überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass Ihre Augen gesund bleiben und weiterhin für das Tragen von Kontaktlinsen geeignet sind.
10. **Vorsicht bei Allergien:** Verwenden Sie die Linsen nicht, wenn Sie an Allergien oder empfindlichen Augen leiden, die durch das Tragen von Kontaktlinsen verschlimmert werden könnten.
11. **Linsen bei Reizung sofort entfernen:** Sollten Sie während des Tragens Rötungen, Schmerzen, Tränenfluss oder andere Anzeichen von Reizungen oder Infektionen bemerken, entfernen Sie die Linsen sofort und suchen Sie einen Augenarzt auf.
12. **Beratung zu Material und Krümmung:** Wir empfehlen Ihnen, sich von einem Augenarzt oder Augenoptiker beraten zu lassen, wenn Sie beabsichtigen, Kontaktlinsen zu bestellen. Der Fachmann wird Ihnen Hinweise im Hinblick auf Material, Krümmung und Wassergehalt geben.
13. **Aufbewahrung und Entsorgung:** Bewahren Sie die Linsen in einem sauberen, trockenen Behälter auf und ersetzen Sie diesen regelmäßig. Entsorgen Sie die Linsen nach Ablauf der empfohlenen Tragedauer und verwenden Sie sie nicht über das Haltbarkeitsdatum hinaus.
14. **Kein Kontakt mit Wasser:** Vermeiden Sie den Kontakt der Linsen mit Wasser (z.B. beim Schwimmen oder Duschen), um das Risiko einer Infektion zu minimieren.
15. **Verwendung von Augentropfen:** Verwenden Sie nur für Kontaktlinsen geeignete

Augentropfen und konsultieren Sie vorher Ihren Augenarzt.

16. **Risiko bei Nichteinhalten der Warnhinweise:** Bei Nichteinhalten der Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise riskieren Sie dauerhafte Schädigungen Ihrer Augen und Ihres Sehvermögens.

Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und dem Schutz Ihrer Augen. Befolgen Sie sie sorgfältig, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren.

Symbol	Erklärung
	Verweist auf ein Produkt, das mittels Dampf oder Trockenhitze sterilisiert wurde.
	Gebrauchsanweisung beachten. Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
Zeigt ein Produkt an, das nicht verwendet werden sollte, falls die Verpackung beschädigt oder geöffnet sein sollte.



Vor Sonnenlicht schützen.
Bezeichnet ein Produkt, das Schutz vor Lichtquellen benötigt.



Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Produkt selbst angebracht werden können.



Zeigt an wie lange das Produkt verwendet werden darf.

LOT

Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.



Verwendbar bis:
Zeigt das Datum an, nach dem das
Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden
darf.