

## LENDENWIRBELSTÜTZE ANWEISUNG HANDBUCH

### Produktübersicht

Die Endless Lumbalstütze stützt den Rücken, um die Belastung des unteren Rückens beim Sitzen oder bei körperlichen Aktivitäten zu verringern.

### Sicherheitshinweise

1. Legen Sie die Bandage um Ihren unteren Rücken und befestigen Sie die Riemen.
2. Stellen Sie die Spannung so ein, dass die Bandage fest sitzt, ohne unangenehm zu sein.
3. Verwenden Sie die Bandage nur für den empfohlenen Zeitraum, um eine Abhängigkeit zu vermeiden.

### Pflege

- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
  - An der Luft trocknen.
- 
-