

KISSENWÄRMFLASCHE

MIT GURTSYSTEM & WÄRMFLASCHE

Anwendung:

Zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Auch geeignet zur Schmerzlinderung, bei der Wärmertherapie empfohlen wird, wie z.B. Störungen der Darmbewegung, Durchblutungsförderung, Entkrampfung vom Muskelverspannungen, Menstruationsbeschwerden.

ACHTUNG: Bei regelmäßig wiederholter Anwendung auf einem Hautareal kann es zur Ausbildung der Hautkrankheit Erythema ab igne kommen. Diese heilt ab nachdem die Wärmebehandlung abgerochen wird. Da Kinder unter 36 Monaten über eine deutlich empfindlichere Haut verfügen ist eine Oberflächentemperatur von <42°C einzuhalten und der direkte Hautkontakt zu vermeiden.

Nicht anwenden bei:

Z.B. fieberhaften Erkrankungen, Entzündungen. Verminderter Nervenempfindlichkeit / Störung des Temperaturempfindens, bei großflächigen Hautverletzungen bzw. Hautkrankheiten, bei chronischer venöser Insuffizienz. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



SICHERHEITSHINWEISE

Kein kochend heißes Wasser verwenden, auch heißes Leitungswasser kann zu Verbrühungen führen. Wärmflasche nicht überfüllen, da dies zum Bersten führen kann. Maximal zu 2/3 langsam befüllen, Wärmflasche dabei senkrecht am Flaschenhals halten, um ein Zurückspritzen des Wassers zu vermeiden.

Restluft vorsichtig entweichen lassen, anschließend Schraubverschluss ausreichend fest zudrehen und Verschluss und Wärmflasche auf Dichtheit überprüfen. Vergewissern Sie sich abschließend, dass der Einfülltrichter leer ist. Kontakt mit heißen, spitzen oder scharfen Oberflächen, Öl, Fett und Sonnenlicht vermeiden und keine Gegenstände auf der Wärmflasche ablegen. Unter keinen Umständen Wärmflasche als Kissen verwenden und sich auf diese setzen. Nach Gebrauch vollständig entleerte Wärmflasche an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren.

ACHTUNG

- Nicht in der Mikrowelle oder im Backofen erhitzen
- Niemals auf das Stuhlkissen sitzen. Nur an der Rückenlehne von einem Stuhl oder als mobilen Rückenwärmer einsetzen.
- Wärmflaschen können zu Verbrennungen führen, (bei empfindlicher Haut schon ab Temperaturen von 42°C) daher ist längerer Kontakt mit der Haut zu vermeiden, oder ein angemessener Wärmflaschenbezug zu verwenden
- Keine Zusätze wie Kochsalz, ätherische Öle oder ähnliches verwenden
- Gebrauch für Kinder, Hilflöse, Kranke bzw. hitzeunempfindliche Personen nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Wärmflasche und Verschluss vor der Verwendung auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen
- Nur original fashy Verschlüsse verwenden
- Vor dem ersten Gebrauch den Haken entfernen
- Die Wärmflasche kann unter fließendem Wasser ohne Reinigungszusätze gesäubert werden
- Befüllen Sie die Flasche nicht mit Wasser aus dem Haus-Warmwassersystem, da dies die Lebensdauer der Wärmflasche erheblich verkürzen könnte
- Die fashy Wärmflasche ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden

Wir empfehlen den Austausch der Wärmflasche aus hygienischen Gründen nach fünf Jahren. Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Bedienanleitung bitte aufbewahren.