

Bedienungs- / Montageanleitung für die Plattformschaukel

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **SPORT-THIEME** -Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:



"Kreis"



"Quadrat"

Abb. 1: Sport-Thieme Plattformschaukel

Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	1 x Plattform aus Polyestergerewebe mit Ringen
2	4 x Isilink- Leine ; l= 3,5 m
3	4 x Karabinerhaken
4	4 x Notkettenglieder

1. Allgemein

Die Plattformschaukel ist ideal zur Förderung des vestibulären Systems. Die Plattform ist besonders weich gepolstert und der Bezug besteht aus einem strapazierfähigen Polyestergerewebe in Kunstlederqualität.

Die Schaukel ist für die Deckenmontage gedacht und bietet durch Änderung der Aufhängepunkte verschiedene Schaukelvarianten (siehe Punkt 4 der Montageanleitung).

Die maximal zulässige vertikale Belastung für die Plattformschaukel beträgt 120 kg.

Das Befestigen der Plattformschaukel an der Decke erfolgt durch die eingenähten Ringe an den Isilink- Leinen. Diese werden mittels Karabinerhaken in dafür vorgesehene Aufhängevorrichtungen eingehängt, wie z.B. Deckenschienen* oder Deckenplatte mit Halbring* (siehe Abb.4 und Abb.5).

Die Plattformschaukel ist nur für **den bestimmungsgemäßen** Gebrauch vorgesehen. Für eine zweckentfremdete Nutzung wird keine Gewähr übernommen.

2. Aufbauanleitung

Bevor Sie mit der Montage beginnen, achten Sie darauf, dass Sie die Schaukelplattform an einer tragfähigen massiven Decke oder einem Holzbinder befestigen (keine Unterhangdecke, kein Gipskarton oder Hohllochziegel o. Ä.)! Zu ihrer Sicherheit sollten Sie die Tragfähigkeit der Decke bzw. der Holzbinder von einem Statiker prüfen lassen, der Ihnen auch die passenden Dübel bzw. Holzschrauben für die Aufhängevorrichtung auswählt. Nachdem Sie die Isilink- Leinen[®] am Aufhängepunkt befestigt haben, führen Sie die Isilink- Leinen[®] durch die Ringe und stellen mit Hilfe der Notkettenglieder[®] die gewünschte Höhe ein (siehe Abb. 2).



Abb. 2: Isilink- Leine mit Notkettenglied

3. Wartung und Kontrolle

Durch die Schaukelbewegungen kommt es zu Reibungsbewegungen zwischen der Aufhängevorrichtung und der Schaukel, in dessen Folge entstehen Verschleißerscheinungen an den Stahlteilen.

Sollten die Stahlteile mehr als 25 % Verschleiß aufweisen, sind diese Teile nicht mehr gebrauchsfähig und müssen ausgetauscht werden.

Eine weitere Kontrolle ist an den Aufhängeschlaufen der Plattform und den Seilen vorzunehmen. Auch hier kann es durch Reibungsbewegung zu Abnutzungserscheinungen kommen.

Vor jeder Nutzung ist eine Sichtkontrolle durchzuführen.

4. Anwendungen

Die Plattformschaukel kann durch die variablen Aufhängungen bis zu 4 verschiedene Schaukelrichtungen ausführen. Abbildung 3 zeigt die möglichen Bewegungsrichtungen bei dem 4-Punkt-, 2-Punkt- und 1- Punkt- System. Bei der 1- Punkt- Aufhängung kann die Schaukel durch Verwendung einer Feder* zusätzlich vertikal schwingen.

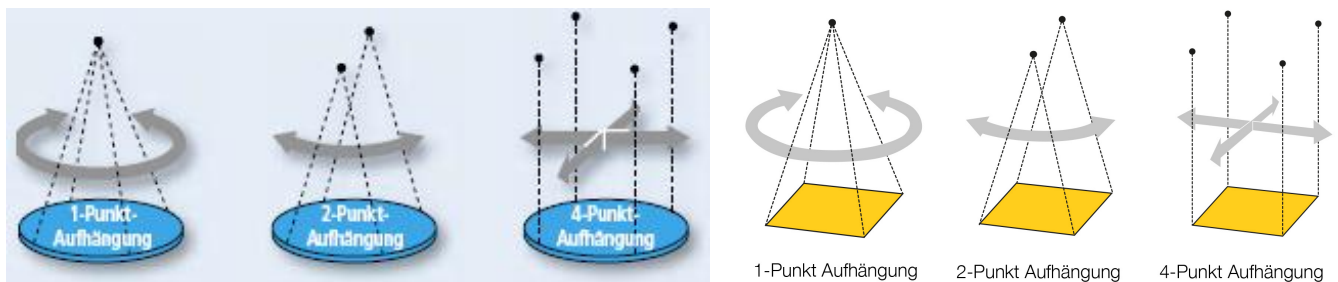


Abb. 3: Aufhängevarianten mit entsprechenden Schaukelrichtungen

In unserem Sortiment finden Sie die passenden Aufhängevorrichtungen. Das Wand-/ Deckenschienenset* (Art.-Nr.: 201 1905/ 201 1918, Abb. 4) eignet sich optimal für die 2- Punkt- und 4-Punkt- Aufhängung. Für die 1-Punkt-Aufhängung können Sie die Deckenplatte mit Halbring* (Art.-Nr.: 177 3806, Abb. 5) verwenden.



Abb. 4: Wandschienenset*
Art.-Nr.: 201 1905



Abb. 5: Deckenplatte*
Art.-Nr.: 177 3805

Die mit * gekennzeichneten Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!



Wartungshinweise und Pflege

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team