



 Schwanger

 Nicht schwanger



Ab 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode testen.



Möglichst Morgenurin verwenden, wenn Sie früher testen.



Nicht zu viel Flüssigkeit trinken vor dem Test.



Testspitze des Teststäbchens nach Möglichkeit nicht nach oben oder nach unten halten.

Durchführung des Tests

Entnehmen Sie das Teststäbchen aus der Folie, entfernen Sie die Kappe und verwenden Sie den Test umgehend. Testen Sie entweder:

10

Sekunden



in Ihrem
Urinstrahl

Oder

20

Sekunden



in einer
Urinprobe

Hier
eintauchen



Umgehend flach hinlegen,
bis das Ergebnis eindeutig
erkennbar ist (5-10 Minuten)

SCANNEN FÜR



GRATIS E-BOOK

ZITIEREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DEN TEST DURCHFÜHREN.

ZWEI-LESEN-TEST UND TESTPRINZIP

TerraTrust Schwangerschaftstest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem Choriogonadotropin (hCG) im Urin mit einer Nachweisgrenze von 10 mIU/ml oder höher, zur Bestätigung einer Schwangerschaft im Frühstadium. Der Test ist rezeptfrei erhältlich und zur Eigenanwendung bestimmt. Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, einschließlich eines monoklonalen hCG-Antikörpers, zum selektiven Nachweis erhöhter hCG-Konzentrationen. Der Test wird durchgeführt, indem eine Urinprobe auf die Testspitze des Teststreifens gegeben und das Ergebnis durch das Erscheinen rosafarbener Linien abgelesen werden kann. Die Probe wandert durch Kapillarwirkung an der Membran entlang und reagiert in Anwesenheit von hCG mit dem farbigen Konjugat.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- Nur für die In-vitro-Diagnostik und für Selbsttests geeignet.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum auf dem Verpackungsetikett. Das Testkit nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Vor der Verwendung die Folienverpackung auf Beschädigungen untersuchen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung vor dem Öffnen sichtbar beschädigt ist.
- Das Testkit sollte nicht wiederverwendet werden.
- Das Testkit ist feuchtigkeitsempfindlich und sollte sofort nach Entnahme aus der Folienverpackung verwendet werden. Bei der Handhabung ist eine Berührung der Testmembran zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Urinproben ordnungsgemäß gehandhabt werden und entsorgen Sie alle gebrauchten Probenmaterialien im Restmüll.

MITGELIEFERTER MATERIALIEN

- TerraTrust Schwangerschaftstest
- Gebrauchsanweisung

HAUPTBESTANDTEILE

Es sollte eine frische Urinprobe verwendet werden, eine besondere Vorbehandlung ist nicht erforderlich. Die Probe kann in einem sauberen Behälter gesammelt werden. Die Probe kann gekühlt (2-8 °C) und bis zu 2 Tage aufbewahrt werden. Für eine längere Lagerung sollten die Proben bei -20 °C oder darunter eingefroren werden. Gekühlte Proben sollten vor der Untersuchung langsam Raumtemperatur erreichen. Anschließend sollten diese gründlich gemischt werden. Einfrorene Proben sollten vollständig aufgetaut, sanft auf Raumtemperatur gebracht und vor dem Test gründlich gemischt werden.

PRÜFVERFAHREN

- Lassen Sie den Test und die Probe vor der Prüfung auf eine Temperatur von 15-30 °C angleichen.
- Um mit dem Test zu beginnen, öffnen Sie die versiegelte Folienverpackung durch Aufreißen entlang

HERSTELLER/PRODUZENT Qingdao AIBO Diagnostic Co., LTD, NO. 2 Wanmufangsi Road, Jinkou, Jimo, 266200 Qingdao, People's Republic of China

EC-BEVOLLMÄCHTIGTER MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 München, Deutschland

IMPORT UND VERTRIEB Zamann Pharma Support GmbH Siedlerstraße 7, 68623 Lampertheim, Deutschland
Mail: feedback@zamann-pharma.com
www.zamed.eu - www.zamann-pharma.com

ZAMED® ist eine Marke von Zamann Pharma Support GmbH und hauseigene, registrierte Produktmarke für medizinische Güter. Sie steht für Produkte, die vollständig in der EU, von qualifizierten und akkreditierten Stellen, geprüft und zertifiziert wurden und unter unserer direkten Kontrolle stehen.

- Die Kerbe. Nehmen Sie das Testkit aus der Folienverpackung und verwenden Sie es so bald wie möglich.
- Halten Sie den Griff des Tests mit einer Hand fest. Ziehen Sie mit der anderen Hand die Kappe ab und legen Sie das Absorptionfeld frei. Legen Sie die Kappe vorerhand beiseite.
- Richten Sie die Spitze des Absorptionfelds (Teststreifen) nach unten; halten Sie die Spitze des Absorptionfelds 10 Sekunden lang in den Urinstrahl, um es gründlich zu benetzen. Andernfalls können Sie Ihren Urin in einem sauberen Gefäß auffangen und die Hälfte des Absorptionfelds 20 Sekunden lang in den Urin tauchen. Achten Sie darauf, dass der übrige Teil des Absorptionfelds nicht benetzt wird.
- Verschließen Sie das Gerät wieder und warten Sie, bis farbige Streifen erscheinen. Dies hängt von der hCG-Konzentration in der Testprobe ab. Warten Sie bei allen Ergebnissen 5 bis 10 Minuten, um die Beobachtung zu bestätigen. Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 30 Minuten. Es ist wichtig, dass der Hintergrund klar ist, bevor das Ergebnis abgelesen wird.

Hinweis: Eine niedrige hCG-Konzentration kann dazu führen, dass nach längerer Zeit eine schwache Linie in der Testregion (T) erscheint; interpretieren Sie daher das Ergebnis nicht nach 30 Minuten.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

POSITIV:

Es erscheinen zwei rosa Linien, eine im Ergebnisfenster, die andere im Kontrollfenster. Eine Linie kann heller sein als die andere.

Was bedeutet das Ergebnis?

Der Test ist positiv und hat das Schwangerschaftshormon hCG in einer Konzentration von 10 mIU/ml oder mehr nachgewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt für eine pränatale Betreuung und Beratung.

NEGATIV:

Nur im Kontrollfenster erscheint eine rosa Linie.

Was bedeutet das Ergebnis?

Der Test ist negativ und es wurde kein hCG in einer Konzentration von 10 mIU/ml oder mehr nachgewiesen.

Wenn Sie jedoch nach sieben Tagen immer noch keine Periode bekommen, sollten Sie den Test mit einem anderen TerraTrust Schwangerschaftstest wiederholen. Wenn, trotz ausbleibender Periode, das Ergebnis weiterhin negativ ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

UNGÜLTIG:

Im Fenster erscheint keine Linie oder nur eine farbige Linie im Ergebnisfenster.

Was bedeutet das Ergebnis?

Der Test ist ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einem anderen TerraTrust Schwangerschaftstest. Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie schwanger sind oder nicht. Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen genau befolgen. Vermeiden Sie Folgendes:

- Halten Sie das vollständig benetzte, absorbierende Stäbchen NICHT nach oben oder nach unten gerichtet.

- Halten Sie den Test während der Wartezeit nicht in der Hand. Legen Sie den Test auf eine ebene Oberfläche und warten Sie das Ergebnis ab.
- Halten Sie die absorbierende Spitze NICHT in den Urinstrahl, bis sie vollständig nass ist. Eine Benetzung durch den Strahl von 10 Sekunden ist ausreichend.
- Warten Sie NICHT länger als 30 Minuten auf das Testergebnis.



POSITIV



NEGATIV



UNGÜLTIG

LAGERUNG UND STABILITÄT

Das Testkit ist bei 4-30 °C mindestens 24 Monate und bei 37 °C 21 Tage haltbar, jedoch maximal bis zum Ablaufdatum. Der Test muss innerhalb von 1 Stunde nach dem Öffnen der Folienverpackung verwendet werden und ist unter Transportbedingungen mindestens 100 Tage lang haltbar. Das Testkit sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze geschützt aufbewahrt werden. Das Verfallsdatum wurde unter diesen Lagerungsbedingungen ermittelt.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Fälsch negative Ergebnisse können auftreten, wenn die hCG-Konzentration unter der Nachweisgrenze des Tests liegt. Wenn der Verdacht auf eine Schwangerschaft besteht, sollte 48 Stunden später ein erster Morgenurin gesammelt und getestet werden.
- Dieser Test wurde ausschließlich für die Untersuchung von Urinproben entwickelt. Die Leistungsfähigkeit dieses Tests bei anderen Proben wurde nicht nachgewiesen.
- Sehr verdünnte Urinproben, die durch ein geringes spezifisches Gewicht (Hypostenurie) gekennzeichnet sind, enthalten möglicherweise keine repräsentativen hCG-Konzentrationen. Besteh weiterhin der Verdacht auf eine Schwangerschaft, sollte eine erste Morgenurinprobe 48 Stunden später gesammelt und getestet werden.
- Kurz nach der Einnistung sind sehr niedrige hCG-Werte in der Urinprobe vorhanden. Da jedoch eine beträchtliche Anzahl von Ersttrimester-Schwangerschaften aus natürlichen Gründen abbricht, sollte ein schwach positives Testergebnis durch einen erneuten Test mit einer 48 Stunden später gesammelten Morgenurinprobe bestätigt werden.
- Wie bei jedem Test, der Maus-Antikörper verwendet, besteht die Möglichkeit einer Interferenz durch humane Anti-Maus-Antikörper (HAMA) in der Probe. Bei Patienten, die mit monoklonalen Antikörpern therapiert oder diagnostiziert werden, können HAMA auftreten. Dies kann zu falsch negativen oder positiven Ergebnissen führen.
- Dieser Test liefert eine präsumtive Diagnose für eine Schwangerschaft. Eine bestätigte Schwangerschaftsdiagnose sollte nur von einem Arzt gestellt werden, nachdem alle klinischen und Laborbefunde ausgewertet wurden.
- Aufgrund des Hook-Effekts kann das Testergebnis bei Schwangeren im 2.-3. Monat falsch-negativ angezeigt werden.

VERWENDETE GRAFISCHE SYMBOLE gemäß ISO 15223-1:2021

Hersteller	Verfallsdatum	Artikelnummer	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten	Trocken aufbewahren	Nicht verwenden	Medizinprodukt für die In-vitro-Diagnostik	Vor Hitze schützen
Bevollmächtigter in der Europäischen Union	Chargencode	Importeur	Übersetzung von Zamann Pharma Support GmbH	Temperaturbegrenzung 4 °C bis 30 °C	Gebrauchsanweisung beachten	Ausreichend für einen Test	Herstellungsland und Herstellungsdatum