


Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stuhlsockel	Rückenlehne	linke Armlehne	rechte Armlehne	Netzkabel	Massagefernbedienung	Stuhl Remote	Stromquelle	Stromquelle



SCHRITT 1

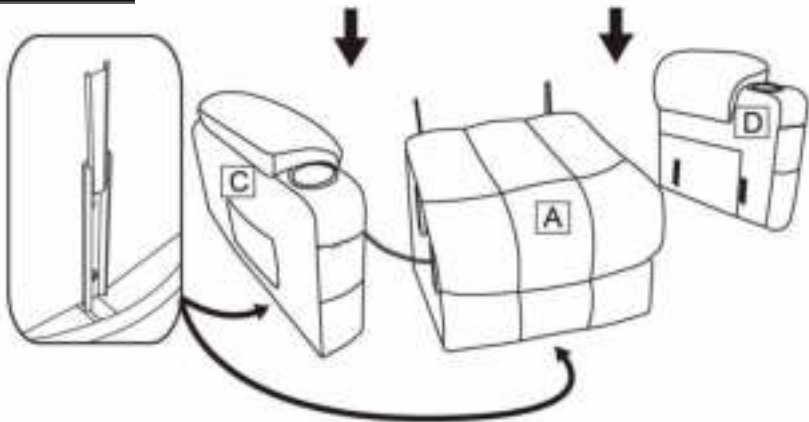


Legen Sie zwei Armlehnen an die Stuhlbasis, stellen Sie sicher, dass die Schlitz auf den Armlehnen vollständig zum unteren Teil montiert sind.



SCHRITT 2

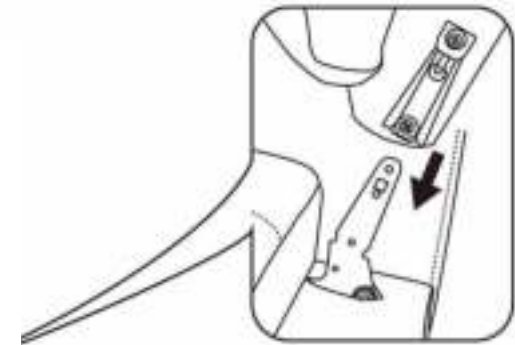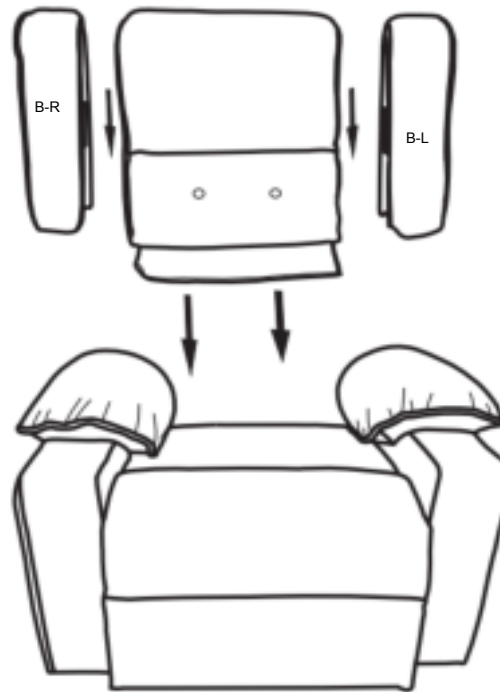

Setzen Sie den Stuhl zurück auf die Stuhlbasis, stellen Sie sicher, dass die Schlitz auf der Rückseite vollständig zum unteren Teil montiert sind.

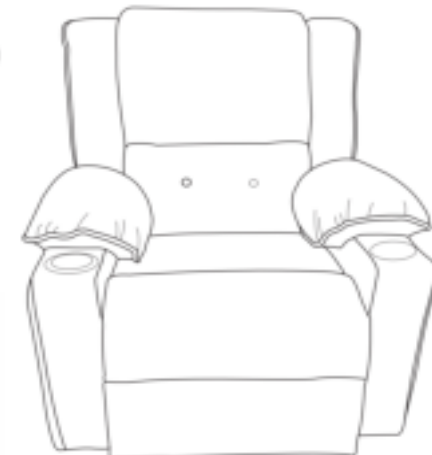


Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl

SCHRITT 3

- No.1 und No.2 Draht verbinden sich mit der Rückenlehne und Stuhlsockel.
- Draht Nr.3 verbindet sich mit der Rückenlehne und dem Netzkabel (E).
- Draht Nr.4 verbindet mit Rückenlehne und Fernbedienung (F).
- Draht Nr.5 verbinden den Motor und den Draht von Cair Remote (G), die verwenden, um das Bedienfeld anzuschließen.
- Draht Nr.6 verbinden den Motor und die Stromquelle (H).


HINWEIS

- 1:Zwei gleiche Farbdrähte verbinden.
- 2:Stecken Sie Netzkabel und Stromquelle in die Steckdose, dann können Sie alle Funktionen verwenden.

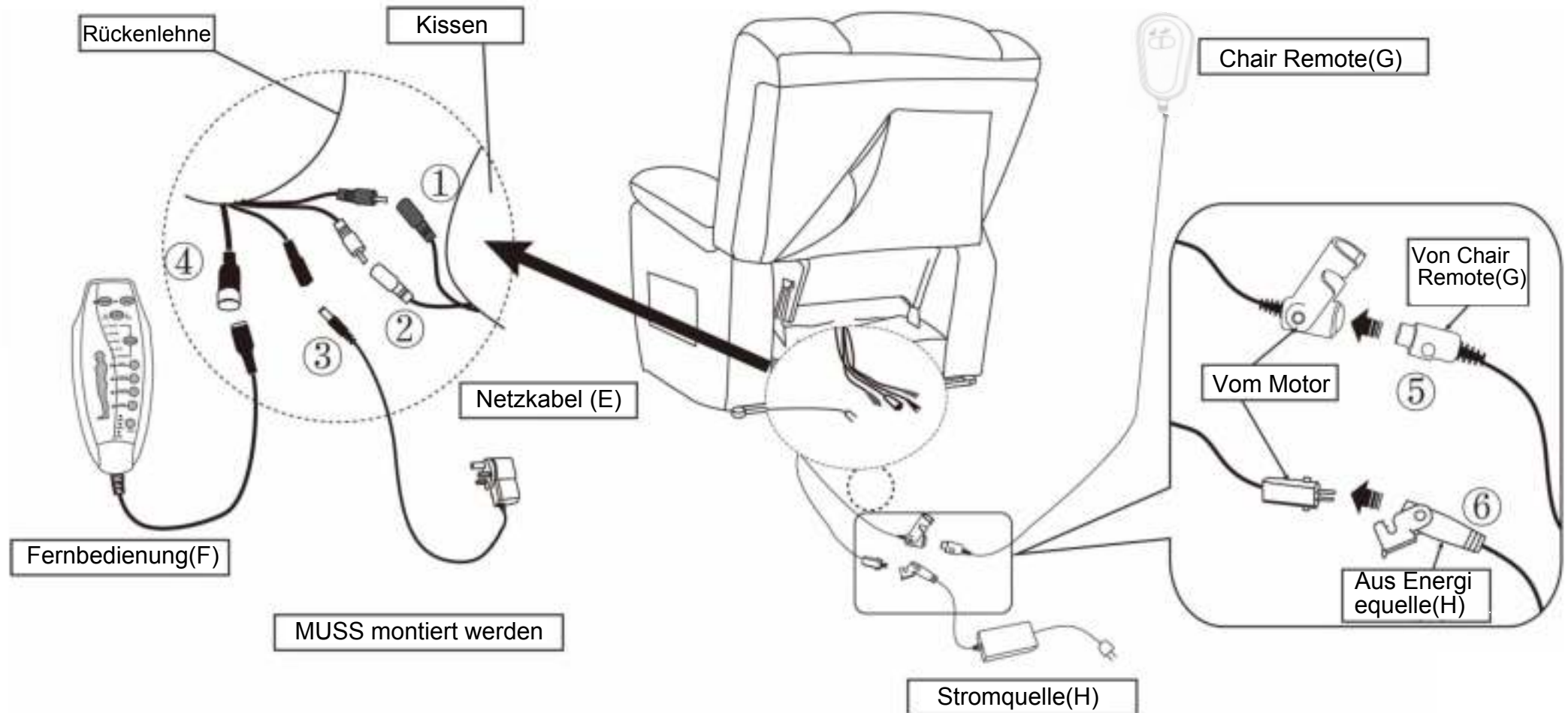




Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl

Wie man sich zurücklehnt?

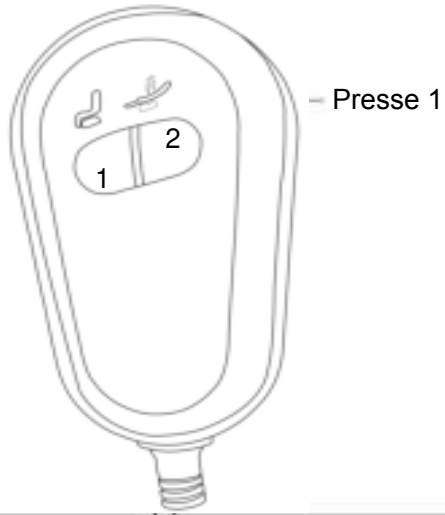

Wie bekomme ich Fußrastenverriegelung und Stand?

Presse 2

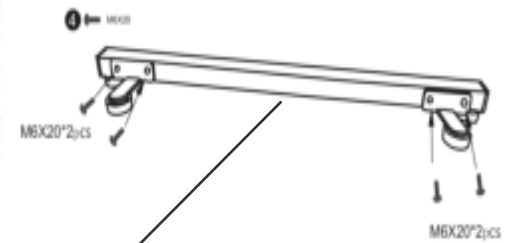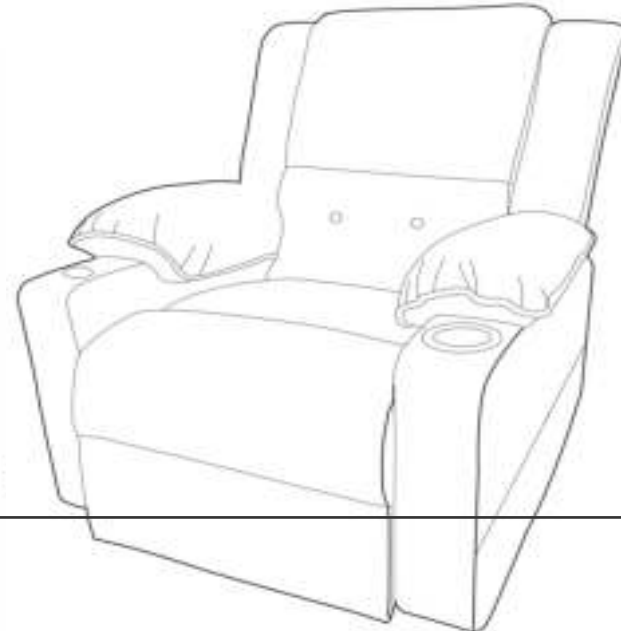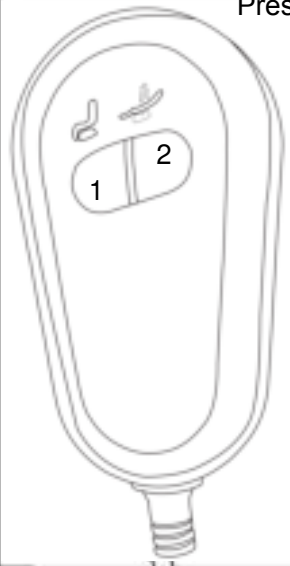

Montageanleitung für elektrischen Fahrstuhl

Wie bediene ich die Fernbedienung?

